

スタンダードを、
変えよう。



Coloplast

SpeediCath®

私たちは、 常にカテーテルを 再発明し続けています。

SpeediCath® は、開封後すぐに使用できる親水性コーティングカテーテルを発明した初めてのブランドであり、コンパクトな親水性コーティングカテーテルを初めて発明したブランドであり、カテーテル先端にフレキシブルチップを採用した初めてのブランドでもあります。

SpeediCath® は、このようにカテーテルのデザインと性能の新たな“標準（スタンダード）”を打ち立ててきました。

これからも私たちは、革新的な発想と技術により、スタンダードを新たに塗り変えてまいります。そして、あなたのすべての患者ニーズに応える努力を決して止めません。

スピーディカテが選ばれている理由

すべてのスピーディカテ製品に受け継がれる1つの共通点。それは、ユーザーのニーズを常に念頭に置いてデザインされていることです。

この揺らぐことのない真摯な姿勢が、スピーディカテをヨーロッパのトップブランドへと導きました¹。

スピーディカテ

一人ひとりに合ったカテーテル

スピーディカテ ネラトン

長年愛され続けてきた標準的なカテーテル

スピーディカテ チーマン

尿道狭窄や前立腺肥大症など挿入困難なシーンで活躍するカテーテル

スピーディカテ コンパクト

最もコンパクトなカテーテル

スピーディカテ ナビ

男性の尿道特有の湾曲・屈曲に沿うようデザインされたColoplast独自のフレキシブルな先端を持つカテーテル



スピーディカテ
ネラトン

スピーディカテ
チーマン

スピーディカテ
コンパクト

スピーディカテ
ナビ

スピーディカテ シリーズは、ユニークな製品特性で、尿道に対して愛護的な導尿を提供し続けています。

① 独自の親水性コーティング

尿道粘膜は、粘液でおおわれていて、微生物の付着を阻止しています。粘膜は上皮細胞の薄層で構成されているため、外傷に対して非常に脆弱です。したがって、不快感、痛み、および尿道外傷の危険性を最小限に抑えながら、カテーテルと尿道粘膜との間の摩擦を軽減するカテーテルを探ることが重要です²。



スピーディカテは、ベースコートとトップコートの「2層コーティング」です。

ベースコーティング	トップコーティング	潤滑液
ベースコートは、トップコートが剥がれ落ちるのを防ぐよう、コーティング素材の分子結合を強化しています。	トップコートには、主成分のポリビニルピロリドンがより多く含まれ、カテーテル表面と尿道との摩擦を抑えます。	パッケージに潤滑液が入っているため、コーティングが常に活性化され、開封後すぐに使用できるようになっています。

② エッジが磨かれ、かつコーティングされた側孔




スピーディカテ

エッジのある側孔

側孔のエッジは、側孔とカテーテル表面の間が滑らかに移行する様に、丸みを帯びています。

尿道損傷のリスクを最小限に抑え、患者の快適さを最大限にすることを目指し、カテーテルの挿入時および抜去時に尿道粘膜が側孔を滑らかに通過していく様、細部にもこだわっています。

③ 開封後“すぐに”使えるシンプルさ

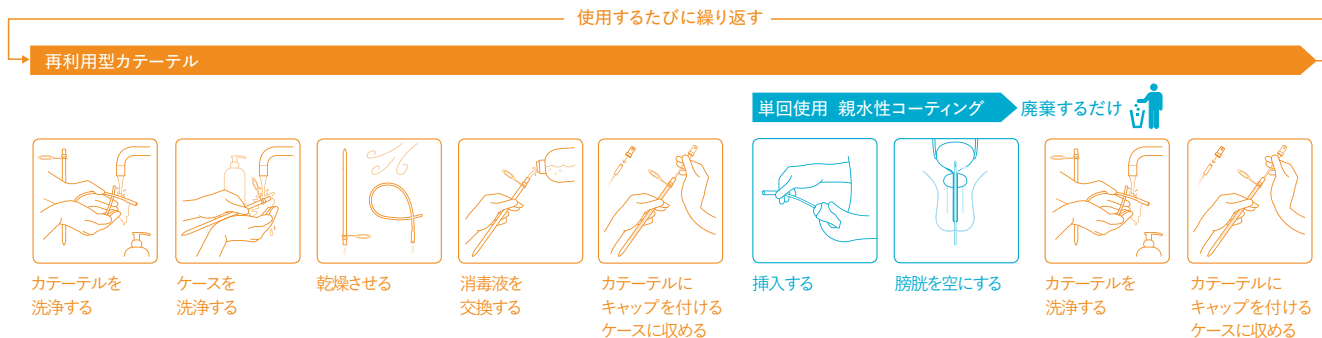

カテーテルの衛生管理は、患者に任されている

間欠導尿の遵守（コンプライアンス）は、膀胱の健康を維持するための鍵ですが、患者の半分は遵守できていないと言われています³。

間欠導尿の維持継続を考える時、コンプライアンスは重要な要素です。手技の複雑さを軽減することが、コンプライアンスの向上および治療の持続性の向上と関連していることが、確認されています⁴。

使い捨て型カテーテルを用いた間欠導尿は工程が少なく、治療への遵守率が高いことが示されています⁵。





世界初の開封後すぐに使える
親水性コーティングカテーテル



世界初の親水性コーティング
コンパクトカテーテル



世界初のフレキシブルチップ技術を
採用したカテーテル

シンプルで直感的に使えるから、ユーザーに好まれています

スピーディカテは、ユーザーの88%が非常に使いやすいと感じています。また76%のユーザーが、導尿時間が早くなったと評価しています。患者にとっては、間欠導尿を遵守しやすくなるという重要な満足感があります⁶。

生活の質を改善するようにデザインされています

スピーディカテ コンパクトを使用すると、間欠導尿に関連する生活の質が28%向上することが報告されています⁸⁷。導尿がユーザーに与える大きな物理的、心理的、感情的な影響を考慮すると⁸、これは大きな改善です⁷。

人目につかないようデザインされています

全てのスピーディカテ製品は、外観が可能な限り医療機器に見えないようにデザインされています。

臨床優位性が報告されています

スピーディカテは、多くの臨床試験で評価されています。スピーディカテは、利便性、使いやすさ、目立ちにくさ、患者の好みなどの主要なパラメーターにおいて優れた結果を示しています^{6,7,9-12}。

あらゆるニーズ、状況、および手技に対応します

間欠導尿に関して近年発表されたガイドライン^{8,13}に従うと、導尿の手技は状況と患者の能力に応じて、無菌、ノンタッチ、あるいは清潔操作のいずれかで実行される必要があります。

SpeediCath®

スピーディカテ ネラトン／チーマン

長年愛されている初代スピーディカテ：

豊富なバリエーションで、幅広いユーザーへ

スピーディカテ ネラトン／チーマンは、親水性コーティングされたカテーテルを開封後すぐに使用できるようになった初めての製品です。

スピーディカテ ネラトン／チーマンの利点

- 6 フレンチからの豊富なラインナップで、新生児から高齢者まで対応可能
- 尿道狭窄や前立腺肥大症など、挿入困難なシーンで活躍するチーマンタイプも利用可能
- リングプル機能が、手指の巧緻性が低下しているユーザーの開封操作をサポート
- パッケージ裏の粘着シールを壁などに貼り付けると、両手がフリーになり導尿時の準備や片付けが容易



SpeediCath® Compact

スピーディカテ コンパクト

最もコンパクトなカテーテル：

人目が気になる状況でも
間欠導尿が欠かせないユーザーへ

革新的で受賞歴のあるデザインは、
間欠導尿の新しい基準を打ち立てます。

スピーディカテ コンパクトの利点

男性用

- 目立たないデザイン^{9,10}
- 間欠導尿に関連した生活の質が向上⁷
- ノンタッチテクニックが可能^{8,9,11}
- 挿入中のカテーテルコントロールが向上^{9,10,11}

女性用

- 目立たない小さいデザイン（口紅サイズ）
- 挿入中の取り扱いが簡単¹²



男性用

女性用



SpeediCath® Navi

スピーディカテ ナビ


男性の尿道特有の湾曲・屈曲に沿うようにデザイン： 学童児から高齢者まで、幅広い男性ユーザーへ

スピーディカテ ナビは、世界で初めてのフレキシブルチップテクノロジーを採用しています。カテーテルが繰り返し挿入されることによる尿道への負担や摩擦に配慮し、尿道損傷の予防をサポートします。

フレキシブルチップ

ボール状で柔らかくたわむカテーテル先端が、男性の尿道特有の湾曲・屈曲に沿いながら、スムーズに膀胱まで誘導していきます。

さらに、カテーテル先端付近は、細くくびれているため全方向性に曲がりやすく、尿道への負担や摩擦が少ないのが特徴です。これにより、斜め方向からでもカテーテルを尿道に挿入しやすく、また、カテーテル先端が尿道内壁に押し付けられにくいので、尿道の中心を通過しやすくなっています。

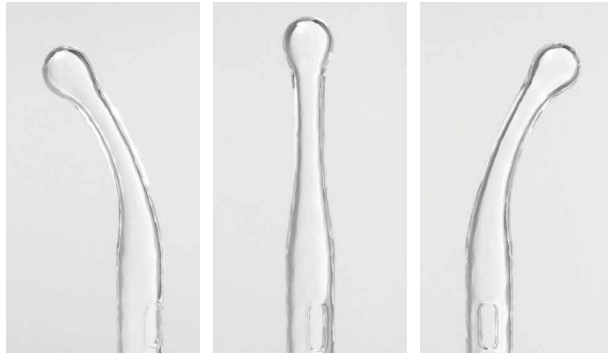


インサクション グリップ

衛生的なカテーテル挿入をサポートするデザインです。先端や本体に触れずにカテーテルを取り扱うことが可能で、容易に少しずつ挿入できます。グリップはコーティングを傷めることなく、確実にカテーテルをつかめる設計になっています。



柔軟な先端とコシのあるしなやかなカテーテルが、 膀胱まで優しくスムーズにナビゲート

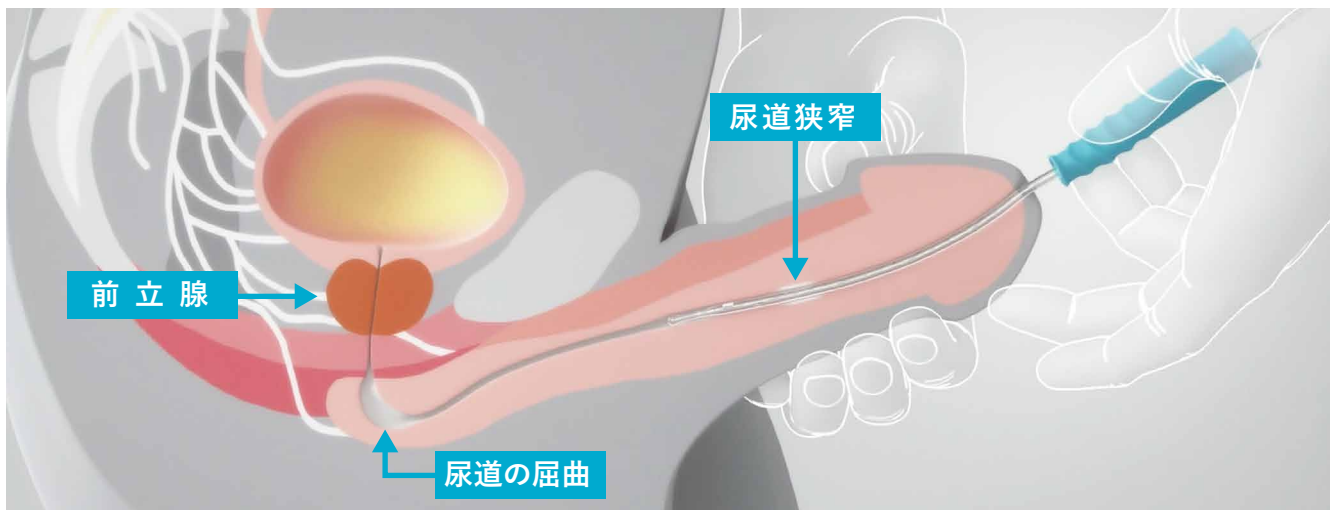

製品一覧表

スピーディカテ

製品名	製品番号	外径(CH / Fr)	EANコード	全長 (cm)	包装単位	本体価格
スピーディカテ ネラトン 20	28506	6	5708932333948	20	30本/箱	6,600円 (220円/本) 税抜き
	28508	8	5708932333962			
	28510	10	5708932333986			
	28512	12	5708932334006			
	28514	14	5708932334020			
スピーディカテ ネラトン 30	28608	8	5708932673297	30		
	28610	10	5708932668798			
	28612	12	5708932668767			
スピーディカテ ネラトン 40	28408	8	5708932333801	39		
	28410	10	5708932333825			
	28412	12	5708932333849			
	28414	14	5708932333863			
スピーディカテ チーマン 40	28490	10	5708932333887	39		
	28492	12	5708932333900			
スピーディカテ ナビ 30	29021	10	5708932136389	30		
	29022	12	5708932136440			
スピーディカテ ナビ 40	29010	10	5708932697989	39		
	29012	12	5708932698009			
	29014	14	5708932698023			
	29016	16	5708932698047			

※CH (シャリエール) はFr (フレンチ) と同規格です。

販売名：スピーディカテ

一般名：間欠泌尿器用カテーテル

JMDNコード：36125000

区分：管理医療機器 クラスII

医療機器認証番号：219ACBZX00025000

スピーディカテ コンパクト

製品名	製品番号	外径(CH / Fr)	EANコード	カテーテル有効長 (cm)	使用時の全長 (cm)	包装単位	本体価格
スピーディカテ コンパクト F 女性用	28578	8	5708932415798	7	14	30本/箱	9,000円 (300円/本) 税抜き
	28580	10	5708932415811				
	28582	12	5708932415835				
	28584	14	5708932415859				
スピーディカテ コンパクト M 男性用	28692	先端部分カテーテル 12 手元部分カテーテル 18	5708932627559	30	33	30本/箱	12,000円 (400円/本) 税抜き

※CH (シャリエール) はFr (フレンチ) と同規格です。

販売名：スピーディカテ コンパクト

一般名：間欠泌尿器用カテーテル

JMDNコード：36125000

区分：管理医療機器 クラスII

医療機器認証番号：220ACBZX00051000

References :

- Coloplast sales data, GERS, IMS, Assobiomedica, Nefemed, PCA, 2012/13
- Mazzo et al. 2016. Intermittent urethral catheterisation: the reality of the lubricants and catheters in the clinical practice of a Brazilian service. Journal of Clinical Nursing, 25, 3382-3390
- WHO, 2003 - WHO. World Health Organization. Adherence to long-term therapies 2003. Available at: http://www.who.int/chp/knowledge/publications/adherence_full_report.pdf [Accessed 17 December 2018]
- Barbosa CD, Balp MM, Kulich K, et al. A literature review to explore the link between treatment satisfaction and adherence, compliance, and persistence. Patient Prefer Adherence 2012;6:39-48.
- Krebs et al. Bladder management in individuals with chronic neurogenic lower urinary tract dysfunction Spinal Cord 2015;Nov 10. doi: 10.1038/sc.2015.196. [Epub ahead of print].
- Pascoe G et al. Br J Nurs 2001;10:325-329
- Chartier-Kastler E et al. J Urol. 2013 Sep;190(3):942-7
- Varh S et al. European Association of Urology Nurse 2013
- Chartier-Kastler E. Spinal Cord 2011, 49(7), 844-850
- Domurath B et al. Spinal Cord 2011, 49(7), 817-821
- Bagi P et al. Urol Int 2011; 86:179-184
- Biering-Sørensen F et al. Scand J Urol Nephrol 2007;41(4):341-345
- Consortium for Spinal Cord Medicine. J Spinal Cord Med 2006;29(5):527573

製造販売元

コロプラスト株式会社 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-1-30 イタリア文化会館ビル

www.coloplast.co.jp ☎ 0120-664-469

©2020-3 無断複写・転載を禁じます。

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2020-3. All rights reserved Coloplast A/S



制作年月：2020-3/99574N