

気になるニオイを消して、
スムーズに出したい人の新習慣！

デオール消臭潤滑剤

植物性成分が高い消臭効果を発揮し、
潤滑成分が排出をスムーズにすることで、
あなたの快適な毎日をサポートします。
ぜひ一度、デオール消臭潤滑剤の
消臭力・潤滑力を実感してください。

便の
臭いが消え、
トイレ後も気に
ならない。
試用者(45歳女性)
の感想

全国から寄せられた実際のコメントをご紹介します。

他の消臭・潤滑剤とはここが違う！

- 今まで使用していた他の製品より、
明らかに優れている。(70歳男性)
- やわらかい便のため、パウチの掃除に
とても苦労してます。この製品は
汚れを落としやすい。(72歳女性)
- トイレ使用の後に必ず消臭スプレーを使用
していましたが、不要になります。(69歳女性)
- 着色しているのでストーマ袋内での
広がり具合が分かりやすい。(84歳男性)

*消臭・潤滑の感じ方には個人差があります。
これらは使用者個人の感想であり、効果効能を
保証するものではありません。




使用方法

新しいストーマ袋の装着前や、排泄物を排出した後に、ストーマ袋の排出口を閉じ、ボトルの場合5-8ml（大さじ半分程度）、ミニパックの場合は袋の中身をすべてストーマ袋に注入します。ストーマ袋全体に広がるようにストーマ袋を軽くもんでなじませます。新しいストーマ袋の装着前の場合は、面板の剥離ライナーをはがす前に上から、また排泄物を排出した後は下の排出口*から注入してください。*採尿袋は上から。

新しいストーマ袋の装着前の場合

排泄物を排出した後の場合

上から

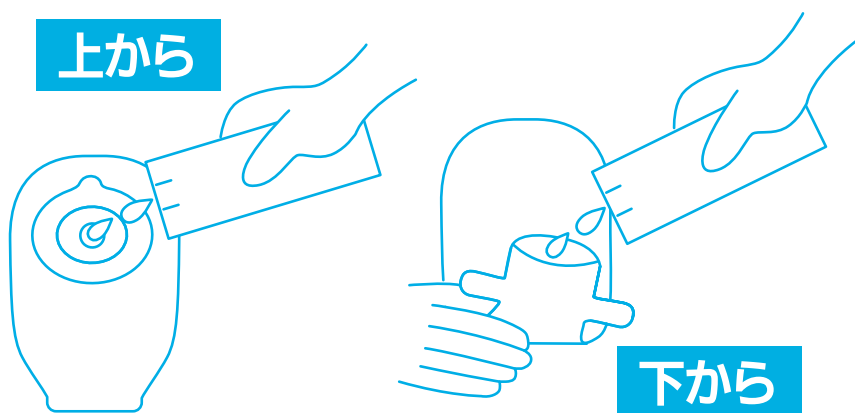

下から

使用上の注意

●使用前に説明書をよくお読みください。●他の目的に使用しないでください。●他のストーマ袋用添加剤と併用しないでください。●面板（皮膚保護剤）の粘着面や面板とストーマ袋の接合部（二品系装具）にはつかないようにしてください。●万一飲み込んだ場合は水を飲ませる等の処置をしてください。目に入った場合は、水で十分洗い流してください。いずれの場合も必要に応じて医師にご相談ください。●傷やはれもの、湿疹等の皮膚障害がある場合にはお使いにならないでください。●使用中に赤味、はれ、かゆみ、刺激等の異常があらわれた場合は水で十分洗い流し、使用を中止してください。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。●極端な高温または低温の場所や直射日光のあたる場所は避けて保管してください。

デオール消臭潤滑剤

※価格は平成23年2月現在のものです。



製品名	製品番号	規格	税込価格
デオール消臭潤滑剤 ボトル	9301	1本 (250ml)	¥3,045 (本体¥2,900)
デオール消臭潤滑剤 ミニパック	9302	30袋 (10ml×30)	¥3,990 (本体¥3,800)

成分:精製水、植物性消臭成分（柿渋エキス）、潤滑成分、フェノキシエタノール、メチルパラベン、緑3
本品は（財）日本食品分析センターの試験で優れた安全性を持つことが確認されています。



「みなさまの声がカタチになりました」

デオール消臭潤滑剤は、ユーザーの声を集めて開発した製品です。

発売元 **コロプラスト株式会社**

お客様センター ☎ 0120-66-4469 <http://www.coloplast.co.jp>

お求めは
ストーマ装具の
販売店で

〒102-0074 東京都千代田区九段南2-1-30 TEL.03-3514-4141(代表) FAX.03-3514-4188

