

アクセサリ各種



輸入販売元

コロプラスト株式会社

〒102-0074 東京都千代田区九段南2-1-30
TEL.03-3514-4141(代表) FAX.03-3514-4188

お客様センター ☎ **0120-66-4469** <http://www.coloplast.co.jp>

札幌 TEL.011-738-6660 大阪営業所 TEL.06-6377-0172
仙台営業所 TEL.022-292-6411 広島営業所 TEL.082-506-3888
東京営業所 TEL.03-5297-2633 福岡営業所 TEL.092-524-5830
名古屋営業所 TEL.052-331-6930



板状・練状・粉状皮膚保護剤

さまざまな形状の皮膚保護剤は装具の面板と同じ皮膚保護剤です。ストーマ周囲の形を平坦に整えて漏れなどを防ぐ補強の役割を果たします。

使用前：ストーマ周囲を清拭後、水分をふき取りよく乾かします。

装着後：各皮膚保護剤を使用した後はストーマ装具を通常通り装着します。

使用后：装具と一緒にはがれますが、はがしにくい場合はぬるま湯で濡らしてから取り除きます。



コロプラスト ウエハー

やらかく伸縮性が高いウエハーは、ストーマ周囲のしわやくぼみに密着して漏れを防ぎます。尿路ストーマや排泄物の水分が多い消化管ストーマにも適しています。

板状皮膚保護剤

- ・接着面と反対側の無地の保護用紙をはがします。
- ・ストーマなどのサイズに合わせてペンなどで印をつけます。(ウエハーのみ)
- ・ハサミなどでストーマより1-2mm大きめに切り取ります。(ウエハーのみ)
- ・粘着面に触れないように注意して剥離紙をはがします。
- ・切り抜いた穴をストーマなどに合わせて、少し引っ張りながら貼り、よく密着するように手で押さえます。



コロプラスト リング

コロプラストウエハーをリング状にカットしたものです。各種サイズがありますので、ストーマ周囲皮膚にそのまま貼ることができます。



コロプラストスティックペースト

コロプラストスティックペーストはアルコールを含まず皮膚刺激がありません。指で自由に形を整えることができます。清潔で携帯にも便利な包装です。

練状皮膚保護剤

- ・透明のケースから出し、半透明の保護シートをはがして必要な量を取ります。(スティックペーストのみ)
- ・ストーマの周囲や、シワ、くぼみにのせて形を整え、皮膚に密着させます。
- ・または、皮膚保護剤の開口部の縁に載せて形を整えます。



コロプラストペースト

ストーマの周囲が陥凹したり、しわやくぼみのある場合に使用して漏れを防ぎます。アルコール含量が少ないので、刺激がほとんどありません。



コロプラストパウダー

ストーマからの排泄物の水分や滲出液を吸収してゲル状になり皮膚保護剤を補助します。ストーマと面板ストーマ孔の隙間に充填することによって、排泄物が直接皮膚に接触するのを防ぎます。

粉状皮膚保護剤

- ・パウダーをストーマ周囲に散布し、余分なパウダーを軽くふき取ります。
- ・二品系装具は面板を貼付した後に、面板ストーマ孔のすき間にパウダーを貼付することもできます。その場合も余分なパウダーをふき取ってから装着します。

皮膚被膜剤・液体消臭剤

コロプラストプレップ



皮膚に塗布すると薄い透明な被膜となり、ストーマ周囲皮膚を粘着剤などの機械的刺激や排泄物の接触から保護する皮膚被膜剤です。また、装具の密着性を高めたり、装着期間を延長するためにも使用できます。

皮膚被膜剤

- ・塗布する部位を石鹸で洗い、よくすすいでから乾かし、装具を貼付する部位よりやや広めに本品を塗布し、薄い被膜ができるまで乾かした後に装具を貼付します。
- ※皮膚が荒れている場合には軽い刺激を感じる場合があります。
- ※被膜は装具とともににはがれますので、とくにはがす必要はありません。

コロプラストデオドロップ



便や尿の臭いを抑える液体消臭剤です。臭い成分を化学的に中和し、消臭します。臭いを効果的に抑えます。装具交換時など、臭いが気になる場合に使用します。携帯にも便利なコンパクトサイズです。

液体消臭剤(濃縮液)

- ・使用前に容器をよく振り、交換前の新しい袋、または排泄物を処理する前の袋に6-10滴入れ、全体に広がるように袋を軽くもみます。
- ・コップ一杯の水に約10滴を入れて薄めた液は、排泄処理後の気になる臭いや衣類、手などについた臭いの除去としても使えます。

その他アクセサリー



ハサミ SS

面板カット専用のデザインは単品系の場合も袋を傷つけることなく、ご高齢の方、手先の機能が低下している方でもカットが簡単にできます。



アシュラクランプ

開放型採便袋の排出口閉鎖具です。マジックテープ閉鎖具がついた一体型の採便袋など、使いやすい製品も取り揃えています。



アシュラベルト

アシュラ、イーヅフレックス、センシュラ製品のベルト固定用タブに取りつけて使用します。装具の貼付が安定します。長さは自由に調節できます。



アシュラウロコネクター

センシュラ、イーヅフレックス、アシュラ製品の採尿袋付属のコネクターです。コンビーン製品の蓄尿袋や、その他外部蓄尿袋との接続に使用します。



コロフィルター

採便袋に貼る活性炭入りの脱臭フィルターです。シートから一つはずし、袋の上部脇に貼ります。針などで袋に穴を開けて使用します。

※製品の使用方法詳細については製品添付の使用説明書をご参照ください。