

ペリスティーン アナルプラグ

便漏れの防止に効果的



水溶性フィルム



フィルムは直腸内で速やかに溶解



フォームが膨張して直腸内留置が可能

Peristeen® Anal Plug

日々の便失禁に伴う不安を軽減します。

用途

ペリスティーン アナルプラグは肛門に直接挿入して使用する直腸用プラグです。

特徴

- 便の漏出を防止します。
- お腹にガスがたまりません。
- 入浴時や水泳時にも使用可能です。
- 最長12時間までの連続装用が可能です。

使用動画はこちらよりご覧いただけます

引用：www.coloplastprofessional.jp



1. 準備

アナルプラグの個包装を開封し、フォームの先端にペリスティーンジェルを塗布する。



3. 留置

プラグが肛門に挿入されると、体温と水分によって水溶性フィルム（ポリビニルアルコールフィルム）が溶けてプラグが膨らむ。



2. 挿入

プラグ全体が見えなくなるまでゆっくりと肛門内に挿入する。プラグを取り除くためのガーゼのひもは体外に出しておく。



4. 抜去

ガーゼのひもをゆっくりと引っ張ってプラグを肛門から取り除く。取り除いたプラグはつまりの原因になるので、トイレに流さないこと。

付属品／ペリスティーンジェル 1本

製品番号	製品名	サイズ	挿入前直径	挿入後直径（膨張時）	包装単位	本体価格(税込)
1450	ペリスティーンアナルプラグ	S	12 mm	37 mm	20 個/箱	¥ 7,260 (¥ 363/個)
1451	ペリスティーンアナルプラグ	L	13 mm	45 mm	20 個/箱	¥ 7,260 (¥ 363/個)

 使用前に必ず、製品に付属の「添付文書」をよくお読みください。

コロプラス株式会社 〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-1-30 イタリア文化会館ビル 11F

www.coloplast.co.jp ☎0120-664-469

©2022-3 無断複写・転載を禁じます。

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. All rights reserved Coloplast A/S

医療機器承認番号：23000BZX00042000
一般的名称：直腸用プラグ
管理医療機器



制作年月：2022.3/610N99301N