



Coloplast Ostomy Product Catalogue

2021-22

コロプラス オストミー製品カタログ

Making life easier

Ostomy Care, Continence Care, Wound & Skin Care and Interventional Urology



Index

私たちのミッション——使命

個人的な健康上のニーズをお持ちの方々の
生活をより快適に

私たちのバリュー——大切にしていること

寄り添う気持ち……理解を深めるために
情熱……………違いをもたらすために
尊重と責任感…………私たち自身を導くために

私たちのビジョン——展望

耳を傾け、応えることで
グローバルスタンダードを築く

表紙のひと：エマ・大辻・ピックルスさん

難病である慢性偽性腸閉塞症(CIPO)と、16歳から25年間闘病し、2016年7月には胃亜全摘術を受け、
2019年9月にはストーマ(人工肛門)を造設されています。
現在は、医師として勤務するかたわら、日本初のオストメイトモデルとして広く活動中。NHKの特別番組
や雑誌の特集などで、その活動が取り上げられています。

コロプラストについて	2
情報サービス・在宅ケアサポート	4
車いすアスリートへの支援活動	5

製品紹介

ストーマケア	8
ボディフィット・テクノロジー	11
センシュラミオシリーズの特長	12
センシュラミオコンベックス	20
センシュラミオコンケーブ	22
センシュラミオベビー	24
センシュラミオキッズ	25
センシュラミオシリーズ製品一覧表	27
センシュラ製品の特長	35
センシュラ製品一覧表	36
アシュラ製品の特長	42
アシュラ製品一覧表	43
術直後用 瘢孔管理用/その他関連製品一覧表	49
灌注排便用製品一覧表	50
新生児/小児用製品一覧表	51

アクセサリー	52
ブラバシリーズ	54
デオールシリーズ	60
シルティシリーズ	64

コンチネンスケア	68
コンビーン コンドーム型収尿器	70
コンビーン外部蓄尿袋	74

製品番号順索引	78
五十音順索引	84

Coloplast

コロプラストについて

Listening & Responding — 私たちのビジョン —

私たちは「個人的な健康上のニーズをお持ちの方々の生活をより快適にする」ことに情熱を傾けている企業です。「お客様の声に耳を傾け、応える」という私たちの未来に向けたビジョンの実現を目指し、革新的で優れた製品、サービス、そしてソリューションをお客様にお届けすることに懸命に取り組んでいます。

代表取締役社長 ステファン・リンデ・ヤコブセン

革新的な製品と サービスをみなさまへ

コロプラストはストーマケア、コンチネンスケア、ウンドケア、そしてウロロジーケアの各領域で、製品をご使用いただいているみなさまと医療従事者の方々へ革新的な製品をお届けしています。すべての領域において、常に「お客様が真に求めている製品とサービス」、「お客様の生活の質の向上をサポートする製品とサービス」を念頭に置き、研究開発を推進してきました。革新的な皮膚保護剤の開発によって、ストーマ保有者の多様なニーズに応えたセンシュラミオシリーズ、身軽で清潔な自己導尿を可能にしたスピーディカテ、バイアテンシリーズを始めとした革新的な製品、サービスをたゆまぬパイオニア精神でお届けていきます。

ストーマケア
ストーマケア製品




コンチネンスケア
排泄管理製品



ウンドケア
創傷管理製品



ウロロジーケア
泌尿器関連製品

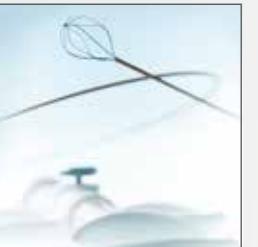

会社と製品開発の歴史

コロプラストは1957年にデンマークの訪問看護師エリーゼ・ソーレンセンの優れた着想、世界初の粘着式ストーマ装具の発明を端緒として誕生したグローバルヘルスケア企業です。生産拠点はデンマークに留まらず、ハンガリー、アメリカ、フランス、中国、コスタリカ各国の工場で、機能・品質に優れた製品を製造しています。そして現在、世界約139ヵ国で、製品開発、製造、販売を行っています。

1954 エリーゼ・ソーレンセンが世界初の使い捨てタイプ粘着式ストーマ装具を発明

1957 コロプラストA/Sを創立

1988 コロプラスト株式会社を設立

1992 世界初の渦巻き型皮膚保護剤ニュースイスロールを採用した「アシュラ」を発売

2001 世界初の閉鎖具内蔵型ストーマ袋をアシュラ・シリーズにて発売

2007 世界初の二層構造型皮膚保護剤ダブルレイヤーを採用した「センシュラ」を発売

2008 使い捨て型 親水性コーティング 自己導尿カテーテル「スピーディカテ」を発売

2013 二次治癒フォーム状創傷被覆・保護材「バイアテン」を発売

2014 世界初の伸縮性皮膚保護剤を採用した「センシュラミオ」を発売

2015 二次治癒フォーム状創傷被覆・保護材「バイアテンシリコーン+」を発売

スライド式カテーテルにより持ち運びやすさを追求した「スピーディカテ コンパクトM(男性用)」を発売
独自の技術(ボディフィット・テクノロジー)であるフレックスラインを採用した「センシュラミオコンベックス」を発売

2016 自社開発の新ポリマーを採用した「プラバプロテクティブシール」を発売

2018 世界初の凹面型面板「センシュラミオコンケーブ」を発売

男性の尿道特有の湾曲や屈曲に沿う「スピーディカテ ナビ」を発売

経肛門的洗腸療法に用いられる「ペリスティーン® アナルリリゲーションシステム」を発売

2019 新生児と小児向けの装具「センシュラミオベビー」・「センシュラミオキッズ」を発売

会社概要

商 号 コロプラスト株式会社（会社法人等番号 0100-01-103790）

英文商号 COLOPLAST KABUSHIKI KAISHA

本 社 〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-1-30 イタリア文化会館ビル 11 階

設 立 昭和 63 年 2 月 15 日

資 本 金 8,000 万円

株 主 コロプラスト A/S (デンマーク) が全株を保有

代 表 者 ステファン・リンデ・ヤコブセン

社 員 数 150 名

輸 入 元 コロプラスト A/S

製 造 国 デンマーク、ハンガリー、アメリカ、フランス、中国、コスタリカ

販 売 先 全国有力医療機器／医薬品商社・卸、その他関係団体、等

事 業 定款に定める事業

1. 人工肛門および人工膀胱、失禁および外傷の管理並びに皮膚の保護に使用する各種医療器具の製造、輸入および販売
2. その他の医療器具の製造、輸入および販売
3. 化粧品の製造、輸入および販売
4. 医薬部外品の製造、輸入および販売
5. 上記各項に関連付帯する一切の業務



エリーゼ・ソーレンセン

コロプラストについて

ストーマケア

センシュラミオ

センシュラ

その他の製品

アクセサリー

コンチネンスケア

索引

情報サービス・在宅ケアサポート

コロプラストでは、医療従事者のみなさまと製品をお使いのみなさまのために、さまざまな情報発信を行っています。

WEB サイト www.coloplast.co.jp

- ストーマケア、コンチネンスケアなどの各製品説明
- 情報誌「ゆうじん|結人」のオンライン版
- 災害対策やお食事のアドバイス
- 各種サンプルのご請求



ストーマをお持ちの方を結ぶ無料郵送情報誌

ゆうじん|結人



YouTube

コロプラストでは、在宅ケアのサポートとなるよう、「ストーマ装具の交換」を初めとした各種動画を制作しています。

また 2021 年には、Coloplast × Emma Otsuji キャンペーンをローンチ、「エマさんと学ぶ装具のいろいろ」など、わかりやすい動画を公開していく予定です。



車いすアスリートへの支援活動

コロプラストでは、製品を通じて車いすアスリートの方々を応援しています。「今日よりもアクティブな明日を」。それが私たちの願いです。活動的で快適な毎日をお過ごしいただくために、コロプラストのコンチネンスケア・スマーケア製品をぜひお役立てください。

パラリンピック2大会連続メダリスト

廣道 純 (Jun Hiromichi)

日本を代表するプロ車いすアスリート。400m、800mの日本記録保持者。2000年シドニーパラリンピック800mで銀メダル、04年アテネパラリンピック800mで銅メダル、08年北京パラリンピックで8位。12年ロンドンパラリンピックでは6位。4大会連続で入賞を果たす。現役ランナーとして2020年東京パラリンピックでのメダル獲得を目指しながら、講演活動やメディア出演を積極的にこなし、さらには一般社団法人スポーツオブハートの代表理事として障害者スポーツの魅力を伝えるなど、普及活動にも力を入れている。

「脊髄損傷者にとって移動やホテル滞在での一番の悩みはトイレです。車いす用のトイレはどこにでもあるわけではありません。でも、コンビーンのお陰で安心して遠征に出かけられます。災害時などにおける、車いす生活者をはじめ排泄に障害のある方々の苦労は計りしえません。震災の教訓を生かし、事前の備えをしっかりしておきたいものです。また医療機関にも十分な準備をお願いしたいと思います。」



車いすバスケットボール男子日本代表アシスタントコーチ
車いすバスケットボールU23男子日本代表ヘッドコーチ

京谷 和幸 (Kazuyuki Kyoya)

元Jリーガー。交通事故により脊髄損傷、車いす生活となる。リハビリの一環として始めた車いすバスケットボールでシドニー・アテネ・北京・ロンドンパラリンピックの日本代表となる。北京パラリンピックでは、日本選手団の主将も務める。現役引退後は車いすバスケットボール日本代表の指導者としてリオパラリンピックに登場し、現在は2021年の東京パラリンピックに向けて若手の育成にも力を注ぐ。また2012年からは大学でサッカー指導者としての活動もスタートするなど、障がいの枠にとらわれず、活動の幅を広げている。

「病院でコンビーンを紹介された当初は不安でした。しかし目立たずフィット感もあり、オムツのような頻回交換も不要で毎日の生活が非常に楽になりました。練習や試合、海外遠征など長時間の移動中や、大好きなお酒もコンビーンを使用しているので安心です。日々の様々な活動に励むことができる排泄管理がしっかりとできるようになり、生活のリズムが取れるようになったおかげです。排泄は人間の尊厳に関わります。排泄障害を乗り越え自己管理できるようになり、私は人間としても成長できたと思います。」



車いすバスケットボール U23 男子日本代表

川原 凜（Rin Kawahara）

生まれつき脊髄に腫瘍を持つ。中学1年生のとき、車椅子バスケットを描いた漫画に夢中になり、「自信があつてかっこいい登場人物のようになりたい」と高校進学と同時に車いすバスケを始め、地元長崎のクラブチームにも入団。ポジションはシューティングガード、スピードと正確なミドルシュートが持ち味。

2016年、高校卒業後に「東京パラリンピックに絶対出たい。もっとうまくなつて、チームの中心選手になりたい」と、まわりの反対を押し切って長崎から大学進学を目標に上京、千葉ホークスに所属した。同年から強化指定選手となり、三菱電機ワールドチャレンジカップ 2018 では優勝、インドネシア 2018 アジアパラリンピック競技大会では銀メダル受賞。所属チームの千葉ホークスも、第46回 長谷川良信記念・千葉市長杯争奪 車いすバスケットボール全国選抜大会で3位となっている。



2020 パラカヌー海外派遣最終選考会 KL2、VL2 優勝

加藤 隆典（Takanori Kato）

スノーボード中の事故で脊髄を損傷し、両下肢全廢。クローン病を患っていたこともありストーマもその時に造設。社会復帰後も仕事の傍らサーフィンやチェアスキーなど、アウトドアスポーツを趣味としていたところ、2021年オリンピック・パラリンピックの日本開催が決まり、競技者として挑戦することに。自分に合う競技を探すべく日本パラリンピック委員会選手発掘事業に参加、日本障害者カヌー協会の会長からスカウトされて 2016 年 12 月より競技を開始。直近の試合結果は、2020 パラカヌー海外派遣最終選考会で KL2、VL2 の 2 種目で優勝。

カヌーを選んだ理由は、「他者ではなく自分自身と自然との戦いであること、健常者と同じ目線で楽しめること」。TAKA のチャレンジを、コロプラストでは製品提供と共に、オストメイトのための情報誌「ゆうじん|結人」やウェブサイト、SNS で応援しています。



パラリンピック 4大会連続銀メダリスト

森井 大輝（Taiki Morii）

高校 2 年生のときに交通事故で脊髄を損傷し、1998 年の長野パラリンピックを病室で見て、チェアスキーを始める。2006 年のトリノパラリンピックでは男子座位大回転で銀メダルを受賞。以降、企業に所属しながら 4 大会連続で銀メダルを獲得している。自身だけでなく、常に選手仲間に有益な情報を模索しており、COVID-19 のさなかには、何かあった場合トレーニングの場を提供したいと、自身および後進育成のため自宅にジムを造設した。

「競技の特性上、1 年のうち半年近く海外で生活を送るため、長時間の移動や慣れない土地での排便コントロールはかなりネックになっていました。このたび、医師の勧めで医師の指導の下、経肛門的洗腸療法を実施することで、安心して長時間移動することができました。使用感として一番感じるのは、すっきり出せること。失敗も少なくなった。競技の面においては、洗腸するとお腹の中が空になるので腹圧をかけやすくなつた。排便を気にせずに、腹圧を強くかけられることで、競技パフォーマンスが上がっている。洗腸は今では競技活動になくてはならない管理方法です。」



Ostomy Care

ストーマケア




これまでも、そして、これからも…

ストーマ保有者の最大の課題である“漏れ”に対して、
これからもコロプラストは真剣に取り組んでいきます。

弊社の調査では、ストーマ保有者の 60%^{*1}の方が、退院後に継続的な“漏れ”を経験しています。また、コンベックスを使用された 80%^{*2}の方も、“漏れ”を経験しています。この数字から、ストーマ保有者は“漏れ”に対して、日々、不安をかかえて生活を送っていると言えます。コロプラストは、ストーマ保有者が抱える最大の課題である“漏れ”に対して、今後も革新的な製品を継続的に開発し、ストーマ保有者が望まれる生活をサポートできる企業であり続けたいと考えています。

多くのストーマ保有者は、“漏れ”に対する不安を抱えて日々の生活を送っています。

ストーマ保有者の“漏れ”に関する現状

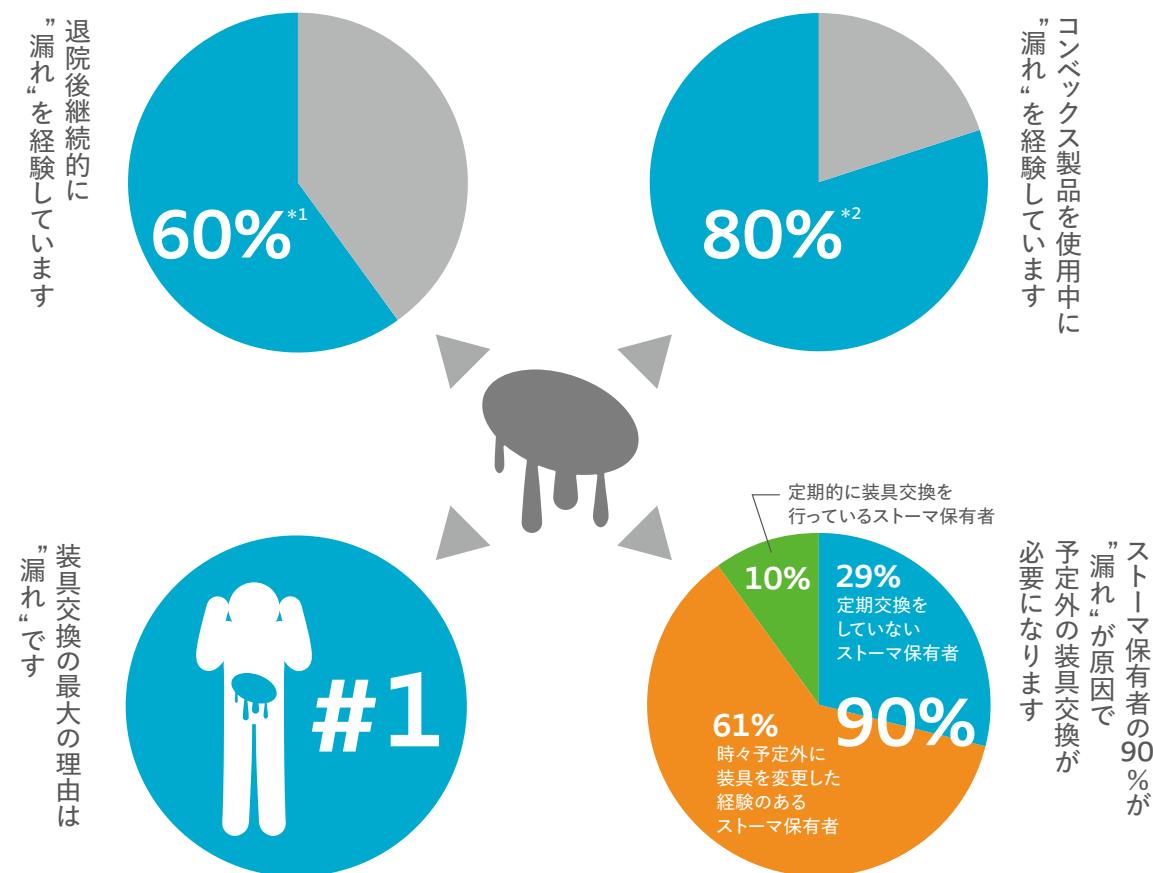

*1 IMS 研究調査 *2 「オストミー・ライフ・スタディ 2014」コロプラスト

なぜなら、腹壁は個別性が高く、
それに抱えている課題が異なるからです。
異なる腹壁が抱える課題に対応するストーマ装具が必要です。



ストーマ保有者と世界の医療従事者の協力を得て、
コロプラスは腹壁を3つのタイプに分類しました。

ストーマ周囲の体形的特徴(ボディプロファイル)

ストーマ周囲の形状は人によって異なります。ストーマ周囲の体形的特徴を評価するため、ボディプロファイル・ターミノロジーは648種類の異なる体形を考慮し、「平らである」、「へこんでいる」、「ふくらんでいる」の3つのカテゴリーに分類しています。



平らである



へこんでいる



ふくらんでいる

ストーマ周囲が平坦。皮膚表面にしわ等があって、でこぼこしている場合も含みます。

ストーマ周囲が腹壁よりもへこんでいる。皮膚表面にしわ等があって、でこぼこしている場合も含みます。

ストーマ周囲が腹壁よりも隆起して突出。

目的

- 医療従事者やストーマ保有者がストーマ周囲の事を簡単に伝えられる
- コミュニケーションを円滑にする
- ケア、処置及びトレーニングをシステム化・標準化する
- データの収集および文献化することに役立つ

個別性の高い腹壁に対して
しっかりと“密着”し、“漏れ”を防ぐ技術、
それがボディフィット・テクノロジーです。



BodyFit
Technology®

“漏れ”を防ぐ革新的な技術

我々コロプラスは、体形には個別性があることを理解しています。個別性のあるすべての腹壁に対して、しっかりと“密着”し、“漏れ”を防ぐ技術をボディフィット・テクノロジーと呼んでいます。その技術に基づいて開発された一例が「Mio 伸縮性皮膚保護剤」と「フレックスライン」を採用したコンベックスシェルです。



Mio 伸縮性皮膚保護剤

ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発されたMio 伸縮性皮膚保護剤は、初期粘着力、水分吸収力、pH緩衝能などのハイドロコロイドの基本性能の良さに加えて、世界初の「伸縮性」という機能を加えた革新的な皮膚保護剤です。




フレックスライン

センシュラミオコンベックスに採用されている「フレックスライン」もボディフィットテクノロジーのコンセプトに基づいて開発されました。今までの“点”で押えていた一般的な凸面型面板とは異なり、“面”で腹壁全体に圧をかけて押さえます。

ボディフィット・テクノロジーに基づいた

センシュラ ミオ シリーズ

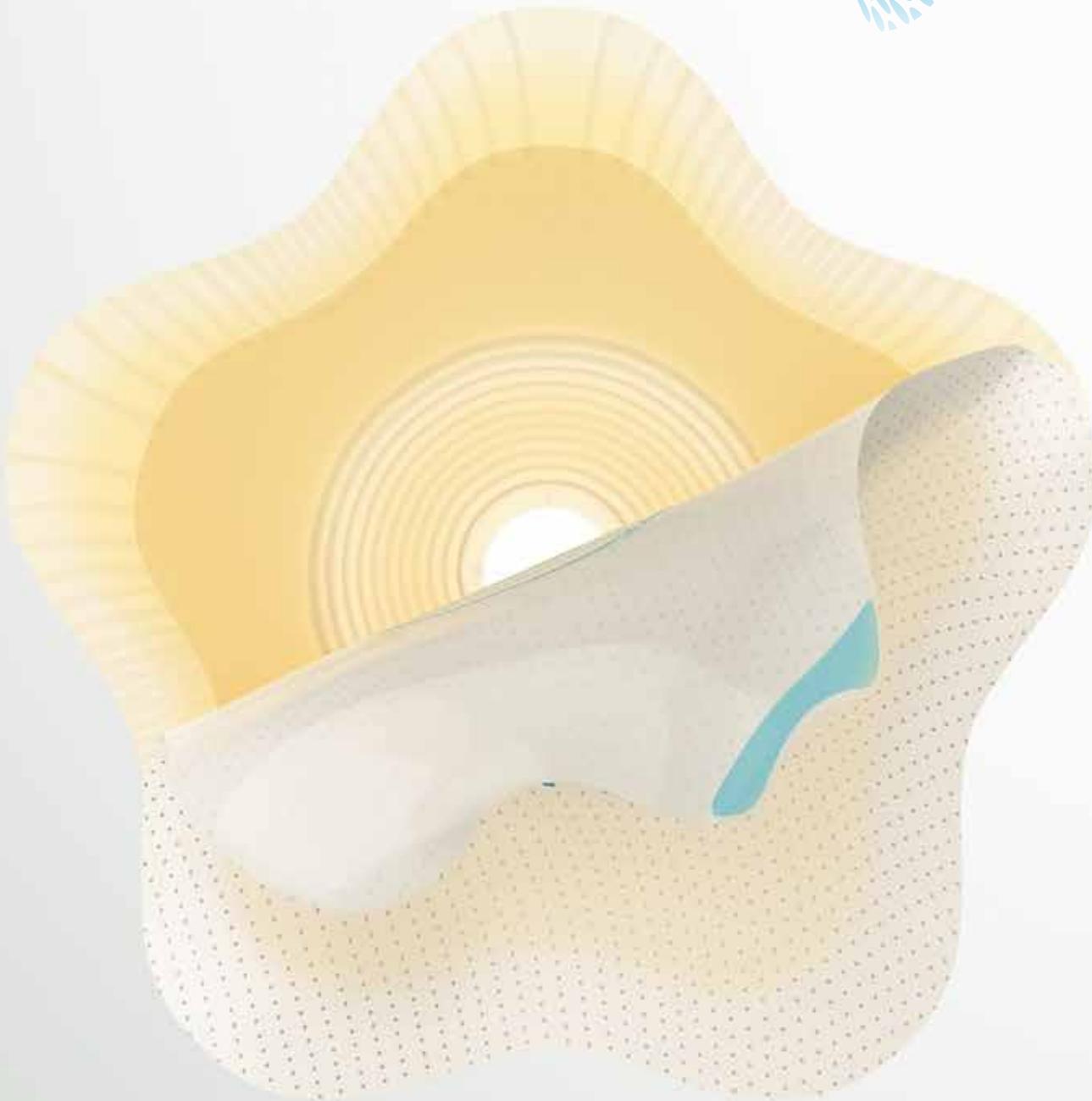

“ふくらんでいる腹壁”に最適なセンシュラ ミオ コンケーブを追加したこと、
より幅広い解決策の提供が可能になりました。

センシュラ ミオ シリーズは
豊富な製品ラインナップをご用意しています。
術直後からご選択いただくことで
柔軟な装具選択が可能です。

SenSura® Mio



1

単品系装具
二品系装具

2

コロストミー¹
イレオストミー²
ウロストミー³

3

平らである腹壁
へこんでいる腹壁
ふくらんでいる腹壁



- 平らである腹壁
- へこんでいる腹壁
- ふくらんでいる腹壁

	平らである腹壁	へこんでいる腹壁	ふくらんでいる腹壁
コロストミー	単品系 — P27.28 二品系 — P31.32.33	単品系 — P27 二品系 — P31.32.33	単品系 — P29 二品系 — P31.32
イレオストミー	単品系 — P27.28 二品系 — P31.32.33	単品系 — P27.28 二品系 — P31.32.33	単品系 — P29 二品系 — P31.32
ウロストミー	単品系 — P30 二品系 — P31.32.33	単品系 — P30 二品系 — P31.32.33	単品系 — P30 二品系 — P31.32

センシュラ ミオ シリーズの特長

Mio 伸縮性皮膚保護剤

ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発された Mio 伸縮性皮膚保護剤は、初期粘着力、水分吸収力、pH 緩衝能などのハイドロコロイドの基本性能の良さに加えて、世界初の「伸縮性」という機能を加えた革新的な皮膚保護剤です。



伸縮性トップフィルム

伸縮性のある皮膚保護剤が身体の動きに追従します。

外側の層

安定した装具の密着性と優れた追従性を確保します。

親水性ポリマー

カルボキシメチルセルロース
ヒドロキシエチルセルロース
ゼラチン

疎水性ポリマー

ポリイソブチレン
スチレン・イソブレン・スチレン
ブチルゴム
水素化炭化水素樹脂
エチレン・酢酸ビニル・コポリマー（閉鎖型のみ）

内側の層

皮膚の保護と優れた密着性により、
(排泄物の接触を避け)

皮膚の pH を維持します。


親水性ポリマー

カルボキシメチルセルロース
ヒドロキシエチルセルロース
ゼラチン
ベクチン

疎水性ポリマー

ポリイソブチレン
スチレン・イソブレン・スチレン
ブチルゴム
水素化炭化水素樹脂
エチレン・酢酸ビニル・コポリマー（閉鎖型のみ）


**皮膚にしっかり密着しながら、剥がしやすく、
ストーマ保有者に安心感を与えます。**

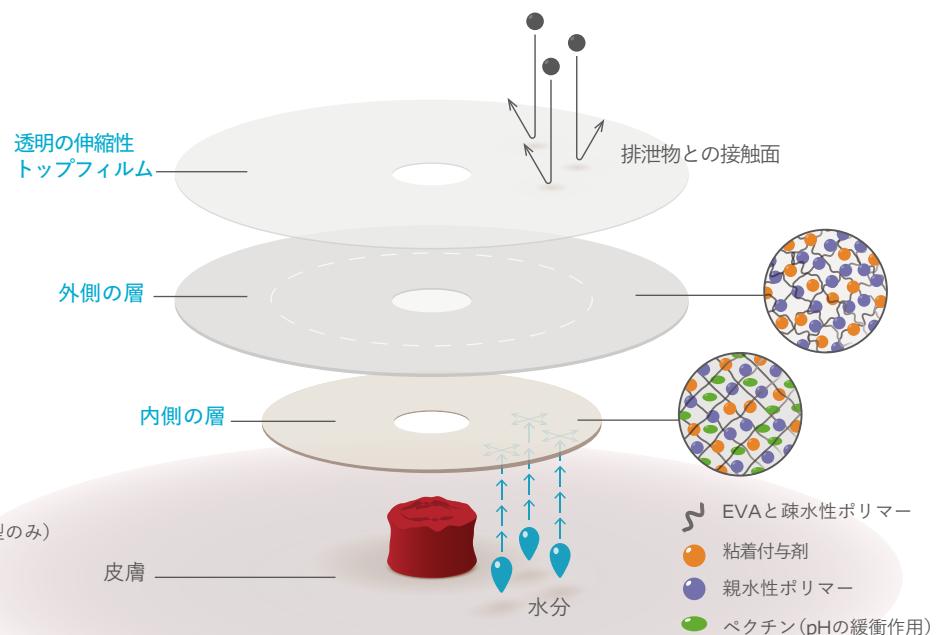

Mio 伸縮性皮膚保護剤

CPGHbs 系、CPGHbse 系（閉鎖型のみ）

※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状や
ストーマ周囲皮膚の状況により変わります。
皮膚保護剤の分類は JSSCR 分類に準じます。

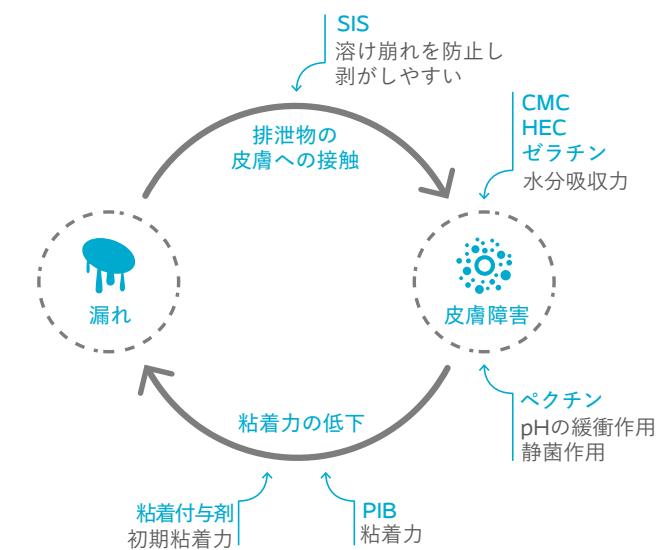

伸縮性皮膚保護剤

高い伸縮性は、
身体のさまざまな動きに
追従します。


センシュラ ミオ シリーズの特長

消化管用ストーマ袋

一体成型ワイドイージクローズ排出口


ストーマ保有者は、排泄物を出す動作を日常的に繰り返し実施します。その度に、排出後の臭いの漏れを気にして拭き取り操作に時間をかけることは QOL 低下の大きな要因となります。

「一体成型ワイドイージクローズ排出口」は、排出操作が簡便で衛生的に実施でき、ストーマ保有者が覚えやすく医療従事者の皆様が指導しやすい排出口です。

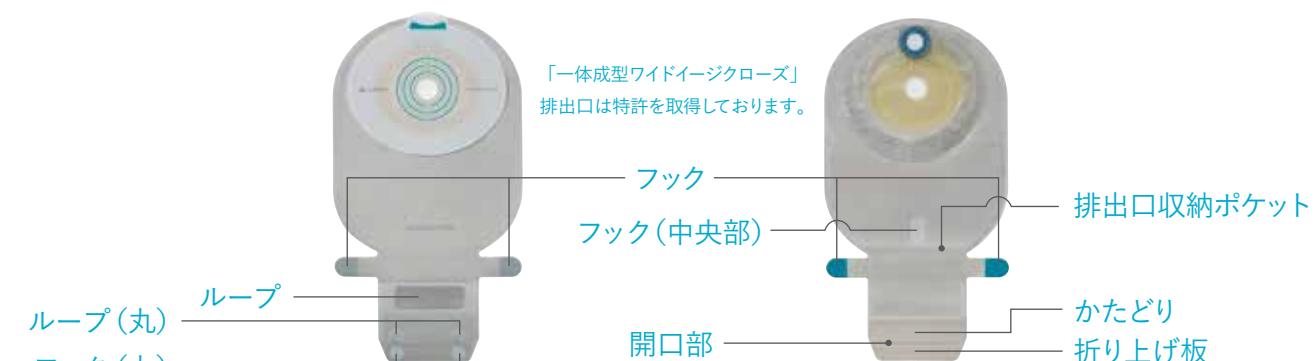

フック／ループ…一般的な面ファスナーは、フック状に起毛された側とループ状に密集して起毛された側とを押すだけでも貼り付くようになっており、それらを「一体成型ワイドイージクローズ」排出口の名称に用いております。

排出操作が短時間で簡単に実施できる理由

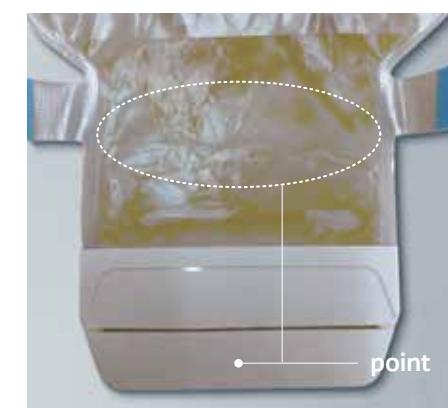

コロプラストの一体成型ワイドイージクローズ排出口の特長は、排出口下部の折り上げ板にあります。この折り上げ板があることにより、閉鎖具を巻き上げた際に排泄物が滲み出でストーマ袋の外側を汚すことが無いため、「ストーマ袋の中を拭き取る」手間を省くことができます。そのため、非常に衛生的で排出時間が短縮できます。上の写真は、模擬便を排出し、排出口を拭き取り、巻き上げを戻した状態の写真ですが、排出口付近の汚れがないことが確認できます。（写真「point」参照）このことは、排泄物の滲み出しで発生する、臭いを限りなく減らせることを示しており、安心してお使いいただける排出口としてご評価いただいております。

便排出時と排出口閉鎖のポイント



ここにも注目！「ハイドアウェイ機能と二段階ハイドアウェイ機能」
(二段階ハイドアウェイ機能は不透明タイプのみ)



センシュラ ミオ シリーズの特長 消化管用ストーマ袋

大型キャップ式排出口

大型キャップ式排出口のキャップのつまみは厚く、つまみやすいくびれ設計。排出操作時に便に触れず衛生的です。またやわらかく、ミルキングが容易で、食物残渣が多い場合でも簡便に排出操作を行うことができます。



センシュラミオ 1 イレオ（平面 / 凸面）：キャップ式排出口 外径：16mm / 内径：9mm

センシュラミオ 2 イレオ：キャップ式排出口 外径：16mm / 内径：9mm

センシュラミオ 2 フレックス イレオ：キャップ式排出口 外径：16mm / 内径：13mm

専用の排液バッグ（外径接続）と接続可能




外径接続により、イレオストミー用ストーマ袋の排出口の内径を狭めることなく、蛇腹構造のチューブとともに目詰まりのないドレナージが可能となります。また、2000mlの大容量で、ストーマ保有者の安眠、医療従事者の看護労力の軽減につながります。チューブは150cmあり、25cm刻みでの長さの調節が可能で、ベッドサイドに固定できるハンガー（1個）が同梱されております。

センシュラ ミオ シリーズの特長 大型円形フィルター

大きな円形のプレフィルターが、活性炭とメンブレンを排泄物から守ります。フィルターの目詰まりを大幅に減少させることで、バルーニングを長時間防ぎます。弊社の試験結果では、従来品と比較してバルーニングが 61%^{*1} 軽減しました。世界的にもバルーニングは依然として大きな問題となっており、日本においても 51%^{*2} のストーマ保有者は、バルーニングが原因で夜中に目覚めることが判明しました。多くのストーマ保有者から、安心して眠れるようになったとのお声をいただいております。

*1 2010年 コロプラスト調査

*2 2014年 Ineke Classens - Spee 他「オストミー・ライフ・スタディ 2014」WCET2014(日本のストーマ保有者191名を含む、計11カ国4,138名のストーマ保有者を対象に実施)

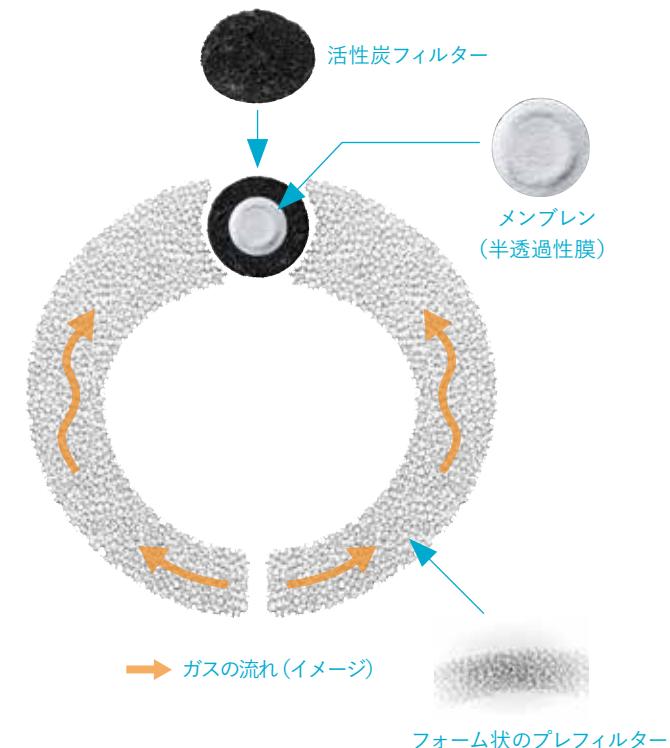

センシュラ ミオ シリーズの特長 ニュートラルグレーのテキスタイル

センシュラミオのために開発された滑らかな肌触りが特長の「ニュートラルグレー」のテキスタイルは、薄い色の衣服を着ても目立ちません。ストーマ袋両面にテキスタイルを用いた不透明タイプは、排泄物が外から見えないようにしたいという多くのニーズを満たしながらも、衣服からはストーマ袋が目立ちません。また、撥水性、通気性に優れており、多くのストーマ保有者から、入浴後も快適に過ごせるとのお声をいただいております。



白い衣服でも目立ちません

センシュラ ミオ シリーズの特長 尿路用ストーマ袋

簡単で確実な排出口

開閉操作がより簡単で確実な

5重リング式ストッパー付キャップです。



仕切構造

均等に膨らむ仕切構造でバランスのよい装着感を得られます。急な動きでも尿が片側に寄らず採尿袋内の音を軽減します。



逆流防止弁

採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。




外部蓄尿袋との接続

コンビーン セキュア レッグバッグやコロプラス ウロナイトバッグなど各種外部蓄尿袋への接続が可能です。(P.75~77参照)

キャップ排出口の使い方

- 1 排出口を上方向に向け、排出口の基部を押さえながらキャップをはずします。(図1)
- 2 排出口をトイレの中に向け、押えていた指を離し、尿を排出します。(図2)
- 3 排出が終わったらトイレットペーパーなどで排出口周りの尿を拭き取り、キャップを閉じます。

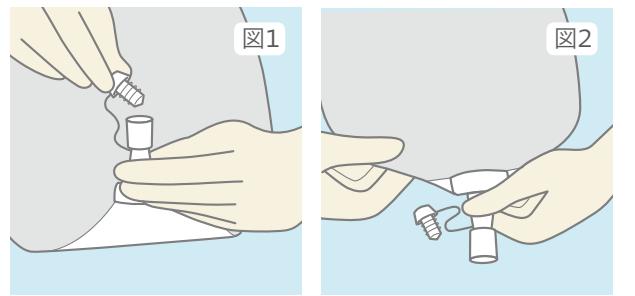

センシュラ ミオ シリーズの特長 二品系


新しいクリック・カップリング(ロック式)




クリック・カップリングは波型のロックリングが特徴です。リングがバネの役割を果たすことで、ロックを容易にし、カチッという装着音でしっかりと装着されているかが確認でき、安心感をもたらします。フランジはかみ合わせに力がいりませんので、腹圧がかからず操作も簡単です。また、センシュラミオ専用ベルト、4点止め安心ベルトと組み合わせて使用することができます。

クリック・カップリング(ロック式)の嵌合方法

装着方法

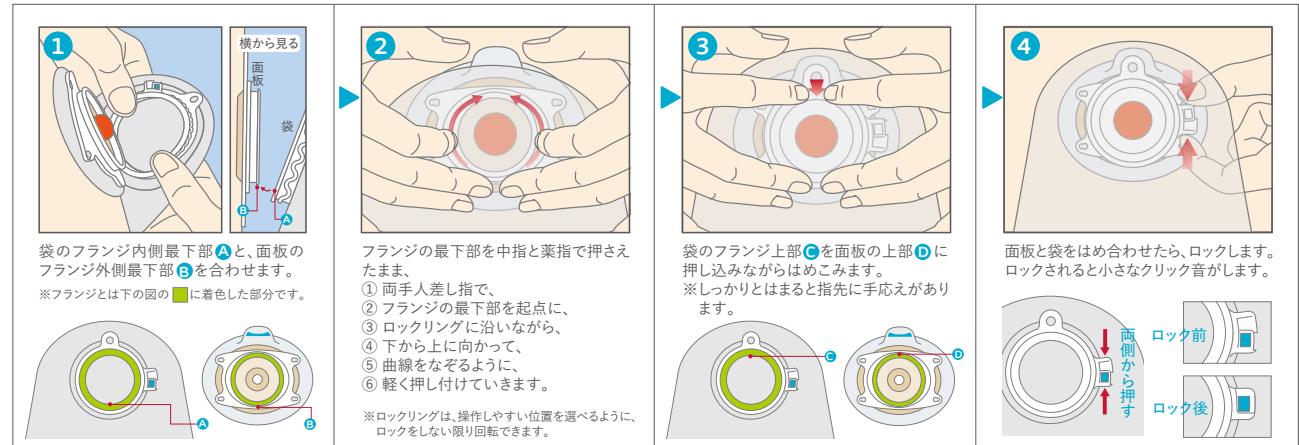

外し方

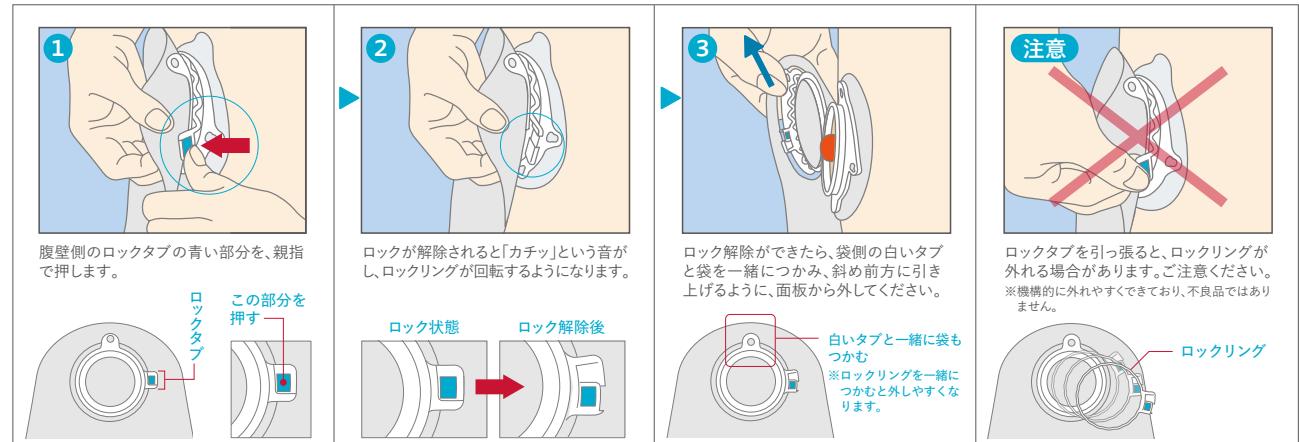



単品系装具／二品系装具

センシュラ ミオ コンベックス

センシュラ ミオ コンベックスは、
ストーマ保有者に“安心感”と“快適性”を提供します。



3種類のコンベックスが、異なる「押さえる力」でさまざまなニーズにお応えします。

	ソフト	ライト	ディープ
コンベックスの高さ	6mm	6mm	9mm
適用	<ul style="list-style-type: none"> ● ストーマに高さがある ● 非常に浅いしわやくぼみがある ● 軽く押さえたいとき 	<ul style="list-style-type: none"> ● ストーマに高さがない ● 浅いしわやくぼみがある 	<ul style="list-style-type: none"> ● ストーマに高さがない ● 深いしわやくぼみがある
シェルの素材	HDPE (高密度共重合ポリエチレン)	LLDPE (線状低密度共重合ポリエチレン)	LLDPE (線状低密度共重合ポリエチレン)

「押さえる力」と「柔らかさ」――

相反する機能を兼ね備えた革新的なストーマ装具、
それがセンシュラ ミオ コンベックスです。

コンベックスに求められる機能とは?



それはしっかりとストーマを突出させる「押さえる力」です。
しかし、「押さえる」だけでは、完全に“漏れ”を防ぐことは出来ません。
身体の動きにしっかりと追従が出来る「柔らかさ」も必要です。
コロプラスは4年以上の歳月を費やし、この相反する機能を兼ね備えた
革新的なストーマ装具 センシュラ ミオ コンベックスを開発しました。

特筆すべき秘密があるフレックスライン



ランニング用のスニーカーから発想を得ました。



フレックスライン上にある溝の素材は、その他の箇所よりも少し薄くなっているため、屈曲時でも安定性を損なう事なく、身体の動きに合わせてなだらかな曲線を描きながら追従します。

腹壁になだらかに密着し、折れ曲がる箇所を導くシェル構造

フレックスラインのパターンによって“点”ではなく、“面”で腹壁に圧力を与えることが可能になりました。3時9時方向のみではなく、多面的に折れ曲がります。



従来品との差異は明らかです

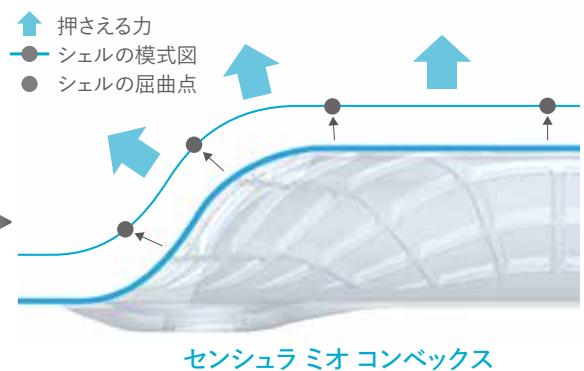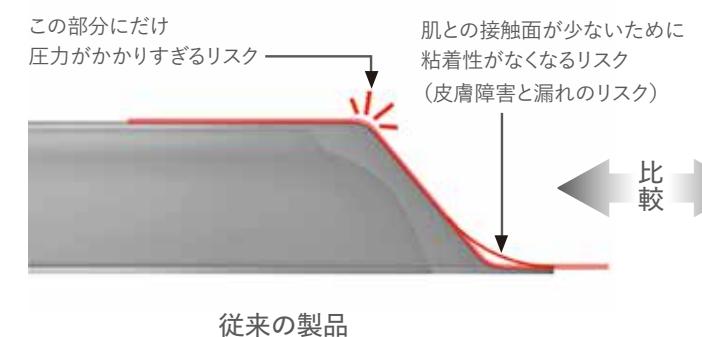



単品系装具／二品系装具

センシュラ ミオ コンケーブ

「ふくらんでいる腹壁」をお持ちの方の課題が
見過ごされていませんか？

「ふくらんでいる」ストーマ保有者について、データが示すこと

39%

「高確率、または、
極めて高確率」で
漏れを心配している

44%

ストーマ装具が
衣服から目立つ
経験をしている

84%

ストーマに
高さがある

64%

60歳を超えている

57%

男性である

74%

肥満、または
高度肥満

63%

ふくらんでいる
腹壁により
ストーマ装具が
目立つ

56%

単品系装具を
使用している

今まで、3種類の腹壁に対して、2種類の装具しか存在していませんでした。



平らな腹壁に対応
平面装具
SenSura® Mio



へこんでいる腹壁に対応
凸面装具
SenSura® Mio Convex



ふくらんでいる腹壁に対応

「ふくらんでいる腹壁」への新しい提案 凹面装具「センシュラ ミオ コンケーブ」

センシュラ ミオ コンケーブは、コロプラスの長年の研究と実績に基づき、「ふくらんでいる腹壁」をお持ちの方のために開発された、革新的な装具です。「ふくらんでいる腹壁」の方はさまざまな課題を抱えており、QOL向上のために新たな取り組みが必要です。コロプラスは、面板の構造にさまざまな工夫を図り、「ふくらんでいる腹壁」により密着し、追従するような解決策を提案します。

課題
#1 従来の平面型面板では、浮き上がりが心配です。



平面型面板の辺縁部に切れ込みなどを施さないと、ふくらんでいる腹壁に密着させることが困難です。

課題
#2 体位が変化すると、ストーマ周囲の腹壁やストーマの形状も変化します。



ストーマをお持ちの60%の方が、体位が変わる際に、ストーマの形状も変化すると回答しています。*

課題
#3 ふくらんでいる腹壁は動きやすいため、面板を腹壁にしっかりと密着させることが困難です。



76%の方
体を動かすと（ランニングや体操など）、お腹が上下に揺れます。*

解決策
#1



星型にプレシェイプされた面板

立体的な面板は、皮膚保護剤の辺縁部にしわや隙間を作らず、ヘルニアやふくらんでいる腹壁にしっかりと密着します。

解決策
#2



スタビリティリング（安定リング）

中心部にある安定リングが、面板の中心部をより安定させ、貼付時に押さえる必要のある箇所をより明確にします。これにより、ストーマ近接部に密着します。

解決策
#3



伸縮性皮膚保護剤とフィットゾーン

Mio伸縮性皮膚保護剤が、体の動きにしっかりと追従します。一般的な皮膚保護剤と比較して、約2倍の伸縮性*があります。*社内試験データ 2016 (VV-0052688)



センシュラ ミオ 1
コンケーブ



センシュラ ミオ 1
コンケーブ ウロ



センシュラ ミオ 2
コンケーブ プレート





二品系装具

センシュラミオベビー

新生児*向けのストーマ装具としては初めて、注入(リフィーディング)をサポートする装具です。



Mio Baby 伸縮性皮膚保護剤

ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発された Mio Baby 伸縮性皮膚保護剤は、初期粘着力、吸水性、pH緩衝能などハイドロコロイドの良さに、高い「伸縮性」を加えて、脆弱な赤ちゃんの皮膚に優しい皮膚保護剤です。



ソフトディスク

二品系の利便性と単品系の柔軟性を両立した粘着式の嵌合方式です。非常にやわらかいソフトディスクは、軽く貼るだけ、腹圧をかけずにしっかりと嵌合が出来ます。




注入用ホール(リフィーディングウインドー)

新生児用のストーマ装具としては初めて、注入用のホールと注入用ホールカバーを採用しました。従来よりスムーズに注入(リフィーディング)を行う事が可能となります。



柔らかい排出口

柔らかい排出口は袋の中の排泄物を簡単に取り出すことができます。また、非常に柔らかいため、デリケートな子どもの体に接触しても、皮膚への影響を最小限に留めます。

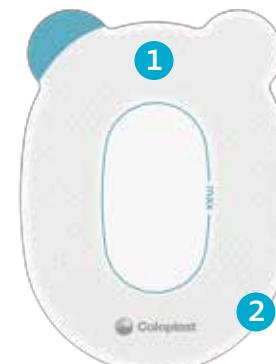

単品系装具 / 二品系装具

センシュラミオキッズ

星型の面板が小児の腹壁の動きにもしっかりと追従し、漏れやめぐり上がりを防ぎます。



星型の皮膚保護剤

ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発された Mio 伸縮性皮膚保護剤は、初期粘着力、水分吸収力、pH緩衝能などのハイドロコロイドの基本性能の良さに加えて、世界初の「伸縮性」という機能を加えた皮膚保護剤です。また、星型の構造が皮膚保護剤に柔軟性を与え、しっかりと腹壁に密着します。



フィットゾーン

センシュラミオ キッズには2つのフィットゾーンを採用しています。辺縁部のフィットゾーンが、腹壁の動きにしっかりと追従し、中心部のフィットゾーンが、ストーマ近接部に柔軟性を与え、ストーマの動きにも追従し、装具の密着を高めます。




大型フィルター

大型のプレフィルターが、活性炭とメンブレンを排泄物から守ります。フィルターの目詰まりを大幅に減少させることでパルーニングを長時間防ぎます。



ニュートラルグレーのテキスタイル


センシュラミオのために開発された滑らかな肌触りが特長の「ニュートラルグレー」のテキスタイルは、薄い色の衣服を着ても目立ちません。また、撥水性、通気性にも優れています。

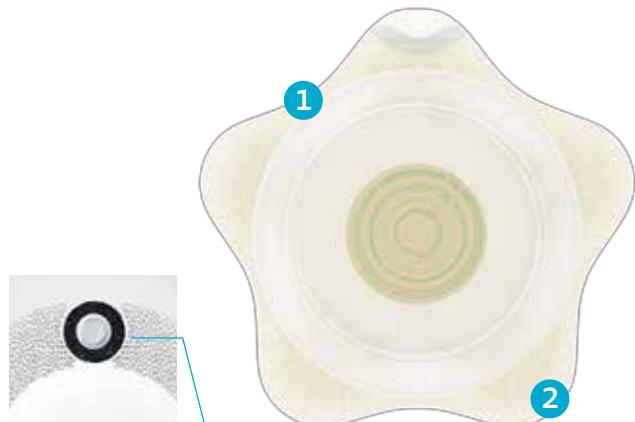

*センシュラミオベビーは在胎30週以上の早産児からご使用いただけます。

また、時間の経過と共に ストーマ保有者を取り巻く環境は変化します。

退院後には食生活や活動量、そして、体形や便性など、取り巻く環境は一変します。コロプラスは豊富な製品ラインナップで、ストーマ保有者の幅広いニーズに対応いたします。

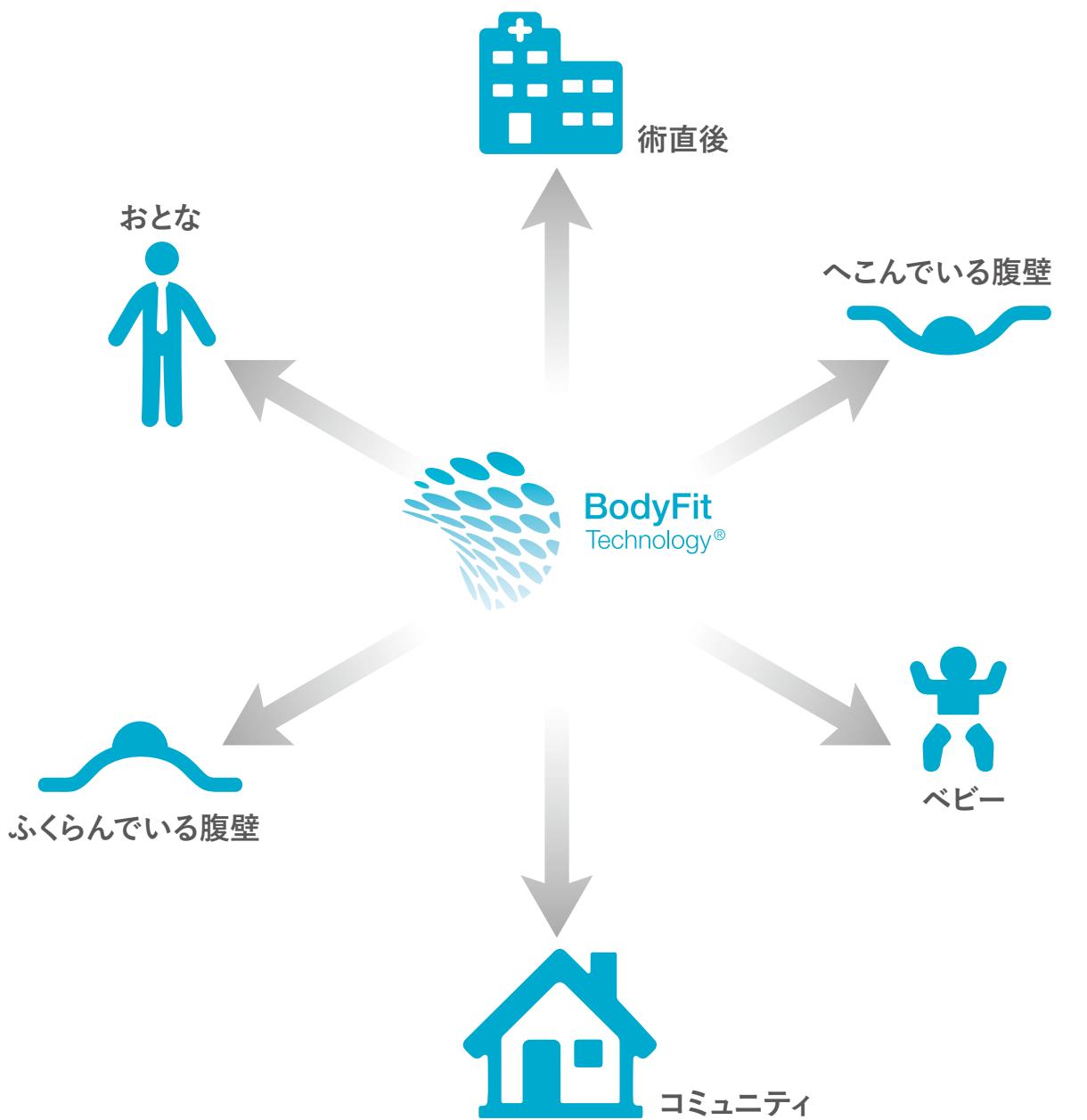

BodyFit Technology® for everyone

ボディフィット・テクノロジー
あらゆる腹壁のために

消化管ストーマ用 単品系装具 センシュラ ミオ1

● 採便袋 開放型 平面／一体成型ワイドイージクローズ

皮膚保護剤:Mio伸縮性皮膚保護剤 貼付期間の目安:1~4日

製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ ミオ1 透明	10481	フリーカット	10-55 mm	105×125 mm	10枚/箱	¥6,100 (¥610/枚)
	10482	プレカット	25 mm	95×115 mm		
	10483	プレカット	30 mm	95×115 mm		
	10484	プレカット	35 mm	95×115 mm		
	10487	プレカット	40 mm	95×115 mm		
	10485	プレカット	45 mm	105×125 mm		
	10486	プレカット	50 mm	105×125 mm		
センシュラ ミオ1 不透明	10471	フリーカット	10-55 mm	105×125 mm	10枚/箱	¥6,100 (¥610/枚)
	10472	プレカット	25 mm	95×115 mm		
	10474	プレカット	30 mm	95×115 mm		
	10476	プレカット	35 mm	95×115 mm		
	10479	プレカット	40 mm	95×115 mm		

【採便袋】 大きさ:280×137 mm 最大容量:ISO規格470ml 排出口幅:80 mm 大型円形フィルター 7層防臭フィルム

● 採便袋 開放型 凸面 ソフト[高さ6mm]/一体成型ワイドイージクローズ

皮膚保護剤:Mio伸縮性皮膚保護剤 貼付期間の目安:1~4日

製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ ミオ1 ソフト 透明	16715	フリーカット	15-33mm	100×120mm	10枚/箱	¥8,500 (¥850/枚)
	16716	フリーカット	10-50mm	105×125mm		
センシュラ ミオ1 ソフト 不透明	16705	フリーカット	15-33mm	100×120mm	10枚/箱	¥8,500 (¥850/枚)
	16706	フリーカット	10-50mm	105×125mm		

【採便袋】 大きさ:280×137 mm 最大容量:ISO規格490ml 排出口幅:80 mm 大型円形フィルター 7層防臭フィルム ベルト固定用タブ付

● 採便袋 開放型 凸面 ライト[高さ6mm]/一体成型ワイドイージクローズ

皮膚保護剤:Mio伸縮性皮膚保護剤 貼付期間の目安:1~4日

製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ ミオ1 ライト 透明	16738	フリーカット	15-33mm	100×120mm	10枚/箱	¥9,700 (¥970/枚)
	16739	フリーカット	10-43mm	105×125mm		
	16741	プレカット	25mm	100×120mm		
	16742	プレカット	28mm	100×120mm		
	16743	プレカット	31mm	105×125mm		
	16744	プレカット	35mm	105×125mm		
	16745	プレカット	38mm	105×125mm		
センシュラ ミオ1 ライト 不透明	16726	フリーカット	15-33mm	100×120mm	10枚/箱	¥9,700 (¥970/枚)
	16731	プレカット	25mm	100×120mm		
	16732	プレカット	28mm	100×120mm		
	16727	プレカット	31mm	105×125mm		
	16734	プレカット	35mm	105×125mm		
	16735	プレカット	38mm	105×125mm		

【採便袋】 大きさ:280×137 mm 最大容量:ISO規格490ml 排出口幅:80 mm 大型円形フィルター 7層防臭フィルム ベルト固定用タブ付

● 採便袋 開放型 凸面 ディープ[高さ9mm]/一体成型ワイドイージクローズ

皮膚保護剤:Mio伸縮性皮膚保護剤 貼付期間の目安:1~4日

製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ ミオ1 ディープ 透明	16766	フリーカット	15-33mm	100×120mm	10枚/箱	¥9,900 (¥990/枚)
	16767	フリーカット	10-43mm	105×125mm		
	16771	プレカット	25mm	100×120mm		
	16772	プレカット	28mm	100×120mm		
	16773	プレカット	31mm	105×125mm		
	16774	プレカット	35mm	105×125mm		
	16775	プレカット	38mm	105×125mm		
センシュラ ミオ1 ディープ 不透明	16756	フリーカット	15-33mm	100×120mm	10枚/箱	¥9,900 (¥990/枚)
	16761	プレカット	25mm	100×120mm		
	16762	プレカット	28mm	100×120mm		
	16757	プレカット	31mm	105×125mm		
	16763	プレカット	35mm	105×125mm		
	16764	プレカット	38mm	105×125mm		

【採便袋】 大きさ:280×137 mm 最大容量:ISO規格490ml 排出口幅:80 mm 大型円形フィルター 7層防臭フィルム ベルト固定用タブ付

平らである腹壁 へこんでいる腹壁 ふくらんでいる腹壁

消化管ストーマ用 单品系装具 センシュラ ミオ1

※非課税

● 採便袋 閉鎖型 平面

製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ ミオ1 クローズ 不透明	10871	フリーカット	15-45 mm	95×115 mm	10枚/箱	¥3,700 (¥370/枚)
	10872	プレカット	25 mm	95×115 mm		
	10873	プレカット	30 mm	95×115 mm		
	10874	プレカット	35 mm	95×115 mm		
	10885	プレカット	40 mm	105×125 mm		
センシュラ ミオ1 クローズ 不透明 ミニ	10870	フリーカット	15-45 mm	95×115 mm	10枚/箱	¥3,200 (¥320/枚)

【採便袋】大きさ: 10871・10872・10873・10874:185×137 mm 最大容量:ISO規格420ml /
10885:207×137 mm 最大容量:ISO規格510ml / 10870:133×132 mm 最大容量:ISO規格120ml
大型円形フィルター 7層防臭フィルム

消化管ストーマ用 单品系装具 センシュラ ミオ1 イレオ

● 採便袋 排出型平面 / 大型キャップ式

製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ ミオ1 イレオ 透明	18665	フリーカット	10-70 mm	130×140 mm	10枚/箱	¥7,100
センシュラ ミオ1 イレオ 不透明	18666	フリーカット	10-100 mm	160×170 mm		

【採便袋】大きさ: 18665:320×150 mm / 18666:320×180mm
最大容量:18665:ISO規格630ml / 18666:ISO規格725ml 大型円形フィルター 7層防臭フィルム
排液バッグ(外径接続型)に接続が可能(下記「排液バッグ」をご覧ください)

● 採便袋 排出型凸面 / 大型キャップ式

製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ ミオ1 イレオ ソフト 透明	18671	フリーカット	10-50 mm	110×125 mm	10枚/箱	¥8,500 (¥850/枚)
センシュラ ミオ1 イレオ ソフト 不透明 透明	18670	フリーカット	10-50 mm	110×125 mm		
センシュラ ミオ1 イレオ ライト 透明	18676	フリーカット	10-43 mm	110×125 mm	10枚/箱	¥9,700 (¥970/枚)
センシュラ ミオ1 イレオ ライト 不透明 透明	18675	フリーカット	10-43 mm	110×125 mm		

【採便袋】大きさ: 320×150 mm 最大容量:ISO規格630ml 大型円形フィルター
7層防臭フィルム ベルト固定用タブ付 排液バッグ(外径接続型)に接続が可能(下記「排液バッグ」をご覧ください)

術直後用单品系装具 センシュラ ミオ1 ポストオペ

術直後用 排出型 平面 / 大型キャップ式

製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ ミオ1 ポストオペ 滅菌済 (ウインドー付)	18680	フリーカット	10-70 mm	130×140 mm	5枚/箱	¥8,500 (¥1,700/枚)
	18681	フリーカット	10-100 mm	160×170 mm	5枚/箱	¥9,000 (¥1,800/枚)
センシュラ ミオ1 ポストオペ 未滅菌 (ウインドー付)	18690	フリーカット	10-70 mm	130×140 mm	5枚/箱	¥6,000 (¥1,200/枚)
	18691	フリーカット	10-100 mm	160×170 mm	5枚/箱	¥6,500 (¥1,300/枚)

【採便袋】大きさ:18680・18690:320×150mm / 18681・18691:320×180 mm
最大容量:18680・18690:ISO規格680ml / 18681・18691:ISO規格725ml 7層防臭フィルム
排液バッグ(外径接続型)に接続が可能(下記「排液バッグ」をご覧ください)

その他の関連製品



製品名	製品番号	チューブ	容量	包装単位	税込価格
排液バッグ (外径接続型)	14010	150cm	2,000ml	2枚/箱	¥1,276 (¥638/枚)

逆流防止弁なし 未滅菌 チューブ長調節可能(25cm刻み) ハンガー付
センシュラ ミオ1 イレオ、センシュラ ミオ1 ポストオペ、センシュラ ミオ2 イレオ、センシュラ ミオ2 フレックスイレオに接続可能

平らである腹壁 へこんでいる腹壁 ふくらんでいる腹壁

平らである腹壁 へこんでいる腹壁 ふくらんでいる腹壁

消化管ストーマ用 单品系装具 センシュラ ミオ1 コンケーブ

※非課税

● 採便袋 開放型 凹面/一体成型 ワイドイメージクローズ

製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	面板呼び名	包装単位	本体価格*
センシュラ ミオ1 コンケーブ 透明	18305	フリーカット	10-40mm	112×105mm	S	10枚/箱	¥8,500 (¥850/枚)
	18321	フリーカット	10-50mm	112×113mm	M		
	18341	フリーカット	10-60mm	123×115mm	L		
	18323	プレカット	30mm	112×113mm	M		
	18324	プレカット	35mm	112×113mm	M		
センシュラ ミオ1 コンケーブ 不透明	18342	プレカット	40mm	123×115mm	L	10枚/箱	¥8,500 (¥850/枚)
	18343	プレカット	45mm	123×115mm	L		
	18344	プレカット	50mm	123×115mm	L		
	18312	フリーカット	10-50mm	112×113mm	M		
	18330	フリーカット	10-60mm	123×115mm	L		
センシュラ ミオ1 コンケーブ 不透明	18301	プレカット	25mm	112×105mm	S	10枚/箱	¥8,500 (¥850/枚)
	18314	プレカット	30mm	112×113mm	M		
	18315	プレカット	35mm	112×113mm	M		
	18331	プレカット	40mm	123×115mm	L		
	18332	プレカット	45mm	123×115mm	L		
センシュラ ミオ1 コンケーブ 不透明	18333	プレカット	50mm	123×115mm	L		

【採便袋】大きさ: 270×130 mm 最大容量:ISO規格480ml 排出口幅: 80mm 大型円形フィルター 7層防臭フィルム

40mmのタイプが追加されたことにより、装具選択の幅が広がりました!

下記の表の 部分が追加されました。このことによりセンシュラ ミオ コンケーブの各サイズが揃いました。

ストーマサイズ	ストーマ周囲のふくらみ方			
	<11 cm	11-15 cm	16-20 cm	>20 cm
<40 mm				
41-50 mm				
51-60 mm				
>61 mm				

ストーマサイズ	ストーマ周囲のふくらみ方			
	<11 cm	11-15 cm	16-20 cm	>20 cm
<35 mm				
36-45 mm				</

尿路ストーマ用 单品系装具 センシュラ ミオ1

● 採尿袋 排出型 平面/5重リング式 スッパー付キャップ

製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ ミオ1 ウロ 透明	10586	フリーカット	10-45 mm	95×115 mm	10枚/箱	¥8,500 (¥850/枚)

【採尿袋】大きさ:266×170 mm 最大容量:ISO規格440ml 仕切構造 逆流防止弁あり 5層防臭フィルム アシュラウロコネクター5個
外部蓄尿袋との接続可能(P75~77をご覧ください)

● 採尿袋 排出型 凸面 ソフト[高さ6mm] / ライト[高さ6mm] / ディープ[高さ9mm] / 5重リング式スッパー付キャップ

製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ ミオ1 ウロ ソフト 透明	16810	フリーカット	10-50mm	105×125mm	10枚/箱	¥10,800 (¥1,080/枚)
センシュラ ミオ1 ウロ ライト 透明	16835 16836 16837 16840 16841 16842	フリーカット フリーカット フリーカット プレカット プレカット プレカット	10-23mm 15-33mm 10-43mm 21mm 25mm 28mm	90×110mm 100×120mm 105×125mm 90×110mm 100×120mm 100×120mm	10枚/箱	¥11,500 (¥1,150/枚)
センシュラ ミオ1 ウロ ディープ 透明	16866 16867 16870 16871 16872	フリーカット フリーカット プレカット プレカット プレカット	15-33mm 10-43mm 21mm 25mm 28mm	100×120mm 105×125mm 90×110mm 100×120mm 100×120mm	10枚/箱	¥11,700 (¥1,170/枚)

【採尿袋】大きさ:266×170 mm 最大容量:ISO規格440ml 仕切構造 逆流防止弁あり 7層防臭フィルム アシュラウロコネクター5個
ベルト固定用タブ付 外部蓄尿袋との接続可能(P75~77をご覧ください)

尿路ストーマ用 单品系装具 センシュラ ミオ1 コンケーブ

● 採尿袋 排出型 凹面/5重リング式 スッパー付キャップ

製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	面板呼び名	包装単位	本体価格*
センシュラ ミオ1 コンケーブ ウロ 透明	18405	フリーカット	10-40mm	112×105mm	S	10枚/箱	¥10,800 (¥1,080/枚)
センシュラ ミオ1 コンケーブ ウロ 不透明	18401	フリーカット	10-40mm	112×105mm	S	10枚/箱	¥10,800 (¥1,080/枚)

【採尿袋】大きさ:260×128 mm 最大容量:ISO規格380ml 仕切構造 逆流防止弁あり 5層防臭フィルム アシュラウロコネクター5個
外部蓄尿袋との接続可能(P75~77をご覧ください)

消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 センシュラ ミオ2

● 面板 平面/クリック・カップリング

製品名	製品番号	フランジ径	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ ミオ2 プレート	10502 10512 10522 10531 10503 10504 10513 10515 10523	● 40 mm ● 50 mm ● 60 mm ● 70 mm ● 40 mm ● 40 mm ● 50 mm ● 50 mm ● 60 mm	フリーカット フリーカット フリーカット フリーカット プレカット プレカット プレカット プレカット プレカット	10-35 mm 10-45 mm 10-55 mm 10-65 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm	90×110mm 100×120mm 110×130mm 120×140mm 90×110mm 90×110mm 100×120mm 100×120mm 110×130mm	5枚/箱	¥3,550 (¥710/枚)

ベルト固定用タブ付

● 面板 凸面/クリック・カップリング/ライト[高さ6mm]

製品名	製品番号	フランジ径	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ ミオ 2 プレート ライト	16901 16911 16921 16931 16903 16913 16914 16915 16923 16924 16933 16934	● 40 mm ● 50 mm ● 60 mm ● 70 mm ● 40 mm ● 50 mm ● 50 mm ● 50 mm ● 60 mm ● 60 mm ● 70 mm ● 70 mm	フリーカット フリーカット フリーカット フリーカット プレカット プレカット プレカット プレカット プレカット プレカット プレカット プレカット	10-20mm 15-30mm 15-40mm 15-53mm 18mm 21mm 25mm 28mm 31mm 35mm 38mm 41mm	90x110mm 100x120mm 110x130mm 120x140mm 90x110mm 100x120mm 100x120mm 100x120mm 110x130mm 110x130mm 120x140mm 120x140mm	5枚/箱	¥4,550 (¥910/枚)

ベルト固定用タブ付

● 面板 凸面/クリック・カップリング/ディープ[高さ9mm]

製品名	製品番号	フランジ径	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ ミオ 2 プレート ディープ	16941 16951 16961 16971 16942 16953 16954 16955 16963 16964 16973 16974	● 40 mm ● 50 mm ● 60 mm ● 70 mm ● 40 mm ● 50 mm ● 50 mm ● 50 mm ● 60 mm ● 60 mm ● 70 mm ● 70 mm	フリーカット フリーカット フリーカット フリーカット プレカット プレカット プレカット プレカット プレカット プレカット プレカット プレカット	10-20mm 15-30mm 15-40mm 15-53mm 18mm 21mm 25mm 28mm 31mm 35mm 38mm 41mm	90x110mm 100x120mm 110x130mm 120x140mm 90x110mm 100x120mm 100x120mm 100x120mm 110x130mm 110x130mm 120x140mm 120x140mm	5枚/箱	¥4,650 (¥930/枚)

ベルト固定用タブ付

消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 センシュラ ミオ2 コンケーブ

● 面板 凹面/クリック・カップリング

製品名	製品番号	フランジ径	開口部	開口部径	面板大きさ	面板呼び名	包装単位	本体価格*
センシュラ ミオ2 コンケーブ プレート	18500 18510 18520 18530 18513 18523 18524 18532	● 40 mm ● 50 mm ● 60 mm ● 70 mm ● 50 mm ● 60 mm ● 60 mm ● 70 mm	フリーカット フリーカット フリーカット フリーカット プレカット プレカット プレカット プレカット	10-35mm 10-45mm 10-55mm 10-65mm 35mm 40mm 45mm 50mm	112×105mm 122×113mm 125×132mm 145×135mm 122×113mm 125×132mm 125×132mm 145×135mm	S M L XL M L L XL	5枚/箱	¥4,550 (¥910/枚)

ベルト固定用タブ付

消化管・尿路ストーマ用二品系装具 センシュラミオ2

※非課税

採便袋 開放型／一体成型ワイドイージクローズ／クリック・カップリング



製品名	製品番号	法兰ジ径	最大容量：ISO規格	包装単位	本体価格*
センシュラミオ2 バッグ 透明	11463	● 40 mm	590ml	10枚/箱	¥4,100 (¥410/枚)
	11473	● 50 mm	510ml		
	11483	● 60 mm	480ml		
	11487	● 70 mm	460ml		
センシュラミオ2 バッグ 不透明	11462	● 40 mm	590ml	10枚/箱	¥4,100 (¥410/枚)
	11472	● 50 mm	510ml		
	11482	● 60 mm	480ml		
	11486	● 70 mm	460ml		

【採便袋】大きさ:280×137 mm 排出口幅:80mm 大型円形フィルター 7層防臭フィルム

採便袋 閉鎖型／クリック・カップリング



製品名	製品番号	法兰ジ径	最大容量：ISO規格	包装単位	本体価格*
センシュラミオ2 クローズバッグ 不透明	11401	● 40 mm	430ml	10枚/箱	¥4,100 (¥410/枚)
	11412	● 50 mm	420ml		
	11421	● 60 mm	390ml		
	11425	● 70 mm	480ml		

【採便袋】大きさ:11401・11412・11421:185×137 mm / 11425:207×137 mm 大型円形フィルター 7層防臭フィルム

採便袋 排出型 / 大型キャップ式 / クリック・カップリング



製品名	製品番号	法兰ジ径	最大容量：ISO規格	包装単位	本体価格*
センシュラミオ2 イレオ 透明	18640	● 50 mm	1,120ml	10枚/箱	¥6,100 (¥610/枚)
	18641	● 60 mm	1,080ml		
	18642	● 70 mm	1,040ml		

【採便袋】大きさ:370×170 mm キャップ式排出口外径:16mm/内径:9mm 大型円形フィルター 7層防臭フィルム 逆流防止弁あり 排液バッグ(外径接続型)に接続可能(P28をご覧ください)

採尿袋 排出型 / 5重リング式ストッパー付キャップ／クリック・カップリング



製品名	製品番号	法兰ジ径	最大容量：ISO規格	包装単位	本体価格*
センシュラミオ2 ウロ 透明	11492	● 40 mm	540ml	10枚/箱	¥7,600 (¥760/枚)
	11498	● 50 mm	490ml		
	11500	● 60 mm	450ml		

【採尿袋】大きさ:266×170 mm 仕切構造 逆流防止弁あり 5層防臭フィルム アシュラウロコネクター5個
外部蓄尿袋との接続可能(P75~77をご覧ください)

ベルト




製品名	製品番号	規格	包装単位	税込価格
センシュラミオ 専用ベルト	0423	幅 3cm × 長さ 100cm	1本/袋	¥1,430

※ポリプロピレン、ポリアミド、ポリウレタン、ポリエステル、顔料

4点止め安心ベルト



製品名	製品番号	規格	包装単位	税込価格
4点止め安心ベルト	0430	幅 3cm × 長さ 90cm	1本/袋	¥1,430
	0440	幅 3cm × 長さ 120cm		

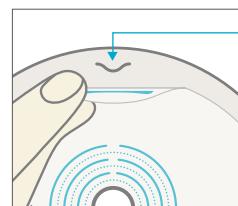センシュラミオ専用
※ベルト部分:綿(オーガニック)、ナイロン、ポリエチレン、レーヨン、ポリウレタン フック部分:PP ポリプロピレン樹脂(エラストマー系)

単品系装具上部にはそれぞれ

- ソフト
- ライト
- ディープ

のマークが印刷されています。

消化管・尿路ストーマ用二品系装具 センシュラミオ2 フレックス

※非課税

● 面板 平面／粘着式カップリング

製品名	製品番号	ディスク内径	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラミオ2 フレックスプレート	10551	● 35 mm	フリーカット	10-33 mm	100×120 mm	5枚/箱	¥4,000 (¥800/枚)
	10561	● 50 mm	フリーカット	10-48 mm	110×130 mm		
	10571	● 70 mm	フリーカット	10-68 mm	130×150 mm		
	10562	● 50 mm	プレカット	25 mm	110×130 mm		
	10563	● 50 mm	プレカット	30 mm	110×130 mm		
	10564	● 50 mm	プレカット	35 mm	110×130 mm		
	10565	● 50 mm	プレカット	40 mm	110×130 mm		

● 面板 凸面／粘着式カップリング／ライト [高さ6mm]

製品名	製品番号	ディスク内径	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラミオ2 フレックスプレート ライト	16471	● 35 mm	フリーカット	10-20mm	100×120mm	5枚/箱	¥4,650 (¥930/枚)
	16481	● 50 mm	フリーカット	15-30mm	110×130mm		
	16483	● 50 mm	フリーカット	15-40mm	110×130mm		
	16491	● 70 mm	フリーカット	15-53mm	130×150mm		
	16472	● 35 mm	プレカット	18mm	100×120mm		
	16484	● 50 mm	プレカット	21mm	110×130mm		
	16485	● 50 mm	プレカット	25mm	110×130mm		
	16486	● 50 mm	プレカット	28mm	110×130mm		
	16487	● 50 mm	プレカット	31mm	110×130mm		
	16488	● 50 mm	プレカット	35mm	110×130mm		
	16493	● 70 mm	プレカット	38mm	130×150mm		
	16494	● 70 mm	プレカット	41mm	130×150mm		

ベルト固定用タブ付

採便袋 開放型／一体成型ワイドイージクローズ／粘着式カップリング

製品名	製品番号	ディスク内径	最大容量：ISO規格	包装単位	本体価格*
センシュラミオ2 フレックスバッグ	12263	●			

消化管・尿路ストーマ用装具「センシュラミオベビー」「センシュラミオキッズ」 新生児～小児用装具

※非課税

消化管ストーマ用二品系装具 センシュラミオ2ベビー

製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラミオ2ベビー フレックスプレート***	18705	初孔なし	20mm×40mm	55mm×73mm	5枚/箱	¥2,000 (¥400/枚)
製品名	製品番号	ディスク内径	袋サイズ	袋容量	包装単位	本体価格*
センシュラミオ2ベビー フレックスパック	透明 18700	20mm×40mm	67mm×186mm	120ml	10枚/箱	¥3,000 (¥300/枚)

*センシュラミオ2ベビー フレックスプレート(品番:18705)専用のため、他の製品には使用しないでください。

※※センシュラミオ2ベビー フレックスプレートの皮膚保護剤の主要成分:HEC、EVA、ポリプロピレン

消化管ストーマ用 単品系装具 センシュラミオ1キッズ

製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	袋サイズ	包装単位	本体価格*
センシュラミオ1キッズ	透明 18711	フリーカット	0-35mm	95mm×101mm	114mm×233mm	10枚/箱	¥5,000 (¥500/枚)
センシュラミオ1キッズ ウロ	不透明 18710						

【採便袋】大型フィルター 7層防臭フィルム

尿路ストーマ用 単品系装具 センシュラミオ1キッズ

製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	袋サイズ	包装単位	本体価格*
センシュラミオ1キッズ ウロ	透明 18712	フリーカット	10-35mm	95mm×101mm	114mm×233mm	10枚/箱	¥7,000 (¥700/枚)
	不透明 18713						

【採尿袋】逆流防止弁あり 7層防臭フィルム アシュラウロコネクター5個 外部蓄尿袋との接続可能

消化管ストーマ用二品系装具 センシュラミオ2キッズ

製品名	製品番号	開口部	ディスク内径	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラミオ2キッズ フレックスプレート	18735	フリーカット	● 27mm	0-27mm	86mm×93mm	5枚/箱	¥2,000 (¥400/枚)
	18747	フリーカット	● 35mm	0-35mm	95mm×101mm		
製品名	製品番号	ディスク内径	袋サイズ		袋容量	包装単位	本体価格*
センシュラミオ2キッズ フレックスパック	透明 18723	● 27mm	114mm×233mm		200ml	10枚/箱	¥3,000 (¥300/枚)
	不透明 18725	● 35mm					
センシュラミオ2キッズ フレックスウロ	透明 18722	● 27mm	115mm×217mm		200ml	10枚/箱	¥7,000 (¥700/枚)
	不透明 18724	● 35mm					

【採便袋】大型フィルター 7層防臭フィルム

尿路ストーマ用二品系装具 センシュラミオ2キッズ

製品名	製品番号	ディスク内径	袋サイズ	袋容量	包装単位	本体価格*
センシュラミオ2キッズ フレックスウロ	不透明 18730	● 27mm	115mm×217mm	200ml	10枚/箱	¥7,000 (¥700/枚)
	不透明 18731	● 35mm				

【採尿袋】逆流防止弁あり 7層防臭フィルム アシュラウロコネクター5個 外部蓄尿袋との接続可能

「ダブルレイヤー皮膚保護剤」を採用した センシュラ

上下二層構造の皮膚保護剤が
皮膚保護性と耐久性を両立。
皮膚を健やかに保ちます。



上下二層構造の皮膚保護剤


ダブルレイヤー皮膚保護剤(CPGbs系) 貼付期間目安 1-4日

組成の異なる二種類の皮膚保護剤を上下二層に配置し、皮膚保護剤に求められる特性をバランスよく実現しました。初期タック力、水分吸収力に優れると同時に耐水性が高く、膨潤作用により皮膚保護剤がストーマ粘膜に密着するため排泄物が皮膚に接触するのを防止します。下の層にはpH緩衝能の高いペクチンを配合し、皮膚を弱酸性に保ちます。

ダブルレイヤーXpro皮膚保護剤(CPGbs系) 貼付期間目安 4-6日

ダブルレイヤー皮膚保護剤の耐水性と初期タック力、柔軟性をより高めた皮膚保護剤です。水分量の多いイレオストミー、ウロストミーの方々にご利用をおすすめします。

※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。
皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。

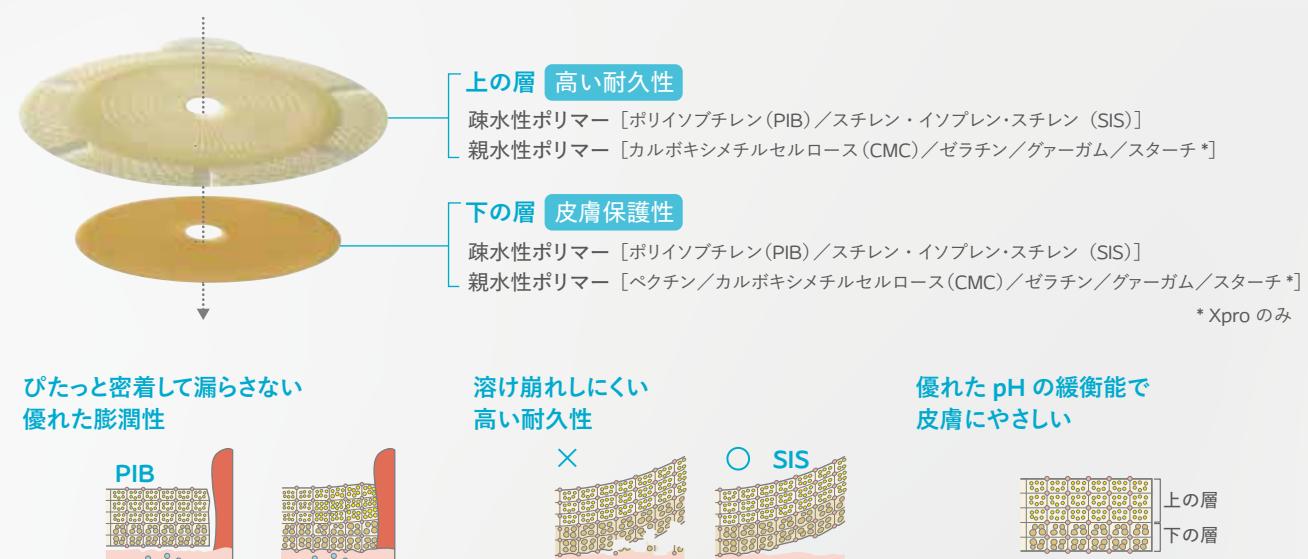

●流动性の高い疎水性ポリマー ポリイソブチレン (PIB) がすばやく密着性を確保します。

●開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。

●凝縮力のある成分 (SIS) の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。

●近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。

消化管・尿路ストーマ用 单品系装具 センシュラ 1

※非課税

※非課税

採便袋 開放型 平面／一体成型ワイドイージクローズ

皮膚保護剤:ダブルレイヤー 貼付期間の目安 1～4日



製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ 1 透明	15521	フリーカット	10-76 mm	100×120 mm	10枚/箱	¥6,000 (¥600/枚)
	15522	プレカット	25 mm	100×120 mm		
	15523	プレカット	30 mm	100×120 mm		
	15524	プレカット	35 mm	100×120 mm		
センシュラ 1 ナチュラル 肌色	15531	フリーカット	10-76 mm	100×120 mm	10枚/箱	¥6,000 (¥600/枚)
	15532	プレカット	25 mm	100×120 mm		
	15533	プレカット	30 mm	100×120 mm		
	15534	プレカット	35 mm	100×120 mm		

【面板】最大有効径:上下 63 mm / 左右 76 mm

【採便袋】大きさ:295×145mm 排出口幅:80 mm ハイドロフォビックメッシュフィルター 5層防臭フィルム

採便袋 開放型 凸面[高さ5mm]／一体成型ワイドイージクローズ

皮膚保護剤:ダブルレイヤー 貼付期間の目安 1～4日



製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ 1 プラス 透明	15605	フリーカット	15-33 mm	100×120 mm	10枚/箱	¥9,500 (¥950/枚)
	15606	フリーカット	15-43 mm	110×125 mm		
	15623	プレカット	25 mm	100×120 mm		
	15624	プレカット	28 mm	100×120 mm		
	15625	プレカット	31 mm	100×120 mm		
	15626	プレカット	35 mm	110×125 mm		
	15627	プレカット	40 mm	110×125 mm		
センシュラ 1 プラス ナチュラル 肌色	15607	フリーカット	15-33 mm	100×120 mm	10枚/箱	¥9,500 (¥950/枚)
	15608	フリーカット	15-43 mm	110×125 mm		
	15633	プレカット	25 mm	100×120 mm		
	15634	プレカット	28 mm	100×120 mm		
	15635	プレカット	31 mm	100×120 mm		

【採便袋】大きさ:295×145 mm 排出口幅:80 mm ハイドロフォビックメッシュフィルター 5層防臭フィルム
ベルト固定用タブ付

採便袋 排出型 平面／大型キャップ式

皮膚保護剤:ダブルレイヤー 貼付期間の目安 1～4日



製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ 1 イレオ (観察窓付) 肌色	19002	フリーカット	10-76 mm	100×120 mm	6枚/箱	¥4,500 (¥750/枚)

【面板】最大有効径:上下 63 mm / 左右 76 mm

【採便袋】大きさ:320×145 mm 最大容量:ISO規格630 ml ハイドロフォビックメッシュフィルター 5層防臭フィルム
排液バッグ(外径接続型)に接続可能(P39をご覧ください)

採便袋 排出型 凸面[高さ5mm]／大型キャップ式

皮膚保護剤:ダブルレイヤーXpro 貼付期間の目安 4～6日



製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ 1 イレオ Xpro プラス (観察窓付) 肌色	19100	フリーカット	15-43 mm	110×125 mm	5枚/箱	¥4,000 (¥800/枚)
	19110	プレカット	25 mm	100×120 mm		
	19120	プレカット	32 mm	100×120 mm		
	19130	プレカット	35 mm	110×125 mm		

【採便袋】大きさ:320×145 mm 最大容量:ISO規格630ml ハイドロフォビックメッシュフィルター 5層防臭フィルム
排液バッグ(外径接続型)に接続可能(P39をご覧ください) ベルト固定用タブ付

採便袋 閉鎖型 平面

皮膚保護剤:ダブルレイヤー 貼付期間の目安 1～4日



製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ 1 クローズ 肌色	15450	フリーカット	10-66 mm	90×110 mm	10枚/箱	¥3,600 (¥360/枚)
	15452	プレカット	25 mm	90×110 mm		
	15453	プレカット	30 mm	90×110 mm		
	15454	プレカット	35 mm	90×110 mm		
センシュラ 1 ミニ 肌色	15455	プレカット	40 mm	90×110 mm	10枚/箱	¥3,100 (¥310/枚)
	15420	フリーカット	10-66 mm	90×110 mm		

【面板】最大有効径:上下 53 mm / 左右 66 mm

【採便袋】大きさ:センシュラ 1 クローズ 180×145 mm / センシュラ 1 ミニ 140×130 mm 5層防臭フィルム
ハイドロフォビックメッシュフィルター

採尿袋 排出型 平面／5重リング式ストッパー付キャップ

皮膚保護剤:ダブルレイヤーXpro 貼付期間の目安 4～6日



製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ 1 ウロ Xpro 透明	11809	フリーカット	10-76 mm	100×120 mm	10枚/箱	¥9,200 (¥920/枚)
	11831	プレカット	22 mm	100×120 mm		
	11832	プレカット	25 mm	100×120 mm		
	11833	プレカット	30 mm	100×120 mm		

【面板】最大有効径:上下 63 mm / 左右 76 mm

【採尿袋】大きさ:260×170 mm 仕切構造 逆流防止弁あり 5層防臭フィルム アシュラウロコネクター5個
外部蓄尿袋との接続可能(P75～77をご覧ください)

採尿袋 排出型 凸面[高さ5mm]／5重リング式ストッパー付キャップ

皮膚保護剤:ダブルレイヤーXpro 貼付期間の目安 4～6日



製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ 1 ウロ Xpro プラス 透明	11819	フリーカット	15-33 mm	100×120 mm	10枚/箱	¥12,400 (¥1,240/枚)
	11834	プレカット	22 mm	100×120 mm		
	11835	プレカット	25 mm	100×120 mm		
	11836	プレカット	32 mm	100×120 mm		

【採尿袋】大きさ:260×170 mm 仕切構造 逆流防止弁あり 5層防臭フィルム アシュラウロコネクター5個

ベルト固定用タブ付 外部蓄尿袋との接続可能(P75～77をご覧ください)

消化管・尿路ストーマ用二品系装具 センシュラ2

※非課税

※非課税

面板 平面/ダブルロック方式カップリング

皮膚保護剤:ダブルレイヤー 貼付期間の目安 1~4日

製品名	製品番号	フランジ径	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ2 プレート	10011	● 40 mm	フリーカット	10-35 mm	90×110mm	5枚/箱	¥3,500 (¥700/枚)
	10021	● 50 mm	フリーカット	10-45 mm	100×120mm		
	10031	● 60 mm	フリーカット	10-55 mm	110×130mm		
	10041	● 70 mm	フリーカット	10-65 mm	120×140mm		
	10012	● 40 mm	プレカット	20 mm	90×110mm		
	10013	● 40 mm	プレカット	25 mm	90×110mm		
	10022	● 50 mm	プレカット	30 mm	100×120mm		
	10023	● 50 mm	プレカット	35 mm	100×120mm		
	10032	● 60 mm	プレカット	40 mm	110×130mm		

ベルト固定用タブ付

面板 平面/ダブルロック方式カップリング

皮膚保護剤:ダブルレイヤーXpro 貼付期間の目安 4~6日

製品名	製品番号	フランジ径	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ2 Xproプレート	10015	● 40 mm	フリーカット	10-35 mm	90×110 mm	5枚/箱	¥3,750 (¥750/枚)
	10025	● 50 mm	フリーカット	10-45 mm	100×120 mm		
	10035	● 60 mm	フリーカット	10-55 mm	110×130 mm		
	10045	● 70 mm	フリーカット	10-65 mm	120×140 mm		
	10016	● 40 mm	プレカット	20 mm	90×110 mm		
	10017	● 40 mm	プレカット	25 mm	90×110 mm		
	10026	● 50 mm	プレカット	30 mm	100×120 mm		
	10027	● 50 mm	プレカット	35 mm	100×120 mm		
	10036	● 60 mm	プレカット	40 mm	110×130 mm		

ベルト固定用タブ付

面板 凸面[高さ5mm]/ダブルロック方式カップリング

皮膚保護剤:ダブルレイヤー 貼付期間の目安 1~4日

製品名	製品番号	フランジ径	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ2 プラスプレート	11011	● 40 mm	フリーカット	15-23 mm	90×110 mm	5枚/箱	¥4,250 (¥850/枚)
	11021	● 50 mm	フリーカット	15-33 mm	100×120 mm		
	11031	● 60 mm	フリーカット	15-43 mm	110×130 mm		
	11041	● 70 mm	フリーカット	15-53 mm	120×140 mm		
	11012	● 40 mm	プレカット	21 mm	90×110 mm		
	11022	● 50 mm	プレカット	25 mm	100×120 mm		
	11023	● 50 mm	プレカット	28 mm	100×120 mm		
	11024	● 50 mm	プレカット	31 mm	100×120 mm		
	11032	● 60 mm	プレカット	35 mm	110×130 mm		

ベルト固定用タブ付

面板 凸面[高さ5mm]/ダブルロック方式カップリング

皮膚保護剤:ダブルレイヤーXpro 貼付期間の目安 4~6日

製品名	製品番号	フランジ径	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ2 Xproプラスプレート	11015	● 40 mm	フリーカット	15-23 mm	90×110 mm	5枚/箱	¥5,000 (¥1,000/枚)
	11025	● 50 mm	フリーカット	15-33 mm	100×120 mm		
	11035	● 60 mm	フリーカット	15-43 mm	110×130 mm		
	11045	● 70 mm	フリーカット	15-53 mm	120×140 mm		
	11016	● 40 mm	プレカット	21 mm	90×110 mm		
	11026	● 50 mm	プレカット	25 mm	100×120 mm		
	11027	● 50 mm	プレカット	28 mm	100×120 mm		
	11028	● 50 mm	プレカット	31 mm	100×120 mm		
	11036	● 60 mm	プレカット	35 mm	110×130 mm		

ベルト固定用タブ付

※非課税

採便袋 開放型/一体成型ワイドイージクローズ/ダブルロック方式カップリング

製品名	製品番号	フランジ径	包装単位	本体価格*
センシュラ2 バッグ	11194	● 40 mm	10枚/箱	¥4,000 (¥400/枚)
	11195	● 50 mm		
	11196	● 60 mm		
	11197	● 70 mm		
センシュラ2 バッグ ナチュラル	11124	● 40 mm	10枚/箱	¥4,000 (¥400/枚)
	11125	● 50 mm		
	11126	● 60 mm		
	11127	● 70 mm		

【採便袋】大きさ:295×145 mm 排出口幅:80 mm ハイドロフォビックメッシュフィルター 5層防臭フィルム

採便袋 排出型/大型キャップ式/ダブルロック方式カップリング

製品名	製品番号	フランジ径	最大容量: ISO規格	包装単位	本体価格*
センシュラ2 イレオ	19050	● 40 mm	1,160ml	10枚/箱	¥6,000 (¥600/枚)
	19051	● 50 mm	1,120ml		
	19052	● 60 mm	1,080ml		
	19040	● 40 mm	1,160ml		
センシュラ2 イレオ ナチュラル	19041	● 50 mm	1,120ml	10枚/箱	¥6,000 (¥600/枚)
	19042	● 60 mm	1,080ml		

【採便袋】大きさ:380×184 mm ハイドロフォビックメッシュフィルター 逆流防止弁あり

排液バッグ(外径接続型)に接続可能(下記「排液バッグ」をご覧ください) 5層防臭フィルム クランプ

製品名	製品番号	チューブ	容量	包装単位	税込価格
排液バッグ(外径接続型)	14010	チューブ	150cm	2枚/箱	¥1,276 (¥638/枚)

逆流防止弁なし 未滅菌 チューブ長調節可能25cm刻み ハンガー付

センシュラ1 イレオ、センシュラ1 イレオXproプラス、センシュラ2 イレオ、センシュラ2 イレオ ナチュラルに接続可能

採便袋 閉鎖型/ダブルロック方式カップリング

製品名	製品番号	フランジ径	包装単位	本体価格*

<tbl_r cells="5" ix="1" maxcspan="1

消化管・尿路ストーマ用二品系装具 センシュラ2 フレックス

※非課税

※非課税

面板 平面／粘着式カッピング

製品名	製品番号	ディスク内径	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ フレックス プレート	10101	● 35 mm	フリーカット	10-33 mm	100×120 mm	10枚/箱	
	10102	● 50 mm	フリーカット	10-48 mm	110×130 mm		¥7,700 (¥770/枚)
	10103	● 70 mm	フリーカット	10-68 mm	130×150 mm		
	10108	● 90 mm	フリーカット	10-88 mm	150×170 mm		¥4,250 (¥850/枚)
	10111	● 35 mm	プレカット	21 mm	100×120 mm		
	10114	● 50 mm	プレカット	25 mm	110×130 mm		
	10115	● 50 mm	プレカット	28 mm	110×130 mm		
	10116	● 50 mm	プレカット	31 mm	110×130 mm		
	10117	● 50 mm	プレカット	35 mm	110×130 mm		
	10118	● 50 mm	プレカット	41 mm	110×130 mm		

皮膚保護剤:ダブルレイヤー 貼付期間の目安 1~4日

製品名	製品番号	ディスク内径	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ フレックス Xpro プレート	10104	● 35 mm	フリーカット	10-33 mm	100×120 mm	10枚/箱	
	10105	● 50 mm	フリーカット	10-48 mm	110×130 mm		¥8,500 (¥850/枚)
	10106	● 70 mm	フリーカット	10-68 mm	130×150 mm		

面板 凸面[高さ5mm]／粘着式カッピング

皮膚保護剤:ダブルレイヤー 貼付期間の目安 1~4日

製品名	製品番号	ディスク内径	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ フレックス プラスプレート	11301	● 35 mm	フリーカット	15-23 mm	100×120 mm	5枚/箱	
	11302	● 50 mm	フリーカット	15-33 mm	110×130 mm		
	11303	● 50 mm	フリーカット	15-43 mm	110×130 mm		
	11307	● 70 mm	フリーカット	15-56 mm	130×150 mm		
	11312	● 35 mm	プレカット	21 mm	100×120 mm		
	11313	● 50 mm	プレカット	25 mm	110×130 mm		¥4,500 (¥900/枚)
	11314	● 50 mm	プレカット	28 mm	110×130 mm		
	11315	● 50 mm	プレカット	31 mm	110×130 mm		
	11316	● 50 mm	プレカット	35 mm	110×130 mm		
	11317	● 50 mm	プレカット	38 mm	110×130 mm		
	11318	● 50 mm	プレカット	41 mm	110×130 mm		

ベルト固定用タブ付

皮膚保護剤:ダブルレイヤーXpro 貼付期間の目安 4~6日

製品名	製品番号	ディスク内径	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ フレックス Xpro プラスプレート	11304	● 35 mm	フリーカット	15-23 mm	100×120 mm	5枚/箱	
	11305	● 50 mm	フリーカット	15-33 mm	110×130 mm		
	11306	● 50 mm	フリーカット	15-43 mm	110×130 mm		¥5,500 (¥1,100/枚)
	11308	● 70 mm	フリーカット	15-56 mm	130×150 mm		

ベルト固定用タブ付

※非課税

※非課税

採便袋 開放型／一体成型 ワイドイージクローズ／粘着式カッピング



製品名	製品番号	ディスク内径	包装単位	本体価格*
センシュラ フレックス バッグ	11512	● 50 mm	10枚/箱	¥4,000 (¥400/枚)
	11517	● 70 mm		
センシュラ フレックス バッグ	11590	● 90 mm	10枚/箱	¥4,200 (¥420/枚)
	11514	● 35 mm		
(ナチュラル)	11515	● 50 mm	10枚/箱	¥4,000 (¥400/枚)
	11518	● 70 mm		

【採便袋】大きさ:11512・11517・11514・11515・11518:295×145 mm / 11590:310×165 mm
排出口幅:80 mm ハイドロフォビックメッシュフィルター 5層防臭フィルム

採便袋 閉鎖型／粘着式カッピング



製品名	製品番号	ディスク内径	包装単位	本体価格*
センシュラ フレックス クローズバッグ	10912	● 50 mm	10枚/箱	¥4,000 (¥400/枚)
	10915	● 50 mm		
(ナチュラル)	10918	● 70 mm	10枚/箱	¥4,000 (¥400/枚)
	10895	● 50 mm		

【採便袋】大きさ:10912・10915・10918:210×150 mm / 10895:140×130 mm
ハイドロフォビックメッシュフィルター 5層防臭フィルム

採尿袋 排出型／5重リング式ストッパー付キャップ／粘着式カッピング



製品名	製品番号	ディスク内径	包装単位	本体価格*
センシュラ フレックス ウロ	11827	● 35 mm	10枚/箱	¥8,000 (¥800/枚)
	11828	● 50 mm		
(ナチュラル)	11824	● 35 mm	10枚/箱	¥8,000 (¥800/枚)
	11825	● 50 mm		

【採尿袋】大きさ:265×170 mm 仕切り構造 逆流防止弁あり 5層防臭フィルム アシュラウロコネクター5個
外部蓄尿袋との接続可能(P75~77をご覧ください)

カッピング(二品系装具)

ダブルロック方式カッピング

腹圧をかけず術直後からご使用いただけます。カチっという音で嵌合を確かめられる安心のカッピングです。一旦ロックをすれば、外れることはございません。

「嵌め込んだつもり」のミスは起こりません。



粘着式カッピング

青色エッジライン、二重リング方式 粘着フォームで採便袋/採尿袋との粘着を確実に、容易に行えます。



永遠の定番

アシュラ

アシュラは、
発売以来 20 年以上にわたる
信頼と実績に裏づけられた製品です。

ユニークな渦巻き型皮膚保護剤

渦巻き型皮膚保護剤は、親水性ポリマーと疎水性ポリマーの種類や配合比を変えることによってさまざまな性質の皮膚保護剤を作り出し、用途に合わせて渦巻き状に組み合わせています。

ニュースイスロール ER	貼付期間目安	1日または3~4日
CPbs系		

ニュースイスロール	貼付期間目安	2~4日
CPb系		

ニュースイスロールクリア	貼付期間目安	3~5日
CPbs系		

※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。
皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。



消化管ストーマ用 単品系装具 アシュラ

採便袋 開放型 平面



製品名		製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	排出口幅	包装単位	本体価格*
アシュラ コンフォート ウィド EC (ワイドイージクローズ)	透明	15860	フリーカット	12-75 mm	105×115mm	80mm	10枚/箱	¥5,400 (¥540/枚)
	透明	15864	プレカット	25 mm	105×115mm	80mm		
	透明	15865	プレカット	30 mm	105×115mm	80mm		
	透明	15866	プレカット	35 mm	105×115mm	80mm		
アシュラ コンフォート ウィド EC·C (ワイドイージクローズ、 両面カバー付)	肌色	15870	フリーカット	12-75 mm	105×115mm	80mm	10枚/箱	¥5,400 (¥540/枚)
	肌色	15874	プレカット	25 mm	105×115mm	80mm		
	肌色	15875	プレカット	30 mm	105×115mm	80mm		
	肌色	15876	プレカット	35 mm	105×115mm	80mm		

【採便袋】大きさ:290×145 mm ワイド活性炭フィルター 5層防臭フィルム

皮膚保護剤:ニュースイスロールER 貼付期間の目安 1日または3~4日



製品名		製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	排出口幅	包装単位	本体価格*
アシュラ コンフォート EC (イージクローズ)	透明	13860	フリーカット	12-75 mm	105×115mm	66mm	10枚/箱	¥5,100 (¥510/枚)
	透明	13864	プレカット	25 mm	105×115mm	66mm		
	透明	13865	プレカット	30 mm	105×115mm	66mm		
	透明	13866	プレカット	35 mm	105×115mm	66mm		
アシュラ コンフォート EC·C (イージクローズ、 両面カバー付)	肌色	13870	フリーカット	12-75 mm	105×115mm	66mm	10枚/箱	¥5,100 (¥510/枚)
	肌色	13874	プレカット	25 mm	105×115mm	66mm		
	肌色	13875	プレカット	30 mm	105×115mm	66mm		
	肌色	13876	プレカット	35 mm	105×115mm	66mm		

【採便袋】大きさ:290×145 mm ワイド活性炭フィルター 5層防臭フィルム

皮膚保護剤:ニュースイスロール 貼付期間の目安 2~4日



製品名		製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	排出口幅	包装単位	本体価格*
アシュラ スタンダード (クリア)	透明	2490	フリーカット	10-70mm	110×110mm		10枚/箱	¥4,500 (¥450/枚)
アシュラ スタンダード (ページュ)	ベージュ	2520	フリーカット	10-70mm	110×110mm		10枚/箱	¥4,500 (¥450/枚)

【採便袋】大きさ:290×145 mm ワイヤークリップ ドレインクリップ 5層防臭フィルム

採便袋 開放型 凸面 ライトコンベックス [高さ5mm]

皮膚保護剤:ニュースイスロールER 貼付期間の目安 1日または3~4日



製品名		製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	排出口幅	包装単位	本体価格*
アシュラ コンフォートLC-ワイド EC (ライトコンベックス、 ワイドイージクローズ)	透明	14511	フリーカット	15-33 mm	110×110mm	80 mm	10枚/箱	¥9,450 (¥945/枚)
	透明	14512	フリーカット	15-43 mm	110×110mm	80 mm		

製品名		製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	排出口幅	包装単位	本体価格*
アシュラ コンフォート LC-EC (ライトコンベックス、 イージクローズ)	透明	14411	フリーカット	15-33 mm	110×110mm	66 mm	10枚/箱	¥9,100 (¥910/枚)
	透明	14412	フリーカット	15-43 mm	110×110mm	66 mm		
アシュラ コンフォート LC-EC-C (ライトコンベックス、 イージクローズ、 両面カバー付)	肌色	14425	プレカット	21 mm	110×110mm	66 mm	10枚/箱	¥9,100 (¥910/枚)
	肌色	14426	プレカット	25 mm	110×110mm	66 mm		



製品名		製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	排出口幅	包装単位	本体価格*
アシュラ コンフォート LC-EC-C (ライトコンベックス、 イージクローズ、 両面カバー付)	肌色	14414	フリーカット	15-33 mm	110×110mm	66 mm	10枚/箱	¥9,100 (¥910/枚)
	肌色	14415	フリーカット	15-43 mm	110×110mm	66 mm		
アシュラ コンフォート LC-EC-C (ライトコンベックス、 イージクローズ、 両面カバー付)	肌色	14421	プレカット	21 mm	110×110mm	66 mm	10枚/箱	¥9,100 (¥910/枚)
	肌色	14422	プレカット	25 mm	110×110mm	66 mm		

【採便袋】大きさ:290×145 mm ワイド活性炭フィルター 5層防臭フィルム ベルト固定用タブ付

消化管ストーマ用 单品系装具 アシュラ

※非課税

採便袋 開放型 凸面[高さ7mm]エーコンベックス

皮膚保護剤:ニュースイスロール 貼付期間の目安 2~4日



製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	排出口幅	包装単位	本体価格*
アシュラ コンフォートコンベックス EC (イージクローズ)	14102	フリーカット	15-33 mm	110mm	66mm	10枚/箱	¥8,500 (¥850/枚)
	14103	フリーカット	15-43 mm	110mm	66mm		
	14163	プレカット	21 mm	110mm	66mm		
	14164	プレカット	25 mm	110mm	66mm		
	14165	プレカット	28 mm	110mm	66mm		
	14166	プレカット	31 mm	110mm	66mm		

【採便袋】大きさ:290×145 mm ワイド活性炭フィルター 5層防臭フィルム ベルト固定用タブ付

皮膚保護剤:ニュースイスロール 貼付期間の目安 2~4日



製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
アシュラ スタンダードACフリー (エーコンベックス付)	12585	フリーカット	15-33 mm	110 mm	6枚/箱	¥4,680 (¥780/枚)
	12586	フリーカット	15-43 mm	110 mm		

【採便袋】大きさ:290×145 mm ワイヤークリップ ドレンクリップ 5層防臭フィルム ベルト固定用タブ付

採便袋 閉鎖型 平面

皮膚保護剤:ニュースイスロールER 貼付期間の目安 1日または 3~4日



製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
アシュラ コンフォートクローズ	12150	フリーカット	20-65 mm	95×105 mm	10枚/箱	¥3,650 (¥365/枚)
	12154	プレカット	25 mm	95×105 mm		
	12155	プレカット	30 mm	95×105 mm		
	12156	プレカット	35 mm	95×105 mm		
	12157	プレカット	40 mm	95×105 mm		
	12158	プレカット	45 mm	95×105 mm		

【採便袋】大きさ:135×185 mm ワイド活性炭フィルター 5層防臭フィルム デザインカバー

皮膚保護剤:ニュースイスロールER 貼付期間の目安 1日または 3~4日



製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
アシュラ Kミニキャップ	2501	フリーカット	20-55 mm	83×83 mm	10枚/箱	¥3,150 (¥315/枚)

【採便袋】大きさ:110×110 mm 高性能脱臭フィルター 5層防臭フィルム

プラグ型装具 プラグ型 平面

(ご使用にあたっては必ず医師、皮膚・排泄ケア認定看護師、看護師の指導を受けて下さい)

皮膚保護剤:ニュースイスロール



製品名	製品番号	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
アシュラ コンシールプラグ	1485	プラグ長 35mm 規格 50mm	100 mm	10枚/箱	¥5,800 (¥580/枚)
	1495	プラグ長 45mm 規格 50mm	100 mm		

【その他】コロフィルター内蔵

排出口

ワイドイージクローズ 採便袋

イージクローズ 採便袋

5重リング式ストッパー付キャップ 採尿袋



普通～硬めの便を絞り出しやすい幅広タイプの排出口です。面ファスナーで留めると簡単に排出ができます。

軟便～水様便を排出するのに適した幅の排出口です。

確実な5重リング式ストッパー付きキャップを採用。コンビニセキュアーレッグバッグやコロプラスウロナイトバッグなど各種外部蓄尿袋への接続が可能です。(製品付属のコネクターをご使用ください。)

尿路ストーマ用 单品系装具 アシュラ

※非課税

採尿袋 排出型 平面/5重リング式ストッパー付キャップ

皮膚保護剤:ニュースイスロールクリア 貼付期間の目安 3~5日



製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
アシュラ ウロバッグ U・Fitクリア (ユリナ)	14202	フリーカット	10-55 mm	100mm	10枚/箱	¥9,100 (¥910/枚)
アシュラ ウロバッグ UC・Fitクリア (ユリナ、両面カバー付)	14201	フリーカット	10-55 mm	100mm	10枚/箱	¥9,100 (¥910/枚)

【採尿袋】大きさ:270×180 mm 仕切構造 逆流防止弁あり 5層防臭フィルム アシュラウロコネクター3個
外部蓄尿袋との接続可能(P75~77をご覧ください)

製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
アシュラ ウロバッグ	5585	フリーカット	10-55 mm	100mm	10枚/箱	¥8,400 (¥840/枚)

【採尿袋】大きさ:275×160 mm 逆流防止弁あり 5層防臭フィルム アシュラウロコネクター3個
外部蓄尿袋との接続可能(P75~77をご覧ください)

採尿袋 排出型 凸面 [高さ5mm] ライトコンベックス/5重リング式ストッパー付キャップ

皮膚保護剤:ニュースイスロールクリア 貼付期間の目安 3~5日



製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
アシュラ ウロバッグU・Fitクリア LC (ユリナ、ライトコンベックス付)	14704	フリーカット	15-33 mm	110mm	10枚/箱	¥12,300 (¥1,230/枚)
	14702	フリーカット	15-43 mm	110mm		
アシュラ ウロバッグUC・Fitクリア LC (ユリナ、両面カバー、 ライトコンベックス付)	14703	フリーカット	15-33 mm	110mm	10枚/箱	¥12,300 (¥1,230/枚)
	14701	フリーカット	15-43 mm	110mm		

【採尿袋】大きさ:270×180 mm 仕切構造 逆流防止弁あり 5層防臭フィルム アシュラウロコネクター3個
ベルト固定用タブ付 外部蓄尿袋との接続可能(P75~77をご覧ください)

採尿袋 排出型 凸面 [高さ7mm] エーコンベックス/5重リング式ストッパー付キャップ

皮膚保護剤:ニュースイスロール 貼付期間の目安 2~4日



製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
アシュラ ウロバッグ ACフリー (エーコンベックス付)	12595	フリーカット	15-33 mm	110mm	6枚/箱	¥6,300 (¥1,050/枚)
	12596	フリーカット	15-43 mm	110mm		
アシュラ ウロバッグ AC (エーコンベックス付)	12991	プレカット	15 mm	110mm	6枚/箱	¥6,300 (¥1,050/枚)
	12992	プレカット	18 mm	110mm		
	12993	プレカット	21 mm	110mm		
	12994	プレカット				

消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 アシュラ

※非課税

※非課税

面板 平面／ダブルロック方式カップリング

製品名	製品番号	フランジ径	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
アシュラ セルフプレート ER	13141	● 40 mm	フリーカット	10-35 mm	100 mm	5枚/箱	¥3,450 (¥690/枚)
	13151	● 50 mm	フリーカット	10-45 mm	100 mm		
	13161	● 60 mm	フリーカット	10-55 mm	110 mm		
	13144	● 40 mm	プレカット	25 mm	100 mm		
	13152	● 50 mm	プレカット	30 mm	100 mm		
	13153	● 50 mm	プレカット	35 mm	100 mm		

ベルト固定用タブ付

製品名	製品番号	フランジ径	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
アシュラ セルフプレート T	2881	● 40 mm	フリーカット	10-35 mm	100 mm	5枚/箱	¥3,450 (¥690/枚)
	2882	● 50 mm	フリーカット	10-45 mm	100 mm		
	2883	● 60 mm	フリーカット	10-55 mm	110 mm		
	12841	● 40 mm	プレカット	20 mm	100 mm		
	12842	● 40 mm	プレカット	25 mm	100 mm		
	12844	● 50 mm	プレカット	30 mm	100 mm		
アシュラ セルフプレート G *	12845	● 50 mm	プレカット	35 mm	100 mm	5枚/箱	¥3,450 (¥690/枚)
	12847	● 60 mm	プレカット	40 mm	110 mm		
	12848	● 60 mm	プレカット	45 mm	110 mm		
	13014	● 40 mm	フリーカット	10-35 mm	100 mm		
	13015	● 50 mm	フリーカット	10-45 mm	100 mm		
	13016	● 60 mm	フリーカット	10-55 mm	110 mm		

ベルト固定用タブ付

製品名	製品番号	フランジ径	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
アシュラ セルフプレート クリアー	2831	● 40 mm	フリーカット	10-35 mm	100 mm	5枚/箱	¥3,700 (¥740/枚)
	2832	● 50 mm	フリーカット	10-45 mm	100 mm		
	2833	● 60 mm	フリーカット	10-55 mm	110 mm		
	14250	● 40 mm	プレカット	15 mm	100 mm		
	14251	● 40 mm	プレカット	20 mm	100 mm		
	14252	● 40 mm	プレカット	25 mm	100 mm		
アシュラ セルフプレート クリアー	14254	● 50 mm	プレカット	30 mm	100 mm	5枚/箱	¥3,700 (¥740/枚)
	14255	● 50 mm	プレカット	35 mm	100 mm		
	14257	● 60 mm	プレカット	40 mm	110 mm		
	14258	● 60 mm	プレカット	45 mm	110 mm		

ベルト固定用タブ付

製品名	製品番号	フランジ径	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
アシュラ セルフプレート LC(ライトコンベックス付)	14261	● 40 mm	フリーカット	15-23 mm	110 mm	5枚/箱	¥4,200 (¥840/枚)
	14262	● 50 mm	フリーカット	15-33 mm	110 mm		
	14263	● 60 mm	フリーカット	15-43 mm	110 mm		
	14271	● 40 mm	プレカット	18 mm	110 mm		
	14272	● 40 mm	プレカット	21 mm	110 mm		
	14273	● 50 mm	プレカット	25 mm	110 mm		
アシュラ セルフプレート LC(ライトコンベックス付)	14274	● 50 mm	プレカット	28 mm	110 mm		
	14275	● 50 mm	プレカット	31 mm	110 mm		
	14276	● 60 mm	プレカット	35 mm	110 mm		
	14277	● 60 mm	プレカット	38 mm	110 mm		
	14278	● 60 mm	プレカット	41 mm	110 mm		

ベルト固定用タブ付

面板 凸面 [高さ5mm] ライトコンベックス／ダブルロック方式カップリング

製品名	製品番号	フランジ径	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
アシュラ セルフプレートクリアーエーコンベックス付	14281	● 40 mm	フリーカット	15-23 mm	110 mm	5枚/箱	¥4,950 (¥990/枚)
	14282	● 50 mm	フリーカット	15-33 mm	110 mm		
	14283	● 60 mm	フリーカット	15-43 mm	110 mm		
	14291	● 40 mm	プレカット	18 mm	110 mm		
	14292	● 40 mm	プレカット	21 mm	110 mm		
	14293	● 50 mm	プレカット	25 mm	110 mm		
アシュラ セルフプレートクリアーエーコンベックス付	14294	● 50 mm	プレカット	28 mm	110 mm		
	14295	● 50 mm	プレカット	31 mm	110 mm		
	14296	● 60 mm	プレカット	35 mm	110 mm		
	14297	● 60 mm	プレカット	38 mm	110 mm		
	14298	● 60 mm	プレカット	41 mm	110 mm		

ベルト固定用タブ付

面板 凸面 [高さ7mm] エーコンベックス／ダブルロック方式カップリング

製品名	製品番号	フランジ径	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
アシュラ セルフプレート AC(エーコンベックス付)	12716	● 50 mm	フリーカット	15-33 mm	110 mm	4枚/箱	¥3,360 (¥840/枚)
	12719	● 60 mm	フリーカット	15-43 mm	110 mm		
	12701	● 40 mm	プレカット	15 mm	110 mm		
	12702	● 40 mm	プレカット	18 mm	110 mm		
	12703	● 40 mm	プレカット	21 mm	110 mm		
	12704	● 50 mm	プレカット	25 mm	110 mm		
アシュラ セルフプレート AC(エーコンベックス付)	12705	● 50 mm	プレカット	28 mm	110 mm		
	12706	● 50 mm	プレカット	31 mm	110 mm		
	12707	● 60 mm	プレカット	35 mm	110 mm		
	12708	● 60 mm	プレカット	38 mm	110 mm		
	12709	● 60 mm	プレカット	41 mm	110 mm		

ベルト固定

消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 アシュラ

※非課税

採便袋 開放型／ダブルロック方式カップリング



製品名	製品番号	フランジ径	包装単位	本体価格*
アシュラII ロックパウチ ワイドEC (ワイドイージクローズ)	15974	● 40 mm	10枚/箱	¥3,900 (¥390/枚)
	15975	● 50 mm		
	15976	● 60 mm		
アシュラII ロックパウチ ワイドEC・C (ワイドイージクローズ、 両面カバー付)	15984	● 40 mm	10枚/箱	¥3,900 (¥390/枚)
	15985	● 50 mm		
	15986	● 60 mm		

【採便袋】大きさ:290×145 mm 排出口幅:80 mm ワイド活性炭フィルター 5層防臭フィルム



製品名	製品番号	フランジ径	包装単位	本体価格*
アシュラII ロックパウチ EC(イージクローズ)	13974	● 40 mm	30枚/箱	¥10,500 (¥350/枚)
	13975	● 50 mm		
	13976	● 60 mm		
アシュラII ロックパウチ EC・C(イージクローズ、 両面カバー付)	13984	● 40 mm		¥10,500 (¥350/枚)
	13985	● 50 mm		
	13986	● 60 mm		

【採便袋】大きさ:290×145 mm 排出口幅:66 mm ワイド活性炭フィルター 5層防臭フィルム



製品名	製品番号	フランジ径	包装単位	本体価格*
アシュラ ロックパウチ D (ドレン)	2792	● 50 mm	10枚/箱	¥3,800 (¥380/枚)
	2793	● 60 mm		

【採便袋】大きさ:290×145 mm 5層防臭フィルム ワイヤークリップ ドレンクリップ

採便袋 閉鎖型／ダブルロック方式カップリング



製品名	製品番号	フランジ径	フィルター	包装単位	本体価格*
アシュラII ロックパウチ CC (クローズ、両面カバー付)	12364	● 40 mm	ワイルド活性炭	10枚/箱	¥3,550 (¥355/枚)
	12365	● 50 mm			
	12366	● 60 mm			
アシュラ ロックパウチ M (ミニキャップ)	2801	● 40 mm	高性能脱臭	10枚/箱	¥3,150 (¥315/枚)
	2802	● 50 mm			
	2803	● 60 mm			

【採便袋】大きさ:12364・12365・12366 185×135 mm / 2801・2802・2803 110×110 mm 5層防臭フィルム

採尿袋 排出型／5重リング式ストッパー付キャップ／ダブルロック方式カップリング



製品名	製品番号	フランジ径	包装単位	本体価格*
アシュラ ロックパウチ U・Fit(ユリナ)	14227	● 40 mm	10枚/箱	¥7,500 (¥750/枚)
	14228	● 50 mm		
	14229	● 60 mm		
アシュラ ロックパウチ UC・Fit (ユリナ、両面カバー付)	14224	● 40 mm	10枚/箱	¥7,500 (¥750/枚)
	14225	● 50 mm		
	14226	● 60 mm		

【採尿袋】大きさ:270×180 mm 仕切構造 逆流防止弁あり アシュラウロコネクター3個
外部蓄尿袋との接続可能(P75~77をご覧くださいをご覧ください)

製品名	製品番号	フランジ径	包装単位	本体価格*
アシュラ ロックパウチ U (ユリナ)	1757	● 40 mm	10枚/箱	¥7,500 (¥750/枚)
	1758	● 50 mm		
	1759	● 60 mm		

【採尿袋】大きさ:275×160 mm 逆流防止弁あり 5層防臭フィルム アシュラウロコネクター3個
外部蓄尿袋との接続可能(P75~77をご覧くださいをご覧ください)

その他関連製品

※非課税

術直後用 瘢孔管理用 / その他関連製品

術直後用 排出型 平面 / 大型キャップ式

製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ ミオ1 ポストオペ 滅菌済 (ウインドー付)	18680	フリーカット	10-70 mm	130×140 mm	5枚 / 箱	¥8,500 (¥1,700/枚)
	18681	フリーカット	10-100 mm	160×170 mm	5枚 / 箱	¥9,000 (¥1,800/枚)

製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ ミオ1 ポストオペ 未滅菌 (ウインドー付)	18690	フリーカット	10-70 mm	130×140 mm	5枚 / 箱	¥6,000 (¥1,200/枚)
	18691	フリーカット	10-100 mm	160×170 mm	5枚 / 箱	¥6,500 (¥1,300/枚)

【採便袋】大きさ:18680・18690:320×150 mm / 18681・18691:320×180 mm
最大容量:18680・18690:ISO規格680ml / 18681・18691:ISO規格725ml 7層防臭フィルム
排液バッグ(外径接続型)に接続が可能(下記「排液バッグ」をご覧ください)

術直後用 面板 平面 排出型 大型キャップ式

製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ1 ポストオペ 未滅菌(ウインドー付)	19020	フリーカット	10-78 mm	110×130 mm	3枚 / 箱	¥3,600 (¥1,200/枚)
	19021	フリーカット	10-115 mm	150×170 mm	3枚 / 箱	¥3,900 (¥1,300/枚)

【面板】最大有効径:19020:上下68mm・左右78mm / 19021:上下105mm・左右115mm

【採便袋】大きさ:19020:182×160mm / 19021:342×182mm
5層防臭フィルム 固定型ウインドー付 ワイヤークリップ有
排液バッグ(外部接続型)に接続可能(下記「排液バッグ」をご覧ください)

術直後用 面板 平面 粘着式カップリング

製品名	製品番号	開口部	ディスク内径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
センシュラ フレックスプレート	10108	フリーカット	● 90 mm	10-88 mm	150×170 mm	5枚 / 箱

術直後用 開放型／一体成型ワイドイージクローズ

製品名	製品番号	ディスク内径	包装単位	本体価格*
センシュラ フレックス バッグ	11590	● 90 mm	10枚 / 箱	¥4,200 (¥420/枚)

【採便袋】大きさ:310×165 mm 排出口幅:80 mm ハ

その他関連製品

灌注排便用

灌注排便用／アシュラ イリゲーション セット



製品名	製品番号	製品写真	法兰ジ径	包装単位	税込価格
アシュラ イリゲーション セット	12830	①②③④	● 60 mm	1セット/箱	¥11,000

医療機器届出番号: 13B1X00067000001 一般的名称: ストーマ用洗浄キット 一般医療機器
ポーチ・アシュラKミニキャップ2枚・アシュラベルト

製品名	製品番号	製品写真	法兰ジ径	包装単位	税込価格
アシュラ イリゲーション スリーブ	12834		● 40 mm		
	12835		● 50 mm	5枚/袋	¥3,300 (¥660/枚)
	12836	①	● 60 mm		

製品名	製品番号	製品写真	法兰ジ径	包装単位	税込価格
コロプラス	1511	②		1枚/袋	¥4,950

医療機器届出番号: 13B1X00067000001 一般的名称: ストーマ用洗浄キット 一般医療機器
水温表示付 注入速度の分かる水車式流量計付

製品名	製品番号	製品写真	法兰ジ径	包装単位	税込価格
コロチップ	1110	③		1個/袋	¥2,200

医療機器届出番号: 13B1X00067000001 一般的名称: ストーマ用洗浄キット
ストーマに優しい柔軟素材

製品名	製品番号	製品写真	法兰ジ径	包装単位	税込価格
アシュラ イリゲーション プレート	12820	④	● 60 mm	1枚/袋	¥1,650

アシュラ イリゲーション セット 内容



新生児～小児用

二品系装具

面板 平面／粘着式カップリング

※非課税
皮膚保護剤:イージフレックス キッズ用 貼付期間の目安 1日または 3～4日

製品名	製品番号	開口部	ディスク内径	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
イージフレックス キッズ プレート	14307	フリーカット	17 mm	0-15 mm	60 mm	10枚/箱	¥3,000 (¥300/枚)
	14308	フリーカット	27 mm	0-25 mm	70 mm		

採便袋 開放型／粘着式カップリング

製品名	製品番号	ディスク内径	採便袋大きさ	包装単位	本体価格*
イージフレックス キッズバッグ EC	14681	17 mm	198×85 mm	10枚/袋	¥2,500 (¥250/枚)
	14682	27 mm	213×95 mm		
イージフレックス キッズバッグ EC-C (両面カバー付)	14691	17 mm	198×85 mm	10枚/袋	¥2,500 (¥250/枚)
	14692	27 mm	213×95 mm		

【採便袋】ワイド活性炭フィルター(スポンジなし) 5層防臭フィルム

面板／ダブルロック方式カップリング

皮膚保護剤:ニュースイスロールER 貼付期間の目安 1日または 3～4日

製品名	製品番号	法兰ジ径	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
アシュラ キッズ2 セルフプレートER	13149	● 40 mm	フリーカット	10-35 mm	83 mm	5枚/箱	¥2,650 (¥530/枚)

ベルト固定用タブ付

採便袋・採尿袋／ダブルロック方式カップリング

製品名	製品番号	法兰ジ径	形状	採便袋大きさ	包装単位	本体価格*
アシュラ キッズ2 ロックパウチD(ドレイン)	2156	● 40 mm	開放型	210×140 mm	10枚/箱	¥3,400 (¥340/枚)
アシュラ キッズ2 ロックパウチC(クローズ)	2166	● 40 mm	閉鎖型	150×140 mm	10枚/箱	¥3,200 (¥320/枚)
アシュラ キッズ2 ロックパウチU(ユリナ)	1789	● 40 mm	排出型	215×140 mm	10枚/箱	¥6,700 (¥670/枚)

【採便・採尿袋】5層防臭フィルム

2156: ドレンクリップ ワイヤークリップ

2166: 高性能脱臭フィルター

1789: 5重リング式ストッパー付きキャップ/逆流防止弁あり/アシュラウロコネクター3個

単品系装具

採便袋 平面 開放型

製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
アシュラ キッズ1 スタンダード	2115	フリーカット	10-35 mm	83 mm	10枚/箱	¥3,900 (¥390/枚)

【採便袋】大きさ:210×140 mm 5層防臭フィルム ワイヤークリップ

採便袋 平面 閉鎖型

製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
アシュラ キッズ1 クローズ	2125	フリーカット	10-35 mm	83 mm	10枚/箱	¥3,100 (¥310/枚)

【採便袋】大きさ:150×140 mm 5層防臭フィルム 高性能脱臭フィルター

採尿袋 平面 排出型／5重リング式ストッパー付キャップ

製品名	製品番号	開口部	開口部径	面板大きさ	包装単位	本体価格*
アシュラ キッズ1 ウロバッグ	8009	フリーカット	10-35 mm	83 mm	10枚/箱	¥6,700 (¥670/枚)

【採尿袋】大きさ:215×140 mm 5層防臭フィルム 逆流防止弁あり アシュラ ウロコネクター 3個

コロプラスについて

ストーマケア

センシュラミオ

センシュラ

アシュラ

アセサリー

コンチネンスケア

索引

Accessory

アクセサリーシリーズ



コロプラスチストはストーマ装具だけではなく、
ストーマ保有者の快適な生活の実現をサポートする
幅広いアクセサリーをご用意しています。

ストーマ保有者は様々な課題と共に日々の生活を送っています。
それらの課題を解決し、より快適な生活を過ごしていただくため、
コロプラスチストは3つのアクセサリー・ブランドをご用意しております。



漏れを防ぐ ブラバ ▶ P54～

Brava®



皮膚を守る ブラバ、シルティ ▶ P58／P64～

Brava® Silty®



臭いを消す デオール ▶ P60～

Deol®



ブラバ プロテクティブシール

ダブルプロテクション

—— 吸水性と耐久性を向上

ブラバ プロテクティブシールは、従来品よりも吸水性と耐久性を高め*、排泄物から皮膚を守るよう設計されています。また、成形しやすく、取扱いが簡単になりました。

* ポリマーの構成を工夫したことにより、水分に触れても皮膚保護剤の形状を維持します。



ダブルプロテクション

- 1 漏れを防ぎます
ストーマ周囲の皮膚と面板のすき間にしっかりと密着します。水分に強く、漏れを防ぎます。
- 2 皮膚を保護します
吸水性と耐久性の向上により、皮膚を保護し、皮膚を正常な状態に保つことができます。

使いやすさ

- 1 しわやくぼみにフィットします
ブラバ プロテクティブシールは成形しやすく、しわやくぼみのあるストーマ周囲の皮膚にフィットします。
- 2 しっかり密着し、溶け崩れません
溶け崩れにくく、皮膚からきれいに剥がすことができます。

豊富なサイズで「1枚貼り」のシンプルケア

ブラバ プロテクティブシールは2種類の厚みと3種類の内径の8製品があり、ストーマ周囲皮膚の様々な状況に対応できます。豊富なサイズ展開により、使用時に、ちぎる、こねる等の作業が必要なく、「1枚貼り」のシンプルケアを実現できます。



ご使用されたストーマ保有者のお声です

“カットせずに使って便利かつ皮膚トラブルもなかった”（男性）

“他のペーストなどより明らかに耐久性があり、また切って成形もしやすく、とても使用感はいいと思います”（男性）

“手間がかからず剥離しやすかった”（男性）

“周囲を補強できて漏れの心配もなく、仕事に集中できました”（女性）

“成形しやすく、肌へののり残りもなく利用できた”（女性）

※上記は個人による感想であり、効果・効能を示すものではありません。

使い方

ブラバ プロテクティブシールを装着する前に、ストーマ周囲の皮膚が清潔で乾いていることを確認します。

1枚貼り：ストーマ周囲全周に貼付する方法


ストーマ近接部に直接貼付する場合と、面板に貼付する場合があります。



剥離タブの真ん中をハサミなどでカットします。

剥離ライナーを剥がします。

使用したい長さに伸ばします。

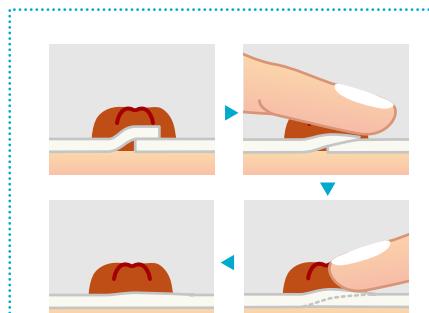

注意点

断端部は重ね合わせて指で押さえつけながら、なだらかになるよう、なじませます。

部分使い：くぼみ部分に貼付する方法



使用したい適量をカットしてから剥離ライナーを剥がします。

使用したいくぼみ部分に貼付します。

くぼみが深い場合は、二重に折るなどして厚みを調整します。
あるいは、2.5mm厚と4.2mm厚の製品を使い分けます。

注意点


ブラバ プロテクティブシールと皮膚の境がなだらかになるよう、なじませます。（面板に貼付する場合も同様です）

布拉バ 伸縮性皮膚保護テープ

皮膚を保護しながら
腹壁の動きに
伸縮して追従します。

ハイドロコロイド材のテープは、
皮膚を保護しながら腹壁の動きに
伸縮して追従し、面板辺縁部のめ
くれ上がりをしっかりと防止します。

身体の動きに沿って
伸縮します

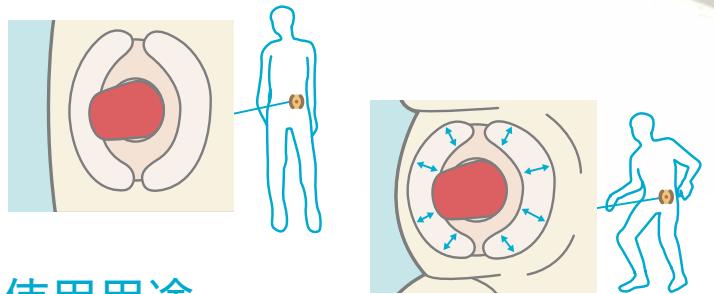


使用用途

ストーマケアにおいて

- ストーマ傍ヘルニアの管理（面板のテーピング）に
→ヘルニアに伴う皮膚伸縮の動きに合わせ、伸縮して追従
- お腹の凹凸に
→しなやかに凹凸に追従
- 日常生活の安心に
→入浴や活動時も安心の貼付

ご使用にあたり

- 全面皮膚保護剤の面板に合わせて使用します。外周部に粘着テープがついた製品には適しません。（図1）
- 医療用テープと使用方法が異なります。面板（皮膚保護剤）の交換に合わせて一緒に交換してください。（図2）
- 剥がす際は皮膚から愛護的に剥がしてください。布拉バ粘着剝離剤などを使用すると、より簡単に剥がせます。

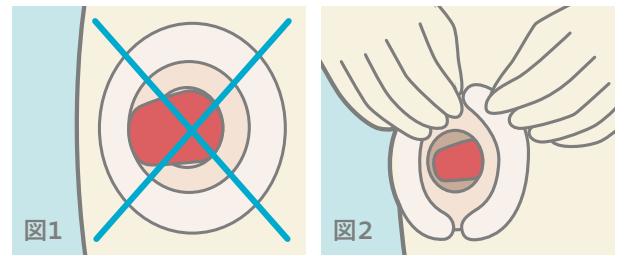

※写真はイメージです。

ストーマケア以外の分野でも

- NPPVマスク装着時の圧迫防止など医療関連
機器圧迫創傷の防止に
(褥瘡会誌第18巻(1):P46-P49,2016)
※これらは本製品の使い方の一例です。



用手成形皮膚保護剤

布拉バプロテクティブシールは、ポリマーの構成を工夫したことにより、従来品よりも吸水性と耐久性を高め、水分に触れても形状を維持します。初期タックが強く、排泄物、排液及び分泌物の多いストーマや瘻孔周囲の使用にも適しています。

製品名	製品番号	厚み	内径	外径	包装単位	税込価格
布拉バプロテクティブシール	12032	2.5mm	18mm	76mm	10枚/箱	¥5,500 (¥550/枚)
	12033	2.5mm	27mm	76mm		
	12035	2.5mm	18mm	48mm		
	12037	2.5mm	27mm	57mm	10枚/箱	¥3,300 (¥330/枚)
	12039	2.5mm	34mm	64mm		
	12045	4.2mm	18mm	48mm		
	12047	4.2mm	27mm	57mm	10枚/箱	¥5,280 (¥528/枚)
	12049	4.2mm	34mm	64mm		

●成分：カルボキシビニルポリマー、HEC、PIB、EVA、ポリブテンおよび脂肪族炭化水素混合物



1枚貼りのシンプルケアで皮膚を守り、漏れを防ぎます。

手で簡単にストーマサイズに広げることができ、装具装着に手間がかかりません。

ストーマ周囲の径の動きに合わせて伸縮し追従するため、皮膚を排泄物から守り、漏れを防ぎます。

製品名	製品番号	規格	包装単位	税込価格
布拉バ モルダブルリング	12030	厚み 2.0 mm / 外径 48 mm	10枚/箱	¥2,420 (¥242/枚)
	12042	厚み 4.2 mm / 外径 48 mm	10枚/箱	¥4,950 (¥495/枚)

●成分：CMC、ゼラチン、ペクチン、HEC、PIB、EVA

練状皮膚保護剤



アルコールフリーなので、肌に刺激が少なく、アルコール揮発の手間も不要です。

力のいらないラミネートチューブは、キャップを下に立てて置けるので、高齢の方でも簡単に絞り出せます。

製品名	製品番号	規格	包装単位	税込価格
布拉バペースト	12050	60 g /本	1本/箱	¥2,860

●成分：脂肪族炭化水素混合物、CMC、炭水化物混合物

※絞り出し用スティック 1本付

高伸縮固定用皮膚保護テープ



製品名	製品番号	規格	包装単位	税込価格
① ブラバ伸縮性皮膚保護テープ	12070	幅 3 cm、直径 14 cm	20枚/箱	¥2,816 (¥140.8/枚)
② ブラバ伸縮性皮膚保護テープ ベルト型	12072	幅 3.3 cm、直径 14.5 cm (ベルト部分 7.8 cm)	20枚/箱	¥2,970 (¥148.5/枚)
③ ブラバ伸縮性皮膚保護テープ ストレート型	12074	幅 4 cm、長さ 13.3 cm	20枚/箱	¥1,980 (¥99/枚)
④ ブラバ伸縮性皮膚保護テープ XL	12076	幅 4.4 cm、直径 17 cm	20枚/箱	¥2,970 (¥148.5/枚)

●成分：CMC、スターチ、SIS、レジン、DOA

練状皮膚保護剤



使用する部位の形状に合わせて自由に形を整えることができます。必要なとき、必要な量をムダなく使用できます。アルコールを含まず、皮膚刺激がありません。また、固まりにくいので皮膚に残らず、きれいに取り除けます。

製品名	製品番号	規格	包装単位	税込価格
プラバ スティックペースト	2655	6 g /本	10本/箱	¥2,200 (¥220/本)

●成分: CMC、ベクチン、グーガム

板状皮膚保護剤



伸縮性と柔軟性に優れ、しわやくぼみにも密着して漏れを防ぎます。排泄物・排液・分泌物の多いストーマや瘻孔周囲の使用に適しています。ウエハーの上面はフィルムコーティングされているので、パウチングやドレーンチューブが簡単に固定できます。

製品名	製品番号	規格	包装単位	税込価格
3210	10×10 cm		10枚/箱	¥7,920 (¥792/枚)
3215	15×15 cm		5枚/箱	¥7,260 (¥1,452/枚)
3220	20×20 cm		5枚/箱	¥12,045 (¥2,409/枚)

●成分: CMC、SIS、ポリクロペンタジエン、DOA

皮膚を守る

粘着剥離剤



プラバ 粘着剥離剤スプレー、ワイプともに、面板やのり残り、また各種粘着剤の間に浸透し、浮き上がらせて剥がします。アルコール不使用・オイル不使用のため皮膚をやさしくケアできます。逆さでも噴射可能です。

製品名	製品番号	規格	包装単位	税込価格
プラバ 粘着剥離剤スプレー	12010	50 ml /本	1本/箱	¥2,750

●成分: ヘキサメチルジシロキサン

製品名	製品番号	規格	包装単位	税込価格
プラバ 粘着剥離剤ワイプ	12011	3.9 ml /枚	30袋/箱	¥4,125 (¥137.5/枚)

●成分: ヘキサメチルジシロキサン、不織布

皮膚被膜剤



プラバ 皮膚被膜剤スプレー、ワイプともに、皮膚に厚みを感じさせず、つっぱり感のない被膜を形成して排泄物の接触や粘着剤の剥離などから皮膚を守ります。さらに、速乾性があり、粘着剤をすぐに貼付できます。アルコール不使用・オイル不使用です。

製品名	製品番号	規格	包装単位	税込価格
プラバ 皮膚被膜剤スプレー	12020	50 ml /本	1本/箱	¥2,178

●成分: ヘキサメチルジシロキサン

製品名	製品番号	規格	包装単位	税込価格
プラバ 皮膚被膜剤ワイプ	12021	3.9 ml /枚	30袋/箱	¥4,125 (¥137.5/枚)

●成分: ヘキサメチルジシロキサン、不織布

粉状皮膚保護剤



排泄物中の水分や滲出液を吸収し、ゲル状になることで皮膚保護剤を補助します。ストーマと面板開口部の隙間に充填し、排泄物が直接皮膚に接触することを防ぎます。またストーマ周囲の滲出液部分に噴霧して吸収させ、面板装着を助けます。押しやすく的確に充填できる噴射口を採用しています。

製品名	製品番号	規格	包装単位	税込価格
プラバ パウダー	1907	25 g /本	1本/箱	¥1,100

●成分: CMC、グーガム、キサンタンガム

その他のアクセサリー

板状皮膚保護剤



プラバ ウエハーをリング状にカットしたものです。各種サイズがありますのでストーマ周囲などにそのまま貼って使うことができます。

製品名	製品番号	規格(直径/内径)	包装単位	税込価格
コロプラスト リング	2325	55-25 mm		
	2330	60-30 mm		
	2340	65-40 mm		
	2350	70-50 mm	30枚/箱	¥7,920 (¥264/枚)

ハサミ(面板カット専用)



刃がカーブしており、曲線を切るのに適したハサミです。ストーマ袋のフィルムを傷つけないよう、刃先を丸くしました。手先の機能が低下している方でもカットが簡単にできます。

製品名	製品番号	規格	包装単位	税込価格
メジャー付ハサミ①	9020	長さ 130 mm	1本/袋	¥4,730
メジャー付ハサミ(左利き用)②	9021	長さ 145 mm	1本/袋	¥8,800

上の刃が下の刃より短いので、面板が滑りにくくカットラインに追従します。

製品名	製品番号	規格	包装単位	税込価格
ハサミSS	9505	長さ 107 mm	1本/袋	¥2,750

消臭フィルター



採便袋に貼って使用します。活性炭の作用でガス中の臭いを吸着します。バルーニングの対策におすすめです。

製品名	製品番号	規格	包装単位	税込価格
コロフィルター	0509	直径 30 mm × 厚さ 2 mm	50個/袋	¥4,125 (¥82.5/個)

開放型採便袋用 閉鎖具



製品名	製品番号	規格	包装単位	税込価格
アシュラ ドレインクリップ	9503	適用幅 7 cm	1個/袋	¥220

採尿袋用コネクター



採尿袋に付属しているコネクターの別売品。コンビーンシリーズなどの外部蓄尿袋との接続に。

製品名	製品番号	規格	包装単位	税込価格
アシュラ ウロコネクター	9804	全長 7 cm	3個/袋	¥198 (¥66/個)

ベルト



ベルト固定用タブに取りつけて使用します。長さは自由に調節できます。

色は目立つにくい色を採用、また伸縮性も大幅にアップしています。(アシュラ/センシュラ用)

製品名	製品番号	規格	包装単位	税込価格
プラバベルト	0421	3×100 cm	1本/袋	¥1,320

●ベルト部分: ナイロン、ポリウレタン フック部分: ポリプロピレン
(センシュラミオ専用ベルト、4点止め安心ベルトは、P32をご覧ください)

ストーマアクティブベルト



ストーマ装具を安定させる、ムレにくい固定ベルトです。

製品名	製品番号	規格	ベルト開口部の大きさ(直径)	胴周り	税込価格
ストーマ アクティブベルト	CS1001	S1单品系装具用	8.2-10.2cm	70-9	

デオール 消臭潤滑剤

サッと消臭、スルッと排出

植物性消臭成分が高い消臭効果を発揮し、潤滑成分が排出をスムーズにすることで、ストーマ保有者の快適な毎日をサポートします。デオール 消臭潤滑剤の消臭力・潤滑力をぜひ実感してください。

中身の残量を確認できます。



環境にも経済にもやさしい
つめかえ用も新発売



ご使用されたストーマ保有者のお声です

“滑らかで採便袋にも入れやすい”（女性）

“消臭効果が素晴らしい。便の排出口への付着が少なく、拭き取りやすい”（男性）

“パウチにへばりつくことがなく、出しやすかった”（男性）

“色付きなので、広がり具合がわかりやすかったです”（女性）

“消臭力が強く、出先トイレでの臭いの心配が無くなる”（男性）

※上記は個人による感想であり、効果・効能を示すものではありません。



消臭潤滑剤では初！

エコロジーとエコノミー、WのECOを考慮した「新たな提案」

デオール 消臭潤滑剤 つめかえ用

「使い終わると捨てるボトルがなんともないし、環境にもどうなのかしら?」というお声や、「もう少し安いと気兼ねなく使えるのに…」といったお声から生まれた「つめかえ用」のパックです。環境にもお財布にもやさしいWエコの製品です。

- その1 つめかえ用を使用することで、プラスチック廃棄量を約70%減らすことができる環境にやさしい製品です。
※本体ボトルとの重量比較
- その2 2011年2月の発売以来、多くのストーマ保有者の方にご使用いただき、そのお声を形にしています。
- その3 柿の木由来の植物成分を主成分にした自然派製品ですので、安心してお使いになれます。
- その4 たった8mlで、便臭を92%以上、ガス臭を99%以上消臭し、2時間後も効果を持続します。
- その5 消臭効果だけではなく、便のこびりつきを抑え、便の排出を容易にする潤滑効果もあわせ持つ、W効果製品です。

「つめかえ用」ご使用にあたっての注意ポイント

- ポイント① つめかえは、1回で全量200mlをつめかえてください。
- ポイント② 2-3回つめかえた後は、新しい容器（ボトル）にお取り替えください。

デオール 消臭潤滑剤の使用方法

新しいストーマ袋の装着前や、排泄物を排出した後に、デオール消臭潤滑剤 約8ml（大さじ半分程度）をストーマ袋に注入し、ストーマ袋全体に広がるように、軽くもんでなじませて使用します。
新しいストーマ袋の場合は、面板の剥離紙を剥がす前に上から注入します。
排泄物を排出した後の場合は、排出口から注入してください。

● 新しいストーマ袋の装着前



上 から入れる

● 排泄物を排出した後



下 から入れる



製品名	製品番号	規格	包装単位	税込価格
デオール 消臭潤滑剤 ボトル	9301	250ml	1本	¥3,190
デオール 消臭潤滑剤 つめかえ用	9330	200ml	1袋	¥2,178
デオール 消臭潤滑剤 ミニパック	9322	10ml / 袋	10袋 / 箱	¥1,397 (¥139.7 / 袋)

成分：精製水、植物性消臭成分（柿渋エキス）、潤滑成分、フェノキシエタノール、メチルパラベン、緑3
※本品は（財）日本食品分析センターにおいて安全性が確認されています。

製造元：セーレン株式会社 福井県福井市毛矢 1-10-1

デオール 消臭・除菌スプレー



瞬間消臭 すぐに効果を発揮し、一定期間持続します

排泄臭対策 オストメイトが特に気にする「排便臭^{※1}」を効率良く消臭、排泄臭対策ができるように設計

がん臭抑制 特殊加工した「柿タンニン」により、「がん臭^{※2}」を抑制
独特な臭気にも一定の効果を発揮

除菌効果 雜菌の繁殖を防ぎ、ニオイの元になる菌の働きを抑制

ウイルス対策 ウィルスを用いた抗ウィルス性能評価試験^{※3}において
ウィルス^{※4}が1分で99.99%減少

その他の特徴

- 無着色、無香料
- 界面活性剤配合により、ストーマ袋内の洗浄、便のこびりつきを防ぐのを助けます

用途

- ストーマ装具内、排出口、空間の消臭・除菌
- がん等の病臭の空間消臭
- 病院、介護施設、公共施設等での消臭・除菌

※1 メチルメルカプタン、硫化水素

※2 ジメチルトリスルフィド(DMTS)

※3 ASTME 1052を参考にした試験方法による試験実施：地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所

※4 ウィルス株：ATCC VR-1679（エンベロープ有）

*医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の関係上、特定のウィルス名が表記できなかったため「ウィルス」と記載しています。

*全てのウィルスに対する効果を保証するものではありません。





いずれの臭気に対しても
1分後80%以上の消臭率

M メルカプタン（排泄臭）
消臭性

硫化水素（排泄臭）
消臭性

ジメチルトリスルフィド
消臭性

6段階臭気強度表示法による
臭気強度

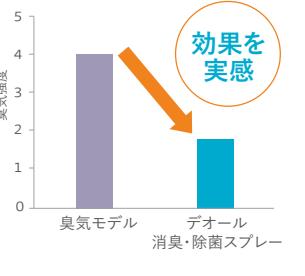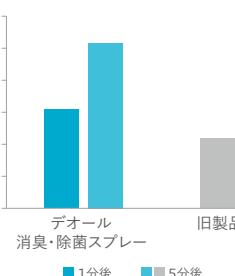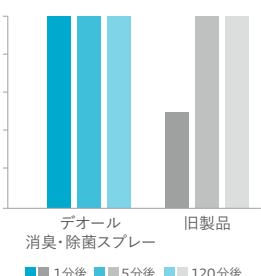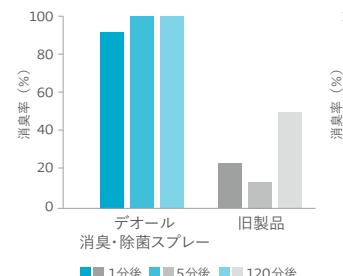

※製造元社内試験データ

「がん臭」に一定の効果

【官能評価】

6段階臭気強度表示法による
臭気強度

効果を
実感

使用方法

ブルーのストッパーを外してからストーマ袋の中へ直接スプレーしたり、空气中にスプレーしてください。
使用しないときはストッパーをはめ、立てて保管してください。

使用上の注意

- ①用途以外に使用しないでください。
- ②容器を入れ替えたり他の製品との併用は避け、本品は必ず単独で使用してください。
- ③小児の手の届かない所に保管してください。
- ④本品を直接吸い込まないでください。
- ⑤目に入った場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- ⑥誤って飲み込んだ場合は大量の水を飲んで吐き出してください。必要に応じて医師にご相談ください。
- ⑦高温及び直射日光を避け暗所の涼しい所に保管してください。
- ⑧凍結にご注意ください。
- ⑨火気に近づけないでください。
- ⑩天然成分配合のため変色することがありますが品質に問題はありません。

がん臭について

乳がん、頭頸部がんとともに分析した5名のサンプルすべてから、同じ保持時間に、がん患部の悪臭を体现する硫黄様の匂いを感じた。(中略)この物質がジメチルトリスルフィドであることが明らかになった。

引用文献: Aroma Research No.40 (Vol.10/No.4 2009)



製品名	製品番号	規格	包装単位	税込価格
デオール 消臭・除菌スプレー	9405	300ml	1本	¥2,178

製造元:セーレン株式会社 福井県福井市毛矢 1-10-1

薬用

シルティ 保湿ローション

ピュアセリシン™とセラミドNP
二つの保湿成分を配合

① バリア機能を補い肌荒れを防ぐ

- ・ピュアセリシン™とセラミドNPのW保湿成分配合
- ・抗炎症成分配合で肌荒れを防ぎます

② 皮膚へのやさしさ

- ・6つの「フリー」
 - 1) アルコール 2) 鉱物油 3) 石油系界面活性剤
 - 4) パラベン 5) 着色料 6) 香料
- ・パッチテスト、アレルギーテスト実施済^{※1}
- ・弱酸性

※1：すべての方に皮膚トラブルが起こらないということではありません。

③ 使い心地

- ・全身ケアに最適な伸び
- ・皮膚保護剤の貼付を妨げない
- ・医療用粘着剤の貼付を妨げない
- ・さらっとした使用感

※皮膚になじんだことを確認してから貼付してください。

全身ケアに最適な伸び



シルティ 保湿ローションは全身ケアに最適な伸びを実現しています。

※ 6mlで全身にご使用いただけます。(100円玉大程度が1mlの目安となります)

※ 使用目安量：1本で1カ月



製品名	製品番号	規格	包装単位	税込価格
薬用 シルティ 保湿ローション	9601	180ml	1本	¥1,078

医薬部外品



優れた貼付性



シルティ 保湿ローションはさらっとした使用感で、塗布後すぐに貼付できます。
※皮膚になじんだことを確認してから、貼付してください。


製造販売元：セーレン株式会社 福井県福井市毛矢1-10-1

モイスチャーバランスとスキンケア

「水分・脂質成分・保湿因子」を補いモイスチャーバランスを正常化するスキンケアを行うことで、皮膚の保湿を維持することにより、皮膚のバリア機能の回復を助けます。

バリア機能が低下した状態


脆弱皮膚・乾燥皮膚

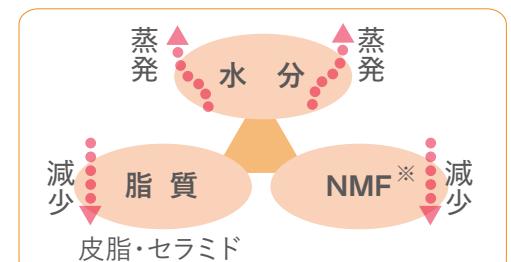


モイスチャーバランスが崩れた状態

補う


スキンケア

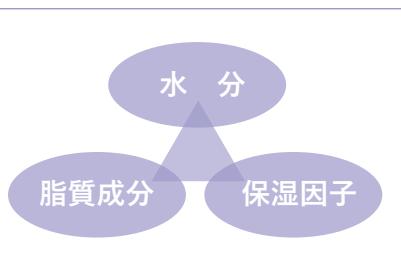

ピュアセリシン™とは、繭を守るように体を守る保湿因子

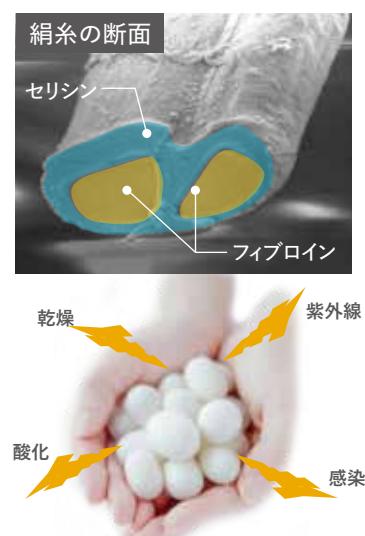

ピュアセリシン™は皮膚の天然保湿因子とそっくり

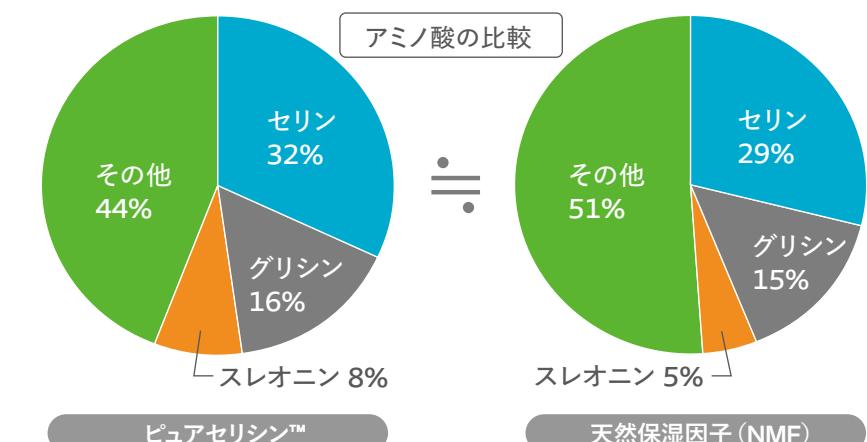

ピュアセリシン™ : Cytotechnology. 40. 3 (2002) NMF : J. Soc. Cosmet. Chem. Japan, 15. 45 (1981)

セラミドNPについて

セラミドは皮膚の一番外側の角質層にあり、細胞間脂質として肌を守るバリア機能の働きをしています。このヒト型セラミドは、ヒトの皮膚内で11種類確認されており、セラミド2(NS)、セラミド3(NP)、及びセラミド6(AP)が比較的多く含まれることが知られています¹⁾。これらセラミドは、加齢や界面活性剤などによって減少し、特にセラミド3(NP)は、加齢や敏感肌での減少が顕著であることが知られています^{2), 3)}。これらの理由により、このセラミドNPに注目しました。

1) J Invest Dermatol (1991) 96:523-526

2) Arch dermatol Res (1993) 285:415-417

3) J Invest Dermatol (2010) 130:2511-2514

シルティ 保湿ローション配合

種類	セラミド3
表示名称	セラミドNP
製法	酵母発酵法
特徴	ヒト型セラミドと同構造、皮膚への浸透性が高い
主な期待効果	水分保持機能(保湿) 皮膚のバリア機能 シワ軽減機能
年齢による影響	加齢によって減少

シルティ 水のいらないもち泡洗浄

しっかりもち泡。
手軽に拭くだけの保湿洗浄です。

天然保湿成分(ピュアセリシン™)配合の泡で皮膚にやさしく保湿洗浄・保湿清拭できる洗い流し不要の洗浄料です。液だれしない「しっかりもち泡」で、さらに使いやすくなりました。洗浄力と保湿力に優れ、アルコールフリーなので幅広い用途でお使いいただけます。

全ては皮膚への
やさしさのために。

洗浄力と保湿力の両立

洗う 泡で拭くだけ

液だれしない「しっかりもち泡」で簡単・手間いらず。すすぎ洗いも不要のため、水の確保できない災害時の使用にも適しています。

潤す 天然保湿成分配合

天然保湿成分(ピュアセリシン™)配合。しかもアルコールフリー。皮膚をしっとり潤します。

守る ピタッと皮膚に密着

皮膚を乾燥から、しっかり守ります。





アルコールフリー
無着色・無香料

まゆから生まれた天然保湿成分 ピュアセリシン™

繭(まゆ)は蚕(かいこ)を乾燥や紫外線、酸化など自然界の外的なストレスから守っていました。その「まゆ」から抽出される天然保湿成分が「ピュアセリシン™」です。その組成は皮膚の天然保湿因子と類似しており、高い保湿機能を有します。「シルティ 水のいらないもち泡洗浄」には純度100%のピュアセリシン™を配合しています。

ピュアセリシン™のアミノ酸組成

– 皮膚の天然保湿因子との高類似性 –

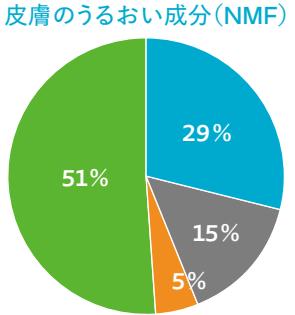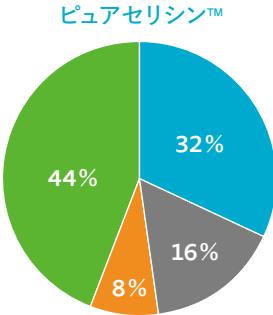

使用方法



「シルティ 水のいらないもち泡洗浄」を直接洗浄する箇所に出してください。(ガーゼやタオルに出しての使用も可能です。)

拭き取りは水に濡らしたガーゼ等でやさしく拭いてください。水などで洗い流す必要はありません。

保湿成分が、乾燥から皮膚を守ります。清拭後にテープやストーマ装具等の粘着剤を貼付する場合は、皮膚が乾いてから貼付してください。



製品名	製品番号	規格	包装単位	税込価格
シルティ 水のいらないもち泡洗浄	9401	180ml	1本	¥2,178

【化粧品】

製造販売元：セーレン株式会社 福井県福井市毛矢1-10-1

Continence Care

コンチネンスケア



コンチネンスケア製品は、
排泄管理が必要な皆様のための製品です。

男性用尿失禁管理製品

コンビーン コンドーム型収尿器

男性用尿失禁管理の選択肢

おむつよりも便利で快適

コロプラスがご提案するおむつにかわる男性用尿失禁管理の選択肢は、コンドーム型収尿器と蓄尿袋を組み合
わせてご使用いただくコンビーン シリーズです。

ペニスに直接装着するコンビーン コンドーム型収尿器を、コンビーン 外部蓄尿袋（別売り）に接続して使用します。
コンビーン コンドーム型収尿器は衛生上、1日に1回交換してください。おむつと違い、服の下で目立たず、ゴミも
減らせます。

尿失禁のある皆様に、活動的で安心な毎日をお過ごしいただくのにお役立ていただけます。



Conveen®Optima
コンビーン オプティマ



コンビーン コンドーム型収尿器 70
コンビーン 外部蓄尿袋 74

あなたに合ったコンビーン製品を選ぶ。

ニーズとライフスタイルに合わせた、最適な収尿器と蓄尿袋の組み合わせをお選びいただくことが大切です。
コンビーンシリーズは、様々な組み合わせでご利用いただくことが可能です。

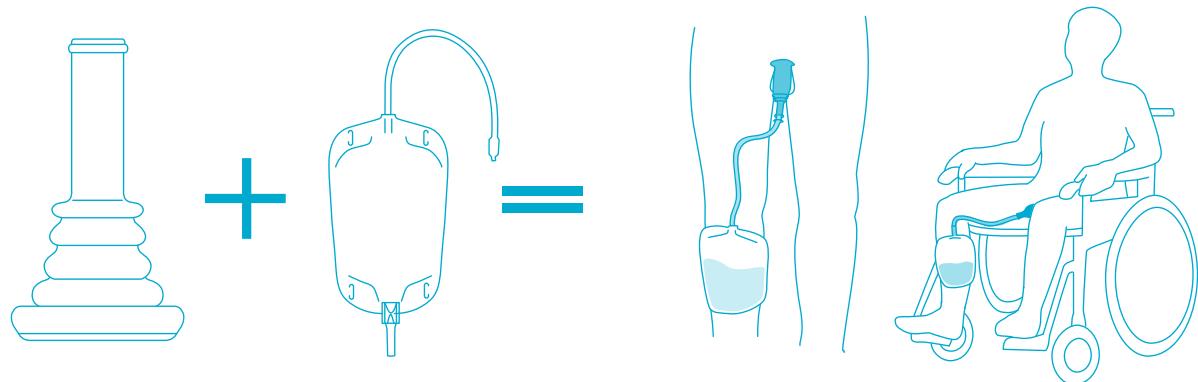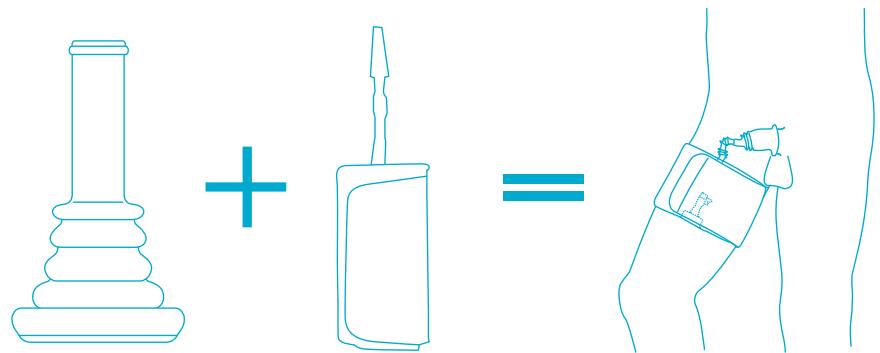

	失禁のレベル	コンドーム型収尿器	蓄尿袋
日 中	● ● ○ ○ ○ 時々、少し尿が漏れる あるいは、漏れる	コンビーン オプティマ コンビーン オプティマ E	コンビーン アクティブ レッグバッグ
	● ● ● ● ○ たくさん漏れる あるいは、 一度にコップ一杯分くらいの 量がどっと出る	コンビーン セキュアー [®] レッグバッグ 750	
夜	● ● ○ ○ ○ 時々、たくさん漏れる	コンビーン オプティマ コンビーン オプティマ E	コンビーン セキュアー [®] レッグバッグ 750
	● ● ○ ○ ○ たくさん漏れる あるいは、 一度にコップ一杯分くらいの 量がどっと出る	コンビーン ドレイナージ バッグ	

コンビーン オプティマ／オプティマ E



コンビーンオプティマは、コンパクト、軽量で、目立ちにくいシェル型パッケージに入ったコンドーム型収尿器です。ループを使って簡単に収尿器を装着できるようになりました。




- 肌に優しいシリコーン製
- 収尿器の内側に粘着剤付き
- ループの採用で、より容易に装着が可能
- テーパー部のじゃばら構造が収尿器のねじれを防ぎ、尿の流れをスムーズに


コンビーン セキュアー／セキュアー E

選択可能な2つのタイプ

アプリケーター付きで装着が簡単なワンピースタイプと、皮膚保護剤テープで固定するお肌に優しいツーピースタイプがあります。お好みのタイプとサイズにあわせてお選びいただけます。

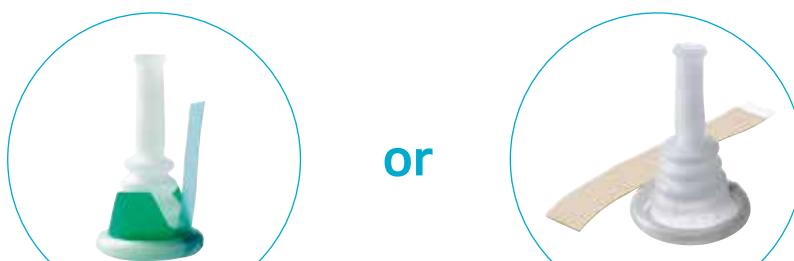


ワンピースタイプ

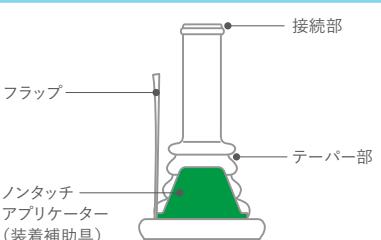

コンビーン セキュアー E コンビーン セキュアー ワンピース

- 収尿器の内側に粘着剤付き
- ペニスにかぶせフラップ(巻き上げ紙)を引くだけの簡単装着
- ノンタッチアプリケーターで、ペニスに直接触れずに装着可能
- テーパー部にじゃばら構造を採用し、ねじれを防ぎ、尿の流れがスムーズ

ツーピースタイプ

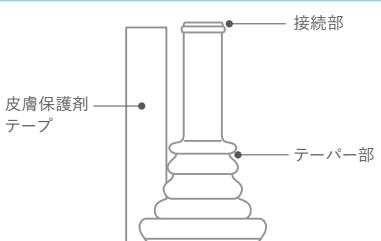


コンビーン セキュアー ツーピース

- 収尿器とハイドロコロイド製の皮膚保護剤テープ(粘着剤)のセット
- 皮膚保護剤テープをペニスに巻き、上から収尿器をかぶせる
- 皮膚保護剤テープを巻く位置を変えることで、皮膚を休ませることが可能
- テーパー部にじゃばら構造を採用し、ねじれを防ぎ、尿の流れがスムーズ



正しいサイズの選び方

直径

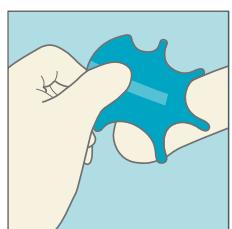

ペニスの根元から約2センチの部分の直径を測ります。迷ったときは、より小さいサイズを選びます。


長さ

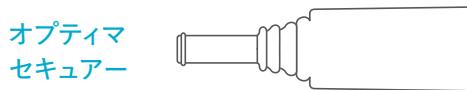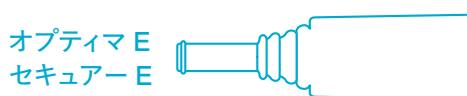


従来の収尿器では長すぎると思われるときは、E(オプティマ E、セキュア E)を選びます。

装着・使用方法


コンビーン オプティマの場合

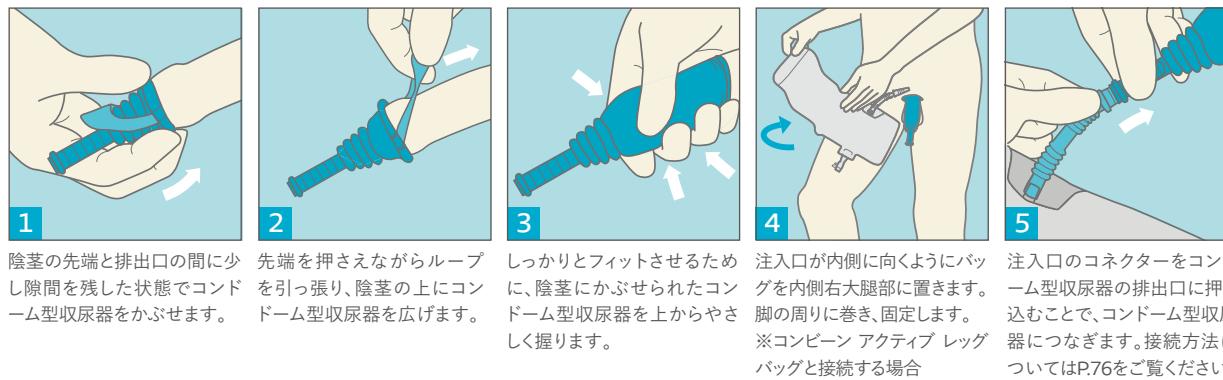

コンビーン セキュア ワンピースタイプの場合

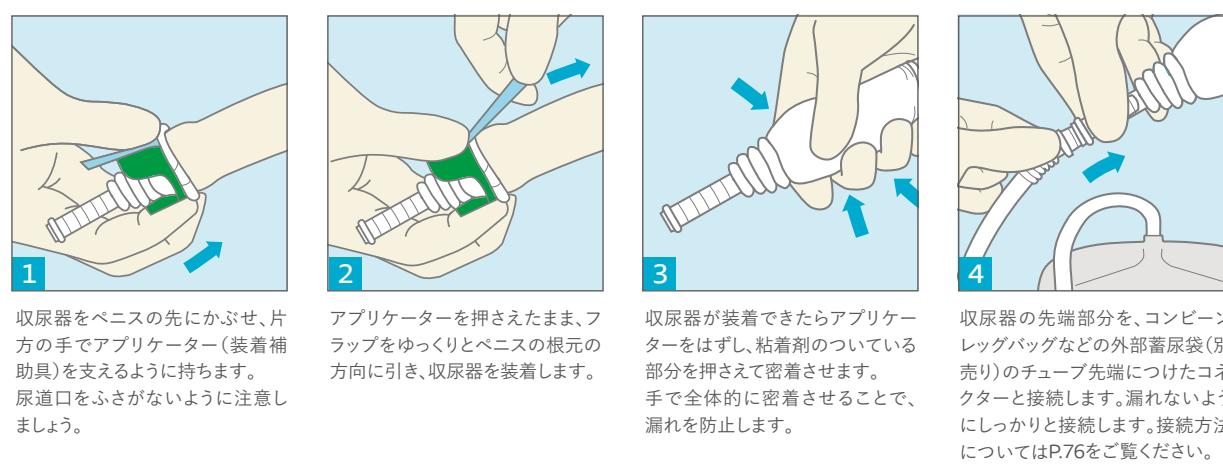

コンビーン セキュア ツーピースタイプの場合

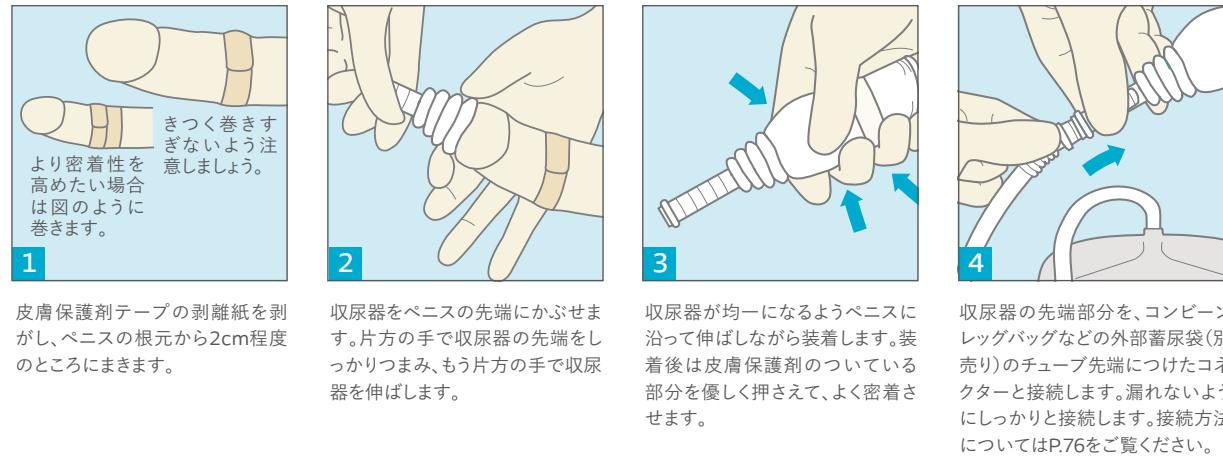

コンドーム型収尿器 コンビーン シリーズ

コンビーン オプティマ シリicone製(ラテックスフリー)



製品名	製品番号	直径	ペニス周囲	長さ	包装単位	税込価格
コンビーン オプティマ E	22121	● 21 mm	65 mm	55 mm	30個/箱	¥10,560 (¥352/個)
	22125	● 25 mm	80 mm	55 mm		
	22130	● 30 mm	95 mm	55 mm		
コンビーン オプティマ	22025	● 25 mm	80 mm	85 mm	30個/箱	¥10,560 (¥352/個)
	22028	● 28 mm	88 mm	85 mm		
	22030	● 30 mm	95 mm	85 mm		
コンビーン オプティマ	22035	● 35 mm	110 mm	85 mm		¥10,560 (¥352/個)

● 本体材質:シリコーン



コンビーン セキュア E 熱可塑性エラストマー製(ラテックスフリー) ワンピースタイプ



製品名	製品番号	直径	ペニス周囲	長さ	包装単位	税込価格
コンビーン セキュア E ノンタッチアプリケーター付 (収尿器の裏側に粘着剤付)	22011	● 21 mm	65 mm	50 mm	30個/箱	¥6,600 (¥220/個)
	22012	● 25 mm	80 mm	50 mm		
	22013	● 30 mm	95 mm	50 mm		


● 本体材質:熱可塑性エラストマー

コンビーン セキュア 熱可塑性エラストマー製(ラテックスフリー) ワンピースタイプ/ツーピースタイプ



製品名	製品番号	直径	ペニス周囲	長さ	包装単位	税込価格
コンビーン セキュア ワンピース ノンタッチアプリケーター付 (収尿器の裏側に粘着剤付)	52214	● 21 mm	65 mm	82 mm	15個/箱	¥4,950 (¥330/個)
	52254	● 25 mm	80 mm	82 mm		
	52304	● 30 mm	95 mm	82 mm		
	52354	● 35 mm	110 mm	82 mm		
コンビーン セキュア ツーピース 収尿器と皮膚保護剤テープのセット	5025	25 mm	80 mm	82 mm	30個/箱	¥6,600 (¥220/個)
	5030	30 mm	95 mm	82 mm		
	5035	35 mm	110 mm	82 mm		

● 本体材質:熱可塑性エラストマー

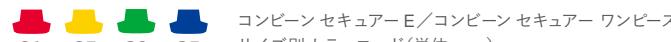

コンビーン ラテックス(天然ゴム)製 ワンピースタイプ/ツーピースタイプ



製品名	製品番号	直径	ペニス周囲	長さ	包装単位	税込価格
コンビーン ワンピース ノンタッチアプリケーター付 (収尿器の裏側に粘着剤付)	5212	20 mm	65 mm	82 mm	30個/箱	¥9,900 (¥330/個)
	5200	25 mm	80 mm	82 mm		
	5205	30 mm	95 mm	82 mm		
	5210	35 mm	110 mm	82 mm		
コンビーン ツーピース 収尿器と皮膚保護剤テープのセット	5125	25 mm	80 mm	82 mm	30個/箱	¥6,600 (¥220/個)
	5130	30 mm	95 mm	82 mm		
	5135	35 mm	110 mm	82 mm		

● 本体材質:天然ゴム

使用上の注意(コンビーン オプティマ E/コンビーン オプティマ/コンビーン セキュア E/コンビーン セキュア/コンビーン)

- 本品はディスポーザブル製品です。再使用はしないでください。
- 衛生上、毎日交換してください。
- 皮膚に異常が見られた場合は、使用を避けてください。
- トイレがつまりる原因となりますので、使用後の製品は決してトイレには流さないでください。収尿器とパッケージは一般的の燃えるごみとして捨てることができますですが、それぞの自治体のごみ廃棄方法に従ってください。

コンビーン 外部蓄尿袋

毎日の生活をより活動的に、安心して過ごすための蓄尿袋


目立たず安心

コロプラスのコンビーン蓄尿袋は、皆様の毎日の生活をより活動的に、安心してお過ごしいただけるように開発されています。レッグバッグシリーズは、バンドや付属のベルトで脚に固定して使用できますので、体動を妨げず、転倒の危険なども防止できます。また、服の下で目立ちにくく、外出やスポーツなど日々の活動を安心して楽しめます。

夜間には大容量バッグを使用することで長時間安眠できます。


Conveen® Active

コンビーン アクティブ

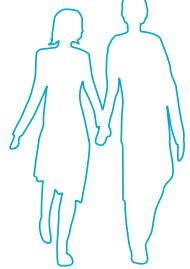	失禁のレベル
日 中	




コンビーン アクティブ レッグバッグの装着と使用方法

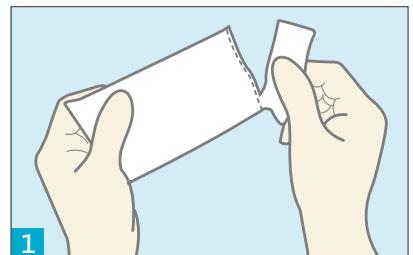


パッケージを開けます

パッケージを、ミシン目沿って開けます。
レッグバッグとチューブをそれぞれ取り出します。

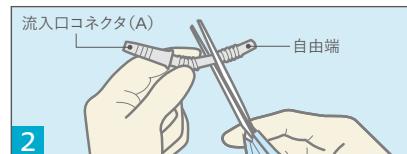


チューブの長さを調節します(必要な場合)

チューブには、滑らかな部分とじゃばらの部分があり、一方の端には、流入口コネクタ(A)がついています。好みにより、チューブの長さを短くすることもできます。チューブを短くするには、はさみで、自由端側から一番目のじゃばらチューブ部分のすぐ後を切ります。滑らかな部分は、できる限り長く残してください。そうすることで、レッグバッグとチューブの接続を確実に行えます。

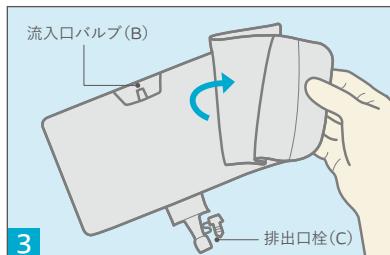


流入口バルブ(B)と排出口(C)の位置を確認します

レッグバッグを広げ、流入口バルブ(B)と排出口栓(C)の位置を確認します。

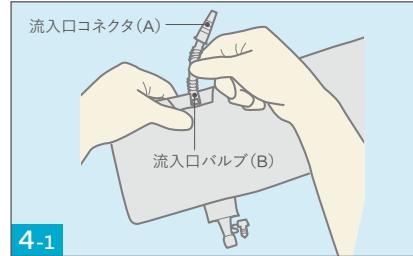


レッグバッグの装着準備-1

チューブを流入口バルブ(B)に接続します。

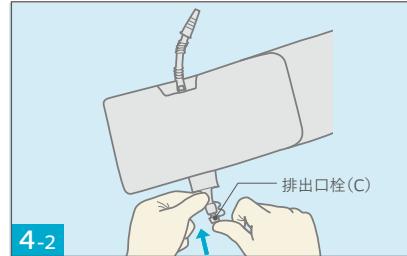

レッグバッグの装着準備-2

排出口栓(C)を閉じます。

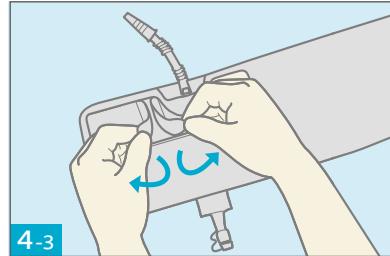


レッグバッグの装着準備-3

蓄尿袋裏面の粘着パッチの保護フィルムをはがします。


※次ページに続きます。

※前ページから続きます。

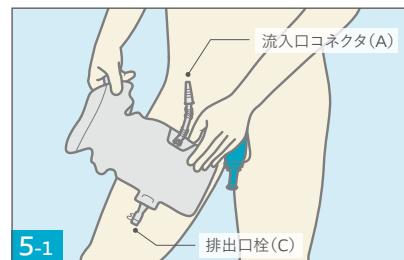


レッグバッグの装着(右腿)-1

流入口コネクタ(A)を上向きに、排出口栓(C)を下向きにしてレッグバッグを持ちます。レッグバッグは右腿の肌に直接つけます。レッグバッグの位置を決めます。腿の上部、陰茎部のすぐ下の腿内側の中央に、流入口コネクタ(A)が位置するようにします。
※レッグバッグを初めて取り付ける時には、最適な位置が見つかるまで、何度も位置を変えてみましょう。

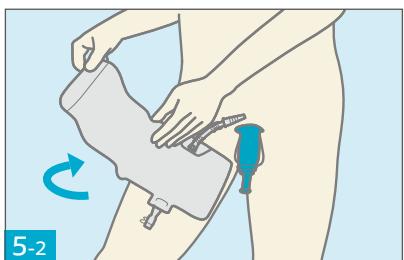


レッグバッグの装着(右腿)-2

腿にバンドの長い部分を巻き付け、目の粗い布部分でバンド端を固定します。
※粘着パッチによりレッグバッグが所定の位置に保持されるので、バンドをきつく巻きすぎないようにしましょう。

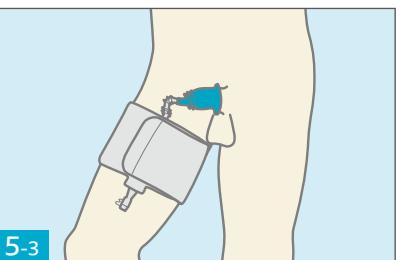

レッグバッグの装着(右腿)-3

レッグバッグの流入口コネクタ(A)と、採尿器排出口をしっかりと接続します。

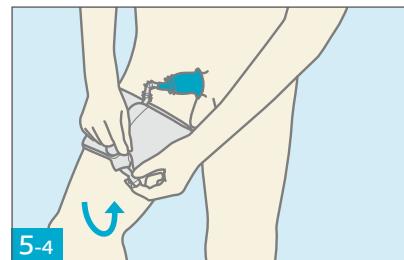

レッグバッグの装着(右腿)-4

装着を快適に、また目立たないようにするために、排出口栓は上向きに折り、レッグバッグと伸縮バンドの間に隠します。



中身の廃棄

レッグバッグの容量は250mlです。レッグバッグは満杯になる前に空にしてください。排出口栓(C)を引き出し、便器に向けています。排出口栓(C)のチューブの柔かい部分を指で挟み、もう一方の手で、栓を開けます。柔かい部分を挟んでいる指を徐々に開き、尿を流します。レッグバッグを空にした後は、排出口栓を必ず閉じてから、伸縮バンドの下に戻します。レッグバッグは通常の家庭ゴミと一緒に廃棄できます。お住まいの自治体の規制に従って廃棄してください。本製品は、トイレに流さないでください。

この製品は、
日中用です。

長期間の使用は製品の劣化による漏れや臭いなどの原因となります。

※尿路ストーマ用装具との接続は推奨しておりません。

コンビーン セキュア レッグバッグ



- ねじれに強い、カットできるじゃばらチューブ
- 用途に合わせて選べる容量350mlと750mlの2タイプ
- 350mlには内部に圧着部があり、尿が入った際のふくらみを抑制 (750mlには圧着部はありません)



- 逆流防止弁内蔵
- 服の下で目立ちにくい、小さな水玉デザインとグレーの半透明素材
- 裏面に肌触りをよくする不織布を使用
- ワンタッチ操作の排出口


コンビーン セキュア レッグバッグの装着と使用方法



1. チューブの長さを調節します



使用目的に応じて必要な長さにカットできます。コンビーン セキュア レッグバッグシリーズの場合は、じゃばら部分でない箇所でカットします。

注意：じゃばら部分でない箇所にコネクターを接続しますので、余裕を持ってカットしてください。

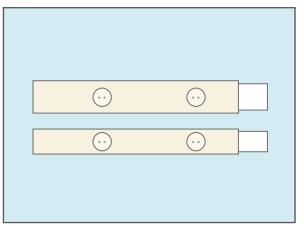

2. コネクターを接続します

チューブをコネクターの奥へ押し込んだ後、軽く引っ張ってチューブがはずれない事を確認します。注意：一度チューブに接続したコネクターは、チューブを切らないとはずれません。

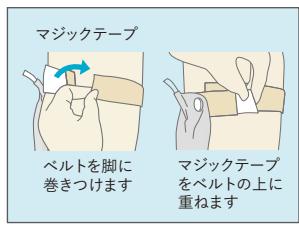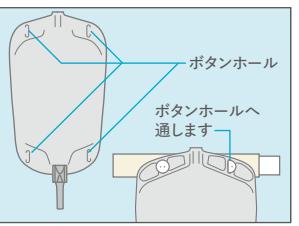

3. コンビーン レッグバッグベルトを使用して脚に装着します

レッグバッグベルトは太い方（上側用）と細い方（下側用）があり、ボタンが付いています。


ボタンをレッグバッグに空いているボタンホールへ通します。

レッグバッグベルトは太い方が上、細い方が下に装着します。余ったベルト部分はハサミでカットできます。



使用期間の目安は
約1週間です。

長期間の使用は製品の劣化による漏れや臭いなどの原因となります。

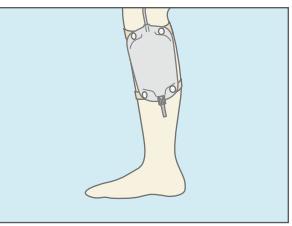

4. 装着完了

排出口の閉じ方と注意



閉じた状態



排出時

排出口はワンタッチ操作です。排出口は開いた状態ですので、使用前に閉じてから使用します。


注意：レバーを開けるとき、爪でバッジに傷つけないよう注意してください。
※コロプラス ワロナイト バッグの排出口は形状が異なり、ワンタッチ操作ではありません。

コンビーン レッグバッグシリーズと各種装具の接続方法

一般的な採尿袋（尿路ストーマ用装具）やコンドーム型収尿器などとの接続ができます。


一般的な採尿袋（ウロストミー用装具）

各社の採尿袋に付属している接続用コネクターを使用して採尿袋と接続します。

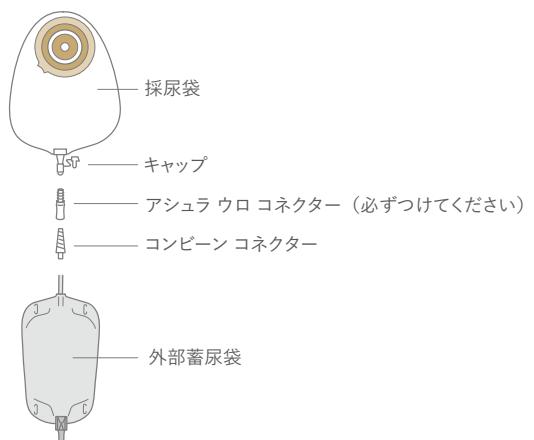

コンドーム型収尿器

収尿器の先端部分に、コンビーン コネクターをしっかりと接続します。
※尿の流れを確保するため、レッグバッグは採尿袋やコンドーム型 収尿器より低い位置で装着してください。

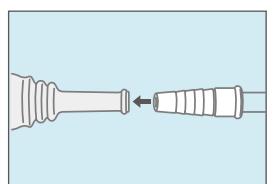

コンビーン レッグバッグシリーズ

コンビーン アクティブ レッグバッグ



コンビーン アクティブ レッグバッグ

製品名	製品番号	容量	チューブ長	包装単位	税込価格
コンビーン アクティブ レッグバッグ	25501	250ml	70mm	10枚/箱	¥7,370 (¥737/枚)

●材質：ポリエチレン ●未滅菌 ●逆流防止弁あり

コンビーン セキュア レッグバッグ



コンビーン セキュア レッグバッグ

製品名	製品番号	容量	チューブ長	包装単位	税込価格
コンビーン セキュア レッグバッグ350	51654	350 ml	50 cm	5枚/箱	¥3,575 (¥715/枚)
コンビーン セキュア レッグバッグ350	5165	350 ml	50 cm	10枚/箱	¥6,600 (¥660/枚)
コンビーン セキュア レッグバッグ750	51674	750 ml	50 cm	5枚/箱	¥3,575 (¥715/枚)
コンビーン セキュア レッグバッグ750	5167	750 ml	50 cm	10枚/箱	¥6,600 (¥660/枚)

●ねじりに強く、カットできるじゃばらチューブ ●用途にあわせて選べる容量350mlと750mlの2タイプ
●350mlには内部に圧着部があり、尿が入った際のふくらみを抑制 ●服の下で目立たない水玉デザインとグレーの半透明素材 ●裏面に肌触りをよくする不織布を使用 ●ワンタッチ操作の排出口
●材質：ポリエチレン ●未滅菌 ●逆流防止弁あり ●コンビーン コネクター付、レッグバッグベルト1セット付

コンビーン レッグバッグ



コンビーン レッグバッグ

製品名	製品番号	容量	チューブ長	包装単位	税込価格
コンビーン レッグバッグ	5170	600 ml	45 cm	10枚/箱	¥7,700 (¥770/枚)

●三層構造で厚みがでにくく、蓄尿袋内の音（やっぱちやば音）を軽減
●カットできるチューブで長さが調節可能（じゃばらチューブではありません）
●材質：ポリ塩化ビニル（PVC） ●未滅菌 ●逆流防止弁あり
●コンビーン コネクター付、レッグバッグベルト1セット付



コンビーン ドレイナージバッグ 夜間も安心の1,500ml



コンビーン ドレイナージバッグ

製品名	製品番号	容量	チューブ長	包装単位	税込価格
コンビーン ドレイナージバッグ	5062	1,500 ml	90 cm	10枚/箱	¥5,830 (¥583/枚)

●材質：ポリ塩化ビニル（PVC） ●未滅菌 ●逆流防止弁あり
コンビーン コネクター付

コンビーン レッグバッグベルト／コンビーン コネクター



コンビーン レッグバッグベルト／コンビーン コネクター

製品名	製品番号	包装単位	税込価格
コンビーン レッグバッグベルト	5050	1セット	¥715
コンビーン コネクター	9803	10個/袋	¥1,100 (¥110/個)

コロプラス ワロナイトバッグ 夜間も安心の2,000ml



コロプラス ワロナイトバッグ

製品名	製品番号	容量	チューブ長	包装単位	税込価格
コロプラス ワロナイトバッグ	21365	2,000 ml	120 cm	10枚/箱	¥6,820 (¥682/枚)

●センシュラ ミオ、センシュラ、アシュラの採尿袋との直接接続コネクター付き ●2段階操作排出口
●材質：ポリエチレン・ポリアミド ●未滅菌 ●逆流防止弁あり ●専用ハンガー1個付

Index

製品番号順索引

ストーマケア製品

製品番号	製品名	頁
0421	ブラバベルト	59
0423	センシュラミオ 専用ベルト	32
0430	4点止め安心ベルト(90cm)	32
0440	4点止め安心ベルト(120cm)	32
0509	コロフィルター	59
1110	コロチップ	50
1485	アシュラコンシールプラグ	50-35 mm 44
1495	アシュラコンシールプラグ	50-45 mm 44
1511	コロプラスツウォーターバッグ	50
1757	アシュラロックバウチU	40 mm 48
1758	アシュラロックバウチU	50 mm 48
1759	アシュラロックバウチU	60 mm 48
1789	アシュラキッズ2ロックバウチU	40 mm 51
1907	ブラババウダー	58
2115	アシュラキッズ1スタンダード	10-35 mm 51
2125	アシュラキッズ1クローズ	10-35 mm 51
2156	アシュラキッズ2ロックバウチD	40 mm 51
2166	アシュラキッズ2ロックバウチC	40 mm 51
2210	コロプラスツドレイナージ	S 49
2215	コロプラスツドレイナージ	M 49
2220	コロプラスツドレイナージ	L 49
2325	コロプラスツリング	55-25 mm 59
2330	コロプラスツリング	60-30 mm 59
2340	コロプラスツリング	65-40 mm 59
2350	コロプラスツリング	70-50 mm 59
2490	アシュラスタンダード(クリア)	10-70 mm 43
2501	アシュラKミニキャップ	20-55 mm 44
2520	アシュラスタンダード(ページュ)	10-70 mm 43
2655	ブラバステイクペースト	58
2792	アシュラロックバウチD	50 mm 48
2793	アシュラロックバウチD	60 mm 48
2801	アシュラロックバウチM	40 mm 48
2802	アシュラロックバウチM	50 mm 48
2803	アシュラロックバウチM	60 mm 48
2807	コロプラスツロックバウチUM	40 mm 39
2808	コロプラスツロックバウチUM	50 mm 39
2831	アシュラセルフプレートクリア	40 mm (10-35) 46
2832	アシュラセルフプレートクリア	50 mm (10-45) 46
2833	アシュラセルフプレートクリア	60 mm (10-55) 46
2835	アシュラナイトドレイナージ	40 mm 49
2836	アシュラナイトドレイナージ	50 mm 49
2837	アシュラナイトドレイナージ	60 mm 49
2881	アシュラセルフプレートT	40 mm (10-35) 46
2882	アシュラセルフプレートT	50 mm (10-45) 46
2883	アシュラセルフプレートT	60 mm (10-55) 46
3210	ブラバウエハー	10×10 cm 58
3215	ブラバウエハー	15×15 cm 58
3220	ブラバウエハー	20×20 cm 58
5585	アシュラウロバッグ	10-55 mm 45
8009	アシュラキッズ1ウロバッグ	10-35 mm 51
9020	メジャー付ハサミ	59
9021	メジャー付ハサミ(左利き用)	59
9301	デオール消臭潤滑剤ボトル	250 ml 61
9322	デオール消臭潤滑剤ミニパック	61

製品番号	製品名	頁
9330	デオール消臭潤滑剤 つめかえ用	61
9401	シルティ水のいらないもち泡洗浄	180 ml 67
9405	デオール消臭・除菌スプレー	300 ml 63
9601	シルティ保湿ローション	64
9503	アシュラドレンクリップ	59
9505	ハサミSS	長さ107 mm 59
9804	アシュラウロコネクター	59
10011	センシュラ2プレート	40 mm (10-35) 38
10012	センシュラ2プレート	40 mm (20) 38
10013	センシュラ2プレート	40 mm (25) 38
10015	センシュラ2Xproプレート	40 mm (10-35) 38
10016	センシュラ2Xproプレート	40 mm (20) 38
10017	センシュラ2Xproプレート	40 mm (25) 38
10021	センシュラ2プレート	50 mm (10-45) 38
10022	センシュラ2プレート	50 mm (30) 38
10023	センシュラ2プレート	50 mm (35) 38
10025	センシュラ2Xproプレート	50 mm (10-45) 38
10026	センシュラ2Xproプレート	50 mm (30) 38
10027	センシュラ2Xproプレート	50 mm (35) 38
10031	センシュラ2プレート	60 mm (10-55) 38
10032	センシュラ2プレート	60 mm (40) 38
10035	センシュラ2Xproプレート	60 mm (10-55) 38
10036	センシュラ2Xproプレート	60 mm (40) 38
10041	センシュラ2プレート	70 mm (10-65) 38
10045	センシュラ2Xproプレート	70 mm (10-65) 38
10101	センシュラフレックスプレート	35 mm (10-33) 40
10102	センシュラフレックスプレート	50 mm (10-48) 40
10103	センシュラフレックスプレート	70 mm (10-68) 40
10104	センシュラフレックスXproプレート	35 mm (10-33) 40
10105	センシュラフレックスXproプレート	50 mm (10-48) 40
10106	センシュラフレックスXproプレート	70 mm (10-68) 40
10108	センシュラフレックスプレート	90 mm (10-88) 40-49
10111	センシュラフレックスプレート	35 mm (21) 40
10114	センシュラフレックスプレート	50 mm (25) 40
10115	センシュラフレックスプレート	50 mm (28) 40
10116	センシュラフレックスプレート	50 mm (31) 40
10117	センシュラフレックスプレート	50 mm (35) 40
10118	センシュラフレックスプレート	50 mm (41) 40
10154	センシュラ2クローズバッグ	40 mm 39
10155	センシュラ2クローズバッグ	50 mm 39
10471	センシュラミオ1不透明	10-55 mm 27
10472	センシュラミオ1不透明	25 mm 27
10474	センシュラミオ1不透明	30 mm 27
10476	センシュラミオ1不透明	35 mm 27
10479	センシュラミオ1不透明	40 mm 27
10481	センシュラミオ1	10-55 mm 27
10482	センシュラミオ1	25 mm 27
10483	センシュラミオ1	30 mm 27
10484	センシュラミオ1	35 mm 27
10485	センシュラミオ1	45 mm 27
10486	センシュラミオ1	50 mm 27
10487	センシュラミオ1	40 mm 27

ストーマケア製品

製品番号	製品名	頁
10502	センシュラミオ2プレート	40 mm (10-35) 31
10503	センシュラミオ2プレート	40 mm (20) 31
10504	センシュラミオ2プレート	40 mm (25) 31
10512	センシュラミオ2プレート	50 mm (10-45) 31
10513	センシュラミオ2プレート	50 mm (30) 31
10515	センシュラミオ2プレート	50 mm (35) 31
10522	センシュラミオ2プレート	60 mm (10-55) 31
10523	センシュラミオ2プレート	60 mm (40) 31
10531	センシュラミオ2プレート	70 mm (10-65) 31
10551	センシュラミオ2フレックスプレート	35 mm (10-33) 33
10561	センシュラミオ2フレックスプレート	50 mm (10-48) 33
10562	センシュラミオ2フレックスプレート	50 mm (25) 33
10563	センシュラミオ2フレックスプレート	50 mm (30) 33
10564	センシュラミオ2フレックスプレート	50 mm (35) 33
10565	センシュラミオ2フレックスプレート	50 mm (40) 33
10571	センシュラミオ2フレックスプレート	70 mm (10-68) 33
10586	センシュラミオ1ウロ	10-45 mm 30
10870	センシュラミオ1クローズミニ	15-45 mm 28
10871	センシュラミオ1クローズ不透明	15-45 mm 28
10872	センシュラミオ1クローズ不透明	25 mm 28
10873	センシュラミオ1クローズ不透明	30 mm 28
10874	センシュラミオ1クローズ不透明	35 mm 28
10885	センシュラミオ1クローズ不透明	40 mm 28
10895	センシュラフレックスミニ	50 mm 41
10912	センシュラフレックスクローズバッグ	50 mm 41
10915	センシュラフレックスクローズバッグ(ナチュラル)	50 mm 41
10918	センシュラフレックスクローズバッグ(ナチュラル)	70 mm 41
11011	センシュラ2プラスプレート	40 mm (15-23) 38
11012	センシュラ2プラスプレート	40 mm (21) 38
11015	センシュラ2Xproプラスプレート	40 mm (15-23) 38
11016	センシュラ2Xproプラスプレート	40 mm (21) 38
11021	センシュラ2プラスプレート	50 mm (15-33) 38
11022	センシュラ2プラスプレート	50 mm (25) 38
11023	センシュラ2プラスプレート	50 mm (28) 38
11024	センシュラ2プラスプレート	50 mm (31) 38
11025	センシュラ2Xproプラスプレート	50 mm (15-33) 38
11026	センシュラ2Xproプラスプレート	50 mm (25) 38
11027	センシュラ2Xproプラスプレート	50 mm (28) 38
11028	センシュラ2Xproプラスプレート	50 mm (31) 38
11031	センシュラ2プラスプレート	60 mm (15-43) 38
11032	センシュラ2プラスプレート	60 mm (35) 38
11035	センシュラ2Xproプラスプレート	60 mm (15-43) 38
11036	センシュラ2Xproプラスプレート	60 mm (35) 38
11041	センシュラ2プラスプレート	70 mm (15-53) 38
11045	センシュラ2Xproプラスプレート	70 mm (15-53) 38
11124	センシュラ2バッグ(ナチュラル)	40 mm 39
11125	センシュラ2バッグ(ナチュラル)	50 mm 39
11126	センシュラ2バッグ(ナチュラル)	60 mm 39
11127	センシュラ2バッグ(ナチュラル)	70 mm 39
11135	センシュラ1ウロXpro	10-76 mm 37
11189	センシュラ1ウロXproプラス	15-33 mm 37
111824	センシュラフレックスウロ(ナチュラル)	35 mm 41
111825	センシュラフレックスウロ(ナチュラル)	50 mm 41
111827	センシュラフレックスウロ	35 mm 41
111828	センシュラフレックスウロ	50 mm 41
111831	センシュラ1ウロXpro	22 mm 37
111832	センシュラ1ウロXpro	25 mm 37
111833	センシュラ1ウロXpro	30 mm 37
111834	センシュラ1ウロXproプラス	22 mm 37
111835	センシュラ1ウロXproプラス	25 mm 37

Index

製品番号順索引

コロプラストについて

ストーマケア製品

製品番号	製品名	頁
12011	ブラバ 粘着剥離剤 ワイプ	58
12014	ブラバ粘着剝離剤 センシュラミオ ベビー専用	34
12020	ブラバ 皮膚被膜剤 スプレー	58
12021	ブラバ 皮膚被膜剤 ワイプ	58
12030	ブラバ モルダブルリング 厚み 2.0mm	57
12032	ブラバ プロテクティブシール 厚み 2.5 mm (18-76)	57
12033	ブラバ プロテクティブシール 厚み 2.5 mm (27-76)	57
12035	ブラバ プロテクティブシール 厚み 2.5 mm (18-48)	57
12037	ブラバ プロテクティブシール 厚み 2.5 mm (27-57)	57
12039	ブラバ プロテクティブシール 厚み 2.5 mm (34-64)	57
12042	ブラバ モルダブルリング 厚み 4.2 mm	57
12045	ブラバ プロテクティブシール 厚み 4.2 mm (18-48)	57
12047	ブラバ プロテクティブシール 厚み 4.2 mm (27-57)	57
12049	ブラバ プロテクティブシール 厚み 4.2 mm (34-64)	57
12050	ブラバ ベースト	57
12070	ブラバ 伸縮性皮膚保護 テープ	57
12072	ブラバ 伸縮性皮膚保護 テープ ベルト型	57
12074	ブラバ 伸縮性皮膚保護 テープ ストレート型	57
12076	ブラバ 伸縮性皮膚保護 テープ XL	57
12150	アシュラ コンフォート クローズ 20-65 mm	44
12154	アシュラ コンフォート クローズ 25 mm	44
12155	アシュラ コンフォート クローズ 30 mm	44
12156	アシュラ コンフォート クローズ 35 mm	44
12157	アシュラ コンフォート クローズ 40 mm	44
12158	アシュラ コンフォート クローズ 45 mm	44
12211	センシュラミオ 2フレックスクローズバッグ 不透明 ミニ	50 mm 33
12213	センシュラミオ 2フレックスクローズバッグ 不透明	50 mm 33
12216	センシュラミオ 2フレックスクローズバッグ	50 mm 33
12222	センシュラミオ 2フレックスクローズバッグ 不透明	70 mm 33
12223	センシュラミオ 2フレックスクローズバッグ	70 mm 33
12263	センシュラミオ 2フレックスバッグ	35 mm 33
12273	センシュラミオ 2フレックスバッグ	50 mm 33
12283	センシュラミオ 2フレックスバッグ	70 mm 33
12292	センシュラミオ 2フレックス ウロ	35 mm 33
12298	センシュラミオ 2フレックス ウロ	50 mm 33
12364	アシュラ II ロックハウチ CC	40 mm 48
12365	アシュラ II ロックハウチ CC	50 mm 48
12366	アシュラ II ロックハウチ CC	60 mm 48
12585	アシュラ スタンダード AC フリー	15-33 mm 44
12586	アシュラ スタンダード AC フリー	15-43 mm 44
12595	アシュラ ウロバッグ AC フリー	15-33 mm 45
12596	アシュラ ウロバッグ AC フリー	15-43 mm 45
12701	アシュラ セルフプレート AC	40 mm (15) 47
12702	アシュラ セルフプレート AC	40 mm (18) 47
12703	アシュラ セルフプレート AC	40 mm (21) 47
12704	アシュラ セルフプレート AC	50 mm (25) 47
12705	アシュラ セルフプレート AC	50 mm (28) 47
12706	アシュラ セルフプレート AC	50 mm (31) 47
12707	アシュラ セルフプレート AC	60 mm (35) 47
12708	アシュラ セルフプレート AC	60 mm (38) 47
12709	アシュラ セルフプレート AC	60 mm (41) 47
12716	アシュラ セルフプレート AC フリー	50 mm (15-33) 47
12719	アシュラ セルフプレート AC フリー	60 mm (15-43) 47
12812	コロプラスチックポストオペロッド N	49

製品番号	製品名	頁
12820	アシュラ イリゲーション プレート 60 mm	50
12830	アシュラ イリゲーション セット 60 mm	50
12834	アシュラ イリゲーションスリーブ 40 mm	50
12835	アシュラ イリゲーションスリーブ 50 mm	50
12836	アシュラ イリゲーションスリーブ 60 mm	50
12841	アシュラ セルフプレート T 40 mm (20)	46
12842	アシュラ セルフプレート T 40 mm (25)	46
12844	アシュラ セルフプレート T 50 mm (30)	46
12845	アシュラ セルフプレート T 50 mm (35)	46
12847	アシュラ セルフプレート T 60 mm (40)	46
12848	アシュラ セルフプレート T 60 mm (45)	46
12991	アシュラ ウロバッグ AC 15 mm	45
12992	アシュラ ウロバッグ AC 18 mm	45
12993	アシュラ ウロバッグ AC 21 mm	45
12994	アシュラ ウロバッグ AC 25 mm	45
12995	アシュラ ウロバッグ AC 28 mm	45
12996	アシュラ ウロバッグ AC 31 mm	45
13014	アシュラ セルフプレート G 40 mm (10-35)	46
13015	アシュラ セルフプレート G 50 mm (10-45)	46
13016	アシュラ セルフプレート G 60 mm (10-55)	46
13141	アシュラ セルフプレート ER 40 mm (10-35)	46
13144	アシュラ セルフプレート ER 40 mm (25)	46
13149	アシュラ キップス2 セルフプレート ER 40 mm (10-35)	51
13151	アシュラ セルフプレート ER 50 mm (10-45)	46
13152	アシュラ セルフプレート ER 50 mm (30)	46
13153	アシュラ セルフプレート ER 50 mm (35)	46
13161	アシュラ セルフプレート ER 60 mm (10-55)	46
13860	アシュラ コンフォート EC 12-75 mm	43
13864	アシュラ コンフォート EC 25 mm	43
13865	アシュラ コンフォート EC 30 mm	43
13866	アシュラ コンフォート EC 35 mm	43
13870	アシュラ コンフォート EC・C 12-75 mm	43
13874	アシュラ コンフォート EC・C 25 mm	43
13875	アシュラ コンフォート EC・C 30 mm	43
13876	アシュラ コンフォート EC・C 35 mm	43
13974	アシュラ II ロックハウチ EC 40 mm	48
13975	アシュラ II ロックハウチ EC 50 mm	48
13976	アシュラ II ロックハウチ EC 60 mm	48
13984	アシュラ II ロックハウチ EC・C 40 mm	48
13985	アシュラ II ロックハウチ EC・C 50 mm	48
13986	アシュラ II ロックハウチ EC・C 60 mm	48
14010	排液バッグ (外径接続型) 28・39・49	
14102	アシュラ コンフォートコンベックス EC 15-33 mm	44
14103	アシュラ コンフォートコンベックス EC 15-43 mm	44
14163	アシュラ コンフォートコンベックス EC 21 mm	44
14164	アシュラ コンフォートコンベックス EC 25 mm	44
14165	アシュラ コンフォートコンベックス EC 28 mm	44
14166	アシュラ コンフォートコンベックス EC 31 mm	44
14201	アシュラ ウロバッグ UC・Fit クリアー 10-55 mm	45
14202	アシュラ ウロバッグ U・Fit クリアー 10-55 mm	45
14204	コロプラスチックロックコレクター U 40 mm	39
14205	コロプラスチックロックコレクター U 50 mm	39
14224	アシュラ ロックハウチ UC・Fit 40 mm	48
14225	アシュラ ロックハウチ UC・Fit 50 mm	48

ストーマケア製品

製品番号	製品名	頁
14226	アシュラ ロックハウチ UC・Fit 60 mm	48
14227	アシュラ ロックハウチ U・Fit 40 mm	48
14228	アシュラ ロックハウチ U・Fit 50 mm	48
14229	アシュラ ロックハウチ U・Fit 60 mm	48
14232	アシュラ セルフプレートクリアーアル 40 mm (18)	47
14233	アシュラ セルフプレートクリアーアル 40 mm (21)	47
14234	アシュラ セルフプレートクリアーアル 50 mm (25)	47
14235	アシュラ セルフプレートクリアーアル 50 mm (28)	47
14236	アシュラ セルフプレートクリアーアル 50 mm (31)	47
14237	アシュラ セルフプレートクリアーアル 60 mm (35)	47
14243	アシュラ セルフプレートクリアーアル 40 mm (15-23)	47
14246	アシュラ セルフプレートクリアーアル 50 mm (15-33)	47
14249	アシュラ セルフプレートクリアーアル 60 mm (15-43)	47
14250	アシュラ セルフプレートクリアーアル 40 mm (15)	46
14251	アシュラ セルフプレートクリアーアル 40 mm (20)	46
14252	アシュラ セルフプレートクリアーアル 40 mm (25)	46
14254	アシュラ セルフプレートクリアーアル 50 mm (30)	46
14255	アシュラ セルフプレートクリアーアル 50 mm (35)	46
14257	アシュラ セルフプレートクリアーアル 60 mm (40)	46
14258	アシュラ セルフプレートクリアーアル 60 mm (45)	46
14261	アシュラ セルフプレート LC 40 mm (15-23)	46
14262	アシュラ セルフプレート LC 50 mm (15-33)	46
14263	アシュラ セルフプレート LC 60 mm (15-43)	46
14271	アシュラ セルフプレート LC 40 mm (18)	46
14272	アシュラ セルフプレート LC 40 mm (21)	46
14273	アシュラ セルフプレート LC 50 mm (25)	46
14274	アシュラ セルフプレート LC 50 mm (28)	46
14275	アシュラ セルフプレート LC 50 mm (31)	46
14276	アシュラ セルフプレート LC 60 mm (35)	46
14277	アシュラ セルフプレート LC 60 mm (38)	46
14278	アシュラ セルフプレート LC 60 mm (41)	46
14281	アシュラ セルフプレートクリアーアル 40 mm (15-23)	47
14282	アシュラ セルフプレートクリアーアル 50 mm (15-33)	47
14283	アシュラ セルフプレートクリアーアル 60 mm (15-43)	47
14291	アシュラ セルフプレートクリアーアル 40 mm (18)	47
14292	アシュラ セルフプレートクリアーアル 40 mm (21)	47
14293	アシュラ セルフプレートクリアーアル 50 mm (25)	47
14294	アシュラ セルフプレートクリアーアル 50 mm (28)	47
14295	アシュラ セルフプレートクリアーアル 50 mm (31)	47
14296	アシュラ セルフプレートクリアーアル 60 mm (35)	47
14297	アシュラ セルフプレートクリアーアル 60 mm (38)	47
14298	アシュラ セルフプレートクリアーアル 60 mm (41)	47
14307	イージフレックス キップスプレート 17 mm (0-15)	51
14308	イージフレックス キップスプレート 27 mm (0-25)	51
14411	アシュラ コンフォート LC-EC 15-33 mm	43
14412	アシュラ コンフォート LC-EC 15-43 mm	43
14414		

Index

製品番号順索引

ストーマケア製品

製品番号	製品名	頁
16481	センシュラ ミオ 2 フレックスプレート ライト	15-30 mm 33
16483	センシュラ ミオ 2 フレックスプレート ライト	15-40 mm 33
16484	センシュラ ミオ 2 フレックスプレート ライト	21 mm 33
16485	センシュラ ミオ 2 フレックスプレート ライト	25 mm 33
16486	センシュラ ミオ 2 フレックスプレート ライト	28 mm 33
16487	センシュラ ミオ 2 フレックスプレート ライト	31 mm 33
16488	センシュラ ミオ 2 フレックスプレート ライト	35 mm 33
16491	センシュラ ミオ 2 フレックスプレート ライト	15-53 mm 33
16493	センシュラ ミオ 2 フレックスプレート ライト	38 mm 33
16494	センシュラ ミオ 2 フレックスプレート ライト	41 mm 33
16705	センシュラ ミオ 1 ソフト 不透明	15-33 mm 27
16706	センシュラ ミオ 1 ソフト 不透明	10-50 mm 27
16715	センシュラ ミオ 1 ソフト	15-33 mm 27
16716	センシュラ ミオ 1 ソフト	10-50 mm 27
16726	センシュラ ミオ 1 ライト 不透明	15-33 mm 27
16727	センシュラ ミオ 1 ライト 不透明	31 mm 27
16731	センシュラ ミオ 1 ライト 不透明	25 mm 27
16732	センシュラ ミオ 1 ライト 不透明	28 mm 27
16734	センシュラ ミオ 1 ライト 不透明	35 mm 27
16735	センシュラ ミオ 1 ライト 不透明	38 mm 27
16738	センシュラ ミオ 1 ライト	15-33 mm 27
16739	センシュラ ミオ 1 ライト	10-43 mm 27
16741	センシュラ ミオ 1 ライト	25 mm 27
16742	センシュラ ミオ 1 ライト	28 mm 27
16743	センシュラ ミオ 1 ライト	31 mm 27
16744	センシュラ ミオ 1 ライト	35 mm 27
16745	センシュラ ミオ 1 ライト	38 mm 27
16756	センシュラ ミオ 1 ディープ 不透明	15-33 mm 27
16757	センシュラ ミオ 1 ディープ 不透明	31 mm 27
16761	センシュラ ミオ 1 ディープ 不透明	25 mm 27
16762	センシュラ ミオ 1 ディープ 不透明	28 mm 27
16763	センシュラ ミオ 1 ディープ 不透明	35 mm 27
16764	センシュラ ミオ 1 ディープ 不透明	38 mm 27
16766	センシュラ ミオ 1 ディープ	15-33 mm 27
16767	センシュラ ミオ 1 ディープ	10-43 mm 27
16771	センシュラ ミオ 1 ディープ	25 mm 27
16772	センシュラ ミオ 1 ディープ	28 mm 27
16773	センシュラ ミオ 1 ディープ	31 mm 27
16774	センシュラ ミオ 1 ディープ	35 mm 27
16775	センシュラ ミオ 1 ディープ	38 mm 27
16810	センシュラ ミオ 1 ウロ ソフト	10-50 mm 30
16835	センシュラ ミオ 1 ウロ ライト	10-23 mm 30
16836	センシュラ ミオ 1 ウロ ライト	15-33 mm 30
16837	センシュラ ミオ 1 ウロ ライト	10-43 mm 30
16840	センシュラ ミオ 1 ウロ ライト	21 mm 30
16841	センシュラ ミオ 1 ウロ ライト	25 mm 30
16842	センシュラ ミオ 1 ウロ ライト	28 mm 30
16866	センシュラ ミオ 1 ウロ ディープ	15-33 mm 30
16867	センシュラ ミオ 1 ウロ ディープ	10-43 mm 30
16870	センシュラ ミオ 1 ウロ ディープ	21 mm 30
16871	センシュラ ミオ 1 ウロ ディープ	25 mm 30
16872	センシュラ ミオ 1 ウロ ディープ	28 mm 30
16901	センシュラ ミオ 2 プレート ライト	10-20 mm 31
16903	センシュラ ミオ 2 プレート ライト	18 mm 31

製品番号	製品名	頁
16911	センシュラ ミオ 2 プレート ライト	15-30 mm 31
16913	センシュラ ミオ 2 プレート ライト	21 mm 31
16914	センシュラ ミオ 2 プレート ライト	25 mm 31
16915	センシュラ ミオ 2 プレート ライト	28 mm 31
16921	センシュラ ミオ 2 プレート ライト	15-40 mm 31
16923	センシュラ ミオ 2 プレート ライト	31 mm 31
16924	センシュラ ミオ 2 プレート ライト	35 mm 31
16931	センシュラ ミオ 2 プレート ライト	15-53 mm 31
16933	センシュラ ミオ 2 プレート ライト	38 mm 31
16934	センシュラ ミオ 2 プレート ライト	41 mm 31
16941	センシュラ ミオ 2 プレート ディープ	10-20 mm 31
16942	センシュラ ミオ 2 プレート ディープ	18 mm 31
16951	センシュラ ミオ 2 プレート ディープ	15-30 mm 31
16953	センシュラ ミオ 2 プレート ディープ	21 mm 31
16954	センシュラ ミオ 2 プレート ディープ	25 mm 31
16955	センシュラ ミオ 2 プレート ディープ	28 mm 31
16961	センシュラ ミオ 2 プレート ディープ	15-40 mm 31
16963	センシュラ ミオ 2 プレート ディープ	31 mm 31
16964	センシュラ ミオ 2 プレート ディープ	35 mm 31
16971	センシュラ ミオ 2 プレート ディープ	15-53 mm 31
16973	センシュラ ミオ 2 プレート ディープ	38 mm 31
16974	センシュラ ミオ 2 プレート ディープ	41 mm 31
18301	センシュラ ミオ 1 コンケーブ 不透明	25 mm 29
18305	センシュラ ミオ 1 コンケーブ 透明	10-40 mm 29
18312	センシュラ ミオ 1 コンケーブ 不透明	10-50 mm 29
18314	センシュラ ミオ 1 コンケーブ 不透明	30 mm 29
18315	センシュラ ミオ 1 コンケーブ 不透明	35 mm 29
18321	センシュラ ミオ 1 コンケーブ	10-50 mm 29
18323	センシュラ ミオ 1 コンケーブ	30 mm 29
18324	センシュラ ミオ 1 コンケーブ	35 mm 29
18330	センシュラ ミオ 1 コンケーブ 不透明	10-60 mm 29
18331	センシュラ ミオ 1 コンケーブ 不透明	40 mm 29
18332	センシュラ ミオ 1 コンケーブ 不透明	45 mm 29
18333	センシュラ ミオ 1 コンケーブ 不透明	50 mm 29
18341	センシュラ ミオ 1 コンケーブ	10-60 mm 29
18342	センシュラ ミオ 1 コンケーブ	40 mm 29
18343	センシュラ ミオ 1 コンケーブ	45 mm 29
18344	センシュラ ミオ 1 コンケーブ	50 mm 29
18401	センシュラ ミオ 1 コンケーブ ウロ 不透明	10-40 mm 30
18405	センシュラ ミオ 1 コンケーブ ウロ	10-40 mm 30
18500	センシュラ ミオ 2 コンケーブ プレート	10-35 mm 31
18510	センシュラ ミオ 2 コンケーブ プレート	10-45 mm 31
18513	センシュラ ミオ 2 コンケーブ プレート	35 mm 31
18520	センシュラ ミオ 2 コンケーブ プレート	10-55 mm 31
18523	センシュラ ミオ 2 コンケーブ プレート	40 mm 31
18524	センシュラ ミオ 2 コンケーブ プレート	45 mm 31
18530	センシュラ ミオ 2 コンケーブ プレート	10-65 mm 31
18532	センシュラ ミオ 2 コンケーブ プレート	50 mm 31
18640	センシュラ ミオ 2 イレオ	50 mm 32
18641	センシュラ ミオ 2 イレオ	60 mm 32
18642	センシュラ ミオ 2 イレオ	70 mm 32
18655	センシュラ ミオ 2 フレックス イレオ	50 mm 33
18656	センシュラ ミオ 2 フレックス イレオ	70 mm 33
18665	センシュラ ミオ 1 イレオ	10-70 mm 28

ストーマケア製品

製品番号	製品名	頁
18666	センシュラ ミオ 1 イレオ	10-100 mm 28
18670	センシュラ ミオ 1 イレオ ソフト 不透明	10-50 mm 28
18671	センシュラ ミオ 1 イレオ ソフト	10-50 mm 28
18675	センシュラ ミオ 1 イレオ ライト 不透明	10-43 mm 28
18676	センシュラ ミオ 1 イレオ ライト	10-43 mm 28
18680	センシュラ ミオ 1 ポストオペ 減菌済（ウンドード付）	10-70 mm 28-49
18681	センシュラ ミオ 1 ポストオペ 減菌済（ウンドード付）	10-100 mm 28-49
18690	センシュラ ミオ 1 ポストオペ 未滅菌（ウンドード付）	10-70 mm 28-49
18691	センシュラ ミオ 1 ポストオペ 未滅菌（ウンドード付）	10-100 mm 28-49
18700	センシュラ ミオ 2 ベビー フレックスバッグ	20×40 mm 34
18705	センシュラ ミオ 2 ベビー フレックスプレート	20×40 mm 34
18710	センシュラ ミオ 1 キッズ 不透明	35 mm (0-35 mm) 34
18711	センシュラ ミオ 1 キッズ	35 mm (0-35 mm) 34
18712	センシュラ ミオ 1 キッズ ウロ	35 mm (10-35 mm) 34
18713	センシュラ ミオ 1 キッズ ウロ 不透明	35 mm (10-35 mm) 34
18722	センシュラ ミオ 2 キッズ フレックスバッグ 不透明	27 mm 34
18723	センシュラ ミオ 2 キッズ フレックスバッグ	27 mm 34
18724	センシュラ ミオ 2 キッズ フレックスバッグ 不透明	35 mm 34
18725	センシュラ ミオ 2 キッズ フレックスバッグ	35 mm 34
18730	センシュラ ミオ 2 キッズ フレックス ウロ 不透明	27 mm 34
18731	センシュラ ミオ 2 キッズ フレックス ウロ 不透明	35 mm 34
18735	センシュラ ミオ 2 キッズ フレックスプレート	27 mm (0-27 mm) 34
18747	センシュラ ミオ 2 キッズ フレックスプレート	35 mm (0-35 mm) 34
19002	センシュラ 1 イレオ	10-76 mm 36
19020	センシュラ 1 ポストオペ 未滅菌	10-78 mm 49
19021	センシュラ 1 ポストオペ 未滅菌	10-115 mm 49
19040	センシュラ 2 イレオ (ナチュラル)	40 mm 39
19041	センシュラ 2 イレオ (ナチュラル)	50 mm 39
19042	センシュラ 2 イレオ (ナチュラル)	60 mm 39
19050	センシュラ 2 イレオ	40 mm 39
19051	センシュラ 2 イレオ	50 mm 39
19052	センシュラ 2 イレオ	60 mm 39
19100	センシュラ 1 イレオ Xpro プラス	15-43 mm 36
19110	センシュラ 1 イレオ Xpro プラス	25 mm 36
19120	センシュラ 1 イレオ Xpro プラス	32 mm 36
19		

Index

五十音順索引

コロプラストについて

ストーマケア製品

製品番号	製品名	頁
2501	アシュラ Kミニキャップ	20-55 mm 44
12834	アシュライギーションスリーブ	40 mm 50
12835	アシュライギーションスリーブ	50 mm 50
12836	アシュライギーションスリーブ	60 mm 50
12830	アシュライギーションセット	60 mm 50
12820	アシュライギーションプレート	60 mm 50
9804	アシュラ ウロコネクター	59
5585	アシュラ ウロバッグ	10-55 mm 45
12991	アシュラ ウロバッグAC	15 mm 45
12992	アシュラ ウロバッグAC	18 mm 45
12993	アシュラ ウロバッグAC	21 mm 45
12994	アシュラ ウロバッグAC	25 mm 45
12995	アシュラ ウロバッグAC	28 mm 45
12996	アシュラ ウロバッグAC	31 mm 45
12595	アシュラ ウロバッグACフリー	15-33 mm 45
12596	アシュラ ウロバッグACフリー	15-43 mm 45
14202	アシュラ ウロバッグU・Fitクリア	10-55 mm 45
14201	アシュラ ウロバッグUC・Fitクリア	10-55 mm 45
14701	アシュラ ウロバッグLCクリア	15-43 mm 45
14702	アシュラ ウロバッグU・FitクリアLC	15-43 mm 45
14703	アシュラ ウロバッグUC・FitクリアLC	15-33 mm 45
14704	アシュラ ウロバッグU・FitクリアLC	15-33 mm 45
8009	アシュラ キッズ1 ウロバッグ	10-35mm 51
2125	アシュラ キッズ1 クローズ	10-35mm 51
2115	アシュラ キッズ1 スタンダード	10-35mm 51
13149	アシュラ キッズ2 セルフプレートER	40 mm (10-35) 51
2166	アシュラ キッズ2 ロックパウチC	40 mm 51
2156	アシュラ キッズ2 ロックパウチD	40 mm 51
1789	アシュラ キッズ2 ロックパウチU	40 mm 51
1485	アシュラ コンシールプラグ	50-35 mm 44
1495	アシュラ コンシールプラグ	50-45 mm 44
13860	アシュラ コンフォートEC	12-75 mm 43
13864	アシュラ コンフォートEC	25 mm 43
13865	アシュラ コンフォートEC	30 mm 43
13866	アシュラ コンフォートEC	35 mm 43
13870	アシュラ コンフォートEC・C	12-75 mm 43
13874	アシュラ コンフォートEC・C	25 mm 43
13875	アシュラ コンフォートEC・C	30 mm 43
13876	アシュラ コンフォートEC・C	35 mm 43
14411	アシュラ コンフォートLC-EC	15-33 mm 43
14412	アシュラ コンフォートLC-EC	15-43 mm 43
14414	アシュラ コンフォートLC-EC・C	15-33 mm 43
14415	アシュラ コンフォートLC-EC・C	15-43 mm 43
14421	アシュラ コンフォートLC-EC・C	21 mm 43
14422	アシュラ コンフォートLC-EC・C	25 mm 43
14423	アシュラ コンフォートLC-EC・C	28 mm 43
14424	アシュラ コンフォートLC-EC・C	31 mm 43
14425	アシュラ コンフォートLC-EC	21 mm 43
14426	アシュラ コンフォートLC-EC	25 mm 43
14427	アシュラ コンフォートLC-EC	28 mm 43
14428	アシュラ コンフォートLC-EC	31 mm 43
14511	アシュラ コンフォートLC-ワイドEC	15-33 mm 43
14512	アシュラ コンフォートLC-ワイドEC	15-43 mm 43
12150	アシュラ コンフォートクローズ	20-65 mm 44

製品番号	製品名	頁
12154	アシュラ コンフォートクローズ	25 mm 44
12155	アシュラ コンフォートクローズ	30 mm 44
12156	アシュラ コンフォートクローズ	35 mm 44
12157	アシュラ コンフォートクローズ	40 mm 44
12158	アシュラ コンフォートクローズ	45 mm 44
14102	アシュラ コンフォートコンベックスEC	15-33 mm 44
14103	アシュラ コンフォートコンベックスEC	15-43 mm 44
14163	アシュラ コンフォートコンベックスEC	21 mm 44
14164	アシュラ コンフォートコンベックスEC	25 mm 44
14165	アシュラ コンフォートコンベックスEC	28 mm 44
14166	アシュラ コンフォートコンベックスEC	31 mm 44
15860	アシュラ コンフォートワイドEC	12-75 mm 43
15864	アシュラ コンフォートワイドEC	25 mm 43
15865	アシュラ コンフォートワイドEC	30 mm 43
15866	アシュラ コンフォートワイドEC	35 mm 43
15870	アシュラ コンフォートワイドEC・C	12-75 mm 43
15874	アシュラ コンフォートワイドEC・C	25 mm 43
15875	アシュラ コンフォートワイドEC・C	30 mm 43
15876	アシュラ コンフォートワイドEC・C	35 mm 43
2490	アシュラ スタンダード(クリア)	10-70 mm 43
2520	アシュラ スタンダード(ベージュ)	10-70 mm 43
12585	アシュラ スタンダードACフリー	15-33 mm 44
12586	アシュラ スタンダードACフリー	15-43 mm 44
12701	アシュラセルフプレートAC	40 mm (15) 47
12702	アシュラセルフプレートAC	40 mm (18) 47
12703	アシュラセルフプレートAC	40 mm (21) 47
12704	アシュラセルフプレートAC	50 mm (25) 47
12705	アシュラセルフプレートAC	50 mm (28) 47
12706	アシュラセルフプレートAC	50 mm (31) 47
12707	アシュラセルフプレートAC	60 mm (35) 47
12708	アシュラセルフプレートAC	60 mm (38) 47
12709	アシュラセルフプレートAC	60 mm (41) 47
12716	アシュラセルフプレートACフリー	50 mm (15-33) 47
12719	アシュラセルフプレートACフリー	60 mm (15-43) 47
13141	アシュラセルフプレートER	40 mm (10-35) 46
13144	アシュラセルフプレートER	40 mm (25) 46
13151	アシュラセルフプレートER	50 mm (10-45) 46
13152	アシュラセルフプレートER	50 mm (30) 46
13153	アシュラセルフプレートER	50 mm (35) 46
13161	アシュラセルフプレートER	60 mm (10-55) 46
13014	アシュラセルフプレートG	40 mm (10-35) 46
13015	アシュラセルフプレートG	50 mm (10-45) 46
13016	アシュラセルフプレートG	60 mm (10-55) 46
14261	アシュラセルフプレートLC	40 mm (15-23) 46
14262	アシュラセルフプレートLC	50 mm (15-33) 46
14263	アシュラセルフプレートLC	60 mm (15-43) 46
14271	アシュラセルフプレートLC	40 mm (18) 46
14272	アシュラセルフプレートLC	40 mm (21) 46
14273	アシュラセルフプレートLC	50 mm (25) 46
14274	アシュラセルフプレートLC	50 mm (28) 46
14275	アシュラセルフプレートLC	50 mm (31) 46
14276	アシュラセルフプレートLC	60 mm (35) 46
14277	アシュラセルフプレートLC	60 mm (38) 46
14278	アシュラセルフプレートLC	60 mm (41) 46

ストーマケア製品

製品番号	製品名	頁
2881	アシュラセルフプレートT	40 mm (10-35) 46
2882	アシュラセルフプレートT	50 mm (10-45) 46
2883	アシュラセルフプレートT	60 mm (10-55) 46
12841	アシュラセルフプレートT	40 mm (20) 46
12842	アシュラセルフプレートT	40 mm (25) 46
12844	アシュラセルフプレートT	50 mm (30) 46
12845	アシュラセルフプレートT	50 mm (35) 46
12847	アシュラセルフプレートT	60 mm (40) 46
12848	アシュラセルフプレートT	60 mm (45) 46
2831	アシュラセルフプレートクリア	40 mm (10-35) 46
2832	アシュラセルフプレートクリア	50 mm (10-45) 46
2833	アシュラセルフプレートクリア	60 mm (10-55) 46
14250	アシュラセルフプレートクリア	40 mm (15) 46
14251	アシュラセルフプレートクリア	40 mm (20) 46
14252	アシュラセルフプレートクリア	40 mm (25) 46
14254	アシュラセルフプレートクリア	50 mm (30) 46
14255	アシュラセルフプレートクリア	50 mm (35) 46
14257	アシュラセルフプレートクリア	60 mm (40) 46
14258	アシュラセルフプレートクリア	60 mm (45) 46
14232	アシュラセルフプレートクリア	40 mm (18) 47
14233	アシュラセルフプレートクリア	40 mm (21) 47
14234	アシュラセルフプレートクリア	50 mm (25) 47
14235	アシュラセルフプレートクリア	50 mm (28) 47
14236	アシュラセルフプレートクリア	50 mm (31) 47
14237	アシュラセルフプレートクリア	60 mm (35) 47
14243	アシュラセルフプレートクリア	40 mm (15-23) 47
14246	アシュラセルフプレートクリア	50 mm (15-33) 47
14249	アシュラセルフプレートクリア	60 mm (15-43) 47
14281	アシュラセルフプレートクリアLC	40 mm (15-23) 47
14282	アシュラセルフプレートクリアLC	50 mm (15-33) 47
14283	アシュラセルフプレートクリアLC	60 mm (15-43) 47
14291	アシュラセルフプレートクリアLC	40 mm (18) 47
14292	アシュラセルフプレートクリアLC	40 mm (21) 47
14293	アシュラセルフプレートクリアLC	50 mm (25) 47
14294	アシュラセルフプレートクリアLC	50 mm (28) 47
14295	アシュラセルフプレートクリアLC	50 mm (31) 47
14296	アシュラセルフプレートクリアLC	60 mm (35) 47
14297	アシュラセルフプレートクリアLC	60 mm (38) 47
14298	アシュラセルフプレートクリアLC	60 mm (41) 47
9503	アシュラドレンインクリップ	59
2835	アシュラナイトドライナージ	40 mm 49
2836	アシュラナイトドライナージ	50 mm 49
2837	アシュラナイトドライナージ	60 mm 49
2792	アシュラロックパウチD	50 mm 48
2793	アシュラロックパウチD	60 mm 48
2801	アシュラロックパウチM	40 mm 48
2802	アシュラロックパウチM	50 mm 48
2803	アシュラロックパウチM	60 mm 48
1757	アシュラロックパウチU	40 mm 48
1758	アシュラロックパウチU	50 mm 48
1759	アシュラロックパウチU	60 mm 48
14224	アシュラロックパウチUC・Fit	40 mm 48

Index

五十音順索引

コロナリストについて

ストーマケア製品

製品番号	製品名	頁
19100	センシュラ 1 イレオ Xpro プラス	15-43 mm 36
19110	センシュラ 1 イレオ Xpro プラス	25 mm 36
19120	センシュラ 1 イレオ Xpro プラス	32 mm 36
19130	センシュラ 1 イレオ Xpro プラス	35 mm 36
11809	センシュラ 1 ウロ Xpro	10-76 mm 37
11831	センシュラ 1 ウロ Xpro	22 mm 37
11832	センシュラ 1 ウロ Xpro	25 mm 37
11833	センシュラ 1 ウロ Xpro	30 mm 37
11819	センシュラ 1 ウロ Xpro プラス	15-33 mm 37
11834	センシュラ 1 ウロ Xpro プラス	22 mm 37
11835	センシュラ 1 ウロ Xpro プラス	25 mm 37
11836	センシュラ 1 ウロ Xpro プラス	32 mm 37
15450	センシュラ 1 クローズ	10-66 mm 37
15452	センシュラ 1 クローズ	25 mm 37
15453	センシュラ 1 クローズ	30 mm 37
15454	センシュラ 1 クローズ	35 mm 37
15455	センシュラ 1 クローズ	40 mm 37
15605	センシュラ 1 プラス	15-33 mm 36
15606	センシュラ 1 プラス	15-43 mm 36
15607	センシュラ 1 プラス (ナチュラル)	15-33 mm 36
15608	センシュラ 1 プラス (ナチュラル)	15-43 mm 36
15623	センシュラ 1 プラス	25 mm 36
15624	センシュラ 1 プラス	28 mm 36
15625	センシュラ 1 プラス	31 mm 36
15626	センシュラ 1 プラス	35 mm 36
15627	センシュラ 1 プラス	40 mm 36
15633	センシュラ 1 プラス (ナチュラル)	25 mm 36
15634	センシュラ 1 プラス (ナチュラル)	28 mm 36
15635	センシュラ 1 プラス (ナチュラル)	31 mm 36
19020	センシュラ 1 ポストオペ 未滅菌	10-78 mm 49
19021	センシュラ 1 ポストオペ 未滅菌	10-115 mm 49
15420	センシュラ 1 ミニ	10-66 mm 37
10015	センシュラ 2 Xpro プレート	40 mm (10-35) 38
10016	センシュラ 2 Xpro プレート	40 mm (20) 38
10017	センシュラ 2 Xpro プレート	40 mm (25) 38
10025	センシュラ 2 Xpro プレート	50 mm (10-45) 38
10026	センシュラ 2 Xpro プレート	50 mm (30) 38
10027	センシュラ 2 Xpro プレート	50 mm (35) 38
10035	センシュラ 2 Xpro プレート	60 mm (10-55) 38
10036	センシュラ 2 Xpro プレート	60 mm (40) 38
10045	センシュラ 2 Xpro プレート	70 mm (10-65) 38
19040	センシュラ 2 イレオ (ナチュラル)	40 mm 39
19041	センシュラ 2 イレオ (ナチュラル)	50 mm 39
19042	センシュラ 2 イレオ (ナチュラル)	60 mm 39
19050	センシュラ 2 イレオ	40 mm 39
19051	センシュラ 2 イレオ	50 mm 39
19052	センシュラ 2 イレオ	60 mm 39
11844	センシュラ 2 ウロ (ナチュラル)	40 mm 39
11845	センシュラ 2 ウロ (ナチュラル)	50 mm 39
11846	センシュラ 2 ウロ (ナチュラル)	60 mm 39
11854	センシュラ 2 ウロ	40 mm 39
11855	センシュラ 2 ウロ	50 mm 39
11856	センシュラ 2 ウロ	60 mm 39
10154	センシュラ 2 クローズバッグ	40 mm 39

製品番号	製品名	頁
10155	センシュラ 2 クローズバッグ	50 mm 39
10156	センシュラ 2 クローズバッグ	60 mm 39
10167	センシュラ 2 クローズバッグ	70 mm 39
11124	センシュラ 2 バッグ (ナチュラル)	40 mm 39
11125	センシュラ 2 バッグ (ナチュラル)	50 mm 39
11126	センシュラ 2 バッグ (ナチュラル)	60 mm 39
11127	センシュラ 2 バッグ (ナチュラル)	70 mm 39
11194	センシュラ 2 バッグ	40 mm 39
11195	センシュラ 2 バッグ	50 mm 39
11196	センシュラ 2 バッグ	60 mm 39
11197	センシュラ 2 バッグ	70 mm 39
11011	センシュラ 2 プラスプレート	40 mm (15-23) 38
11012	センシュラ 2 プラスプレート	40 mm (21) 38
11021	センシュラ 2 プラスプレート	50 mm (15-33) 38
11022	センシュラ 2 プラスプレート	50 mm (25) 38
11023	センシュラ 2 プラスプレート	50 mm (28) 38
11024	センシュラ 2 プラスプレート	50 mm (31) 38
11031	センシュラ 2 プラスプレート	60 mm (15-43) 38
11032	センシュラ 2 プラスプレート	60 mm (35) 38
11041	センシュラ 2 プラスプレート	70 mm (15-53) 38
10011	センシュラ 2 プレート	40 mm (10-35) 38
10012	センシュラ 2 プレート	40 mm (20) 38
10013	センシュラ 2 プレート	40 mm (25) 38
10021	センシュラ 2 プレート	50 mm (10-45) 38
10022	センシュラ 2 プレート	50 mm (30) 38
10023	センシュラ 2 プレート	50 mm (35) 38
10031	センシュラ 2 プレート	60 mm (10-55) 38
10032	センシュラ 2 プレート	60 mm (40) 38
10041	センシュラ 2 プレート	70 mm (10-65) 38
11015	センシュラ 2 Xpro プラスプレート	40 mm (15-23) 38
11016	センシュラ 2 Xpro プラスプレート	40 mm (21) 38
11025	センシュラ 2 Xpro プラスプレート	50 mm (15-33) 38
11026	センシュラ 2 Xpro プラスプレート	50 mm (25) 38
11027	センシュラ 2 Xpro プラスプレート	50 mm (28) 38
11028	センシュラ 2 Xpro プラスプレート	50 mm (31) 38
11035	センシュラ 2 Xpro プラスプレート	60 mm (15-43) 38
11036	センシュラ 2 Xpro プラスプレート	60 mm (35) 38
11045	センシュラ 2 Xpro プラスプレート	70 mm (15-53) 38
11304	センシュラ フレックス Xpro プラスプレート	35 mm (15-23) 40
11305	センシュラ フレックス Xpro プラスプレート	50 mm (15-33) 40
11306	センシュラ フレックス Xpro プラスプレート	50 mm (15-43) 40
11308	センシュラ フレックス Xpro プラスプレート	70 mm (15-56) 40
10104	センシュラ フレックス Xpro プレート	35 mm (10-33) 40
10105	センシュラ フレックス Xpro プレート	50 mm (10-48) 40
10106	センシュラ フレックス Xpro プレート	70 mm (10-68) 40
11824	センシュラ フレックス ウロ (ナチュラル)	35 mm 41
11825	センシュラ フレックス ウロ (ナチュラル)	50 mm 41
11827	センシュラ フレックス ウロ	35 mm 41
11828	センシュラ フレックス ウロ	50 mm 41
10912	センシュラ フレックス クローズバッグ	50 mm 41
10915	センシュラ フレックス クローズバッグ (ナチュラル)	50 mm 41
10918	センシュラ フレックス クローズバッグ (ナチュラル)	70 mm 41
11512	センシュラ フレックス バッグ	50 mm 41
11517	センシュラ フレックス バッグ	70 mm 41

ストーマケア製品

製品番号	製品名	頁
11590	センシュラ フレックス バッグ	90 mm 41・49
11514	センシュラ フレックス バッグ (ナチュラル)	35 mm 41
11515	センシュラ フレックス バッグ (ナチュラル)	50 mm 41
11518	センシュラ フレックス バッグ (ナチュラル)	70 mm 41
11301	センシュラ フレックス プラスプレート	35 mm (15-23) 40
11302	センシュラ フレックス プラスプレート	50 mm (15-33) 40
11303	センシュラ フレックス プラスプレート	50 mm (15-43) 40
11307	センシュラ フレックス プラスプレート	70 mm (15-56) 40
11312	センシュラ フレックス プラスプレート	35 mm (21) 40
11313	センシュラ フレックス プラスプレート	50 mm (25) 40
11314	センシュラ フレックス プラスプレート	50 mm (28) 40
11315	センシュラ フレックス プラスプレート	50 mm (31) 40
11316	センシュラ フレックス プラスプレート	50 mm (35) 40
11317	センシュラ フレックス プラスプレート	50 mm (38) 40
11318	センシュラ フレックス プラスプレート	50 mm (41) 40
10101	センシュラ フレックス プレート	35 mm (10-33) 40
10102	センシュラ フレックス プレート	50 mm (10-48) 40
10103	センシュラ フレックス プレート	70 mm (10-68) 40
10108	センシュラ フレックス プレート	90 mm (10-88) 40・49
10111	センシュラ フレックス プレート	35 mm (21) 40
10114	センシュラ フレックス プレート	50 mm (25) 40
10115	センシュラ フレックス プレート	50 mm (28) 40
10116	センシュラ フレックス プレート	50 mm (31) 40
10117	センシュラ フレックス プレート	50 mm (35) 40
10118	センシュラ フレックス プレート	50 mm (41) 40
10895	センシュラ フレックス ミニ	50 mm 41
0423	センシュラ ミオ 専用ベルト	32
10481	センシュラ ミオ 1	10-55 mm 27
10482	センシュラ ミオ 1	25 mm 27
10483	センシュラ ミオ 1	30 mm 27
10484	センシュラ ミオ 1	35 mm 27
10487	センシュラ ミオ 1	40 mm 27
10485	センシュラ ミオ 1	45 mm 27
10486	センシュラ ミオ 1	50 mm 27
18665	センシュラ ミオ 1 イレオ	10-70 mm 28
18666	センシュラ ミオ 1 イレオ	10-100 mm 28
18671	センシュラ ミオ 1 イレオ ソフト	10-50 mm 28
18670	センシュラ ミオ 1 イレオ ソフト 不透明	10-50 mm 28
18676	センシュラ ミオ 1 イレオ ライト	10-43 mm 28
18675	センシュラ ミオ 1 イレオ ライト 不透明	10-43 mm 28
18680	センシュラ ミオ 1 ポストオペ 減菌済 (ウンドー付)	10

Index

五十音順索引

ストーマケア製品

製品番号	製品名	頁
16745	センシュラ ミオ 1 ライト	38 mm 27
16726	センシュラ ミオ 1 ライト 不透明	15-33 mm 27
16731	センシュラ ミオ 1 ライト 不透明	25 mm 27
16732	センシュラ ミオ 1 ライト 不透明	28 mm 27
16727	センシュラ ミオ 1 ライト 不透明	31 mm 27
16734	センシュラ ミオ 1 ライト 不透明	35 mm 27
16735	センシュラ ミオ 1 ライト 不透明	38 mm 27
10471	センシュラ ミオ 1 不透明	10-55 mm 27
10472	センシュラ ミオ 1 不透明	25 mm 27
10474	センシュラ ミオ 1 不透明	30 mm 27
10476	センシュラ ミオ 1 不透明	35 mm 27
10479	センシュラ ミオ 1 不透明	40 mm 27
18640	センシュラ ミオ 2 イレオ	50 mm 32
18641	センシュラ ミオ 2 イレオ	60 mm 32
18642	センシュラ ミオ 2 イレオ	70 mm 32
11492	センシュラ ミオ 2 ウロ	40 mm 32
11498	センシュラ ミオ 2 ウロ	50 mm 32
11500	センシュラ ミオ 2 ウロ	60 mm 32
18735	センシュラ ミオ 2 キップ フレックスプレート	27 mm (0-27 mm) 34
18747	センシュラ ミオ 2 キップ フレックスプレート	35 mm (0-35 mm) 34
18723	センシュラ ミオ 2 キップ フレックスパッジ	27 mm 34
18725	センシュラ ミオ 2 キップ フレックスパッジ	35 mm 34
18722	センシュラ ミオ 2 キップ フレックスパッジ 不透明	27 mm 34
18724	センシュラ ミオ 2 キップ フレックスパッジ 不透明	35 mm 34
18730	センシュラ ミオ 2 キップ フレックス ウロ 不透明	27 mm 34
18731	センシュラ ミオ 2 キップ フレックス ウロ 不透明	35 mm 34
11401	センシュラ ミオ 2 クローズパッジ 不透明	40 mm 32
11412	センシュラ ミオ 2 クローズパッジ 不透明	50 mm 32
11421	センシュラ ミオ 2 クローズパッジ 不透明	60 mm 32
11425	センシュラ ミオ 2 クローズパッジ 不透明	70 mm 32
18500	センシュラ ミオ 2 コンケープ プレート	10-35 mm 31
18510	センシュラ ミオ 2 コンケープ プレート	10-45 mm 31
18513	センシュラ ミオ 2 コンケープ プレート	35 mm 31
18520	センシュラ ミオ 2 コンケープ プレート	10-55 mm 31
18523	センシュラ ミオ 2 コンケープ プレート	40 mm 31
18524	センシュラ ミオ 2 コンケープ プレート	45 mm 31
18530	センシュラ ミオ 2 コンケープ プレート	10-65 mm 31
18532	センシュラ ミオ 2 コンケープ プレート	50 mm 31
11463	センシュラ ミオ 2 バッグ	40 mm 32
11473	センシュラ ミオ 2 バッグ	50 mm 32
11483	センシュラ ミオ 2 バッグ	60 mm 32
11487	センシュラ ミオ 2 バッグ	70 mm 32
11462	センシュラ ミオ 2 バッグ 不透明	40 mm 32
11472	センシュラ ミオ 2 バッグ 不透明	50 mm 32
11482	センシュラ ミオ 2 バッグ 不透明	60 mm 32
11486	センシュラ ミオ 2 バッグ 不透明	70 mm 32
10502	センシュラ ミオ 2 プレート	40 mm (10-35) 31
10503	センシュラ ミオ 2 プレート	40 mm (20) 31
10504	センシュラ ミオ 2 プレート	40 mm (25) 31
10512	センシュラ ミオ 2 プレート	50 mm (10-45) 31
10513	センシュラ ミオ 2 プレート	50 mm (30) 31
10515	センシュラ ミオ 2 プレート	50 mm (35) 31
10522	センシュラ ミオ 2 プレート	60 mm (10-55) 31
10523	センシュラ ミオ 2 プレート	60 mm (40) 31

製品番号	製品名	頁
10531	センシュラ ミオ 2 プレート	70 mm (10-65) 31
16941	センシュラ ミオ 2 プレート ディープ	10-20 mm 31
16951	センシュラ ミオ 2 プレート ディープ	15-30 mm 31
16961	センシュラ ミオ 2 プレート ディープ	15-40 mm 31
16971	センシュラ ミオ 2 プレート ディープ	15-53 mm 31
16942	センシュラ ミオ 2 プレート ディープ	18 mm 31
16953	センシュラ ミオ 2 プレート ディープ	21 mm 31
16954	センシュラ ミオ 2 プレート ディープ	25 mm 31
16955	センシュラ ミオ 2 プレート ディープ	28 mm 31
16963	センシュラ ミオ 2 プレート ディープ	31 mm 31
16964	センシュラ ミオ 2 プレート ディープ	35 mm 31
16973	センシュラ ミオ 2 プレート ディープ	38 mm 31
16974	センシュラ ミオ 2 プレート ディープ	41 mm 31
16901	センシュラ ミオ 2 プレート ライト	10-20 mm 31
16911	センシュラ ミオ 2 プレート ライト	15-30 mm 31
16921	センシュラ ミオ 2 プレート ライト	15-40 mm 31
16931	センシュラ ミオ 2 プレート ライト	15-53 mm 31
16903	センシュラ ミオ 2 プレート ライト	18 mm 31
16913	センシュラ ミオ 2 プレート ライト	21 mm 31
16914	センシュラ ミオ 2 プレート ライト	25 mm 31
16915	センシュラ ミオ 2 プレート ライト	28 mm 31
16923	センシュラ ミオ 2 プレート ライト	31 mm 31
16924	センシュラ ミオ 2 プレート ライト	35 mm 31
16933	センシュラ ミオ 2 プレート ライト	38 mm 31
16934	センシュラ ミオ 2 プレート ライト	41 mm 31
16943	センシュラ ミオ 2 ブレット ライト	38 mm 33
16494	センシュラ ミオ 2 ブレット ライト	41 mm 33
18705	センシュラ ミオ 2 ベビー フレックスプレート	20×40 mm 34
18700	センシュラ ミオ 2 ベビー フレックスパッジ	20×40 mm 34
9405	デオール 消臭・除菌スプレー	300 ml 63
9330	デオール 消臭潤滑剤 つめかえ用	200 ml 61
9301	デオール 消臭潤滑剤 ボトル	250 ml 61
9322	デオール 消臭潤滑剤 ミニパック	61
14010	排液パッジ (外径接続型)	28・39・49
9505	ハサミ SS	長さ 107 mm 59
3210	プラバ ウエハー	10×10 cm 58
3215	プラバ ウエハー	15×15 cm 58
3220	プラバ ウエハー	20×20 cm 58
12070	プラバ 伸縮性皮膚保護テープ	57
12076	プラバ 伸縮性皮膚保護テープ XL	57
12074	プラバ 伸縮性皮膚保護テープ ストレート型	57
12072	プラバ 伸縮性皮膚保護テープ ベルト型	57
2655	プラバ スティックペースト	58
12014	プラバ 粘着剝離剤 センシュラミオ ベビー専用	34
12010	プラバ 粘着剝離剤 スプレー	58
12011	プラバ 粘着剝離剤 ワイプ	58
1907	プラバ パウダー	58
12020	プラバ 皮膚被膜剤 スプレー	58
12021	プラバ 皮膚被膜剤 ワイプ	58
12032	プラバ プロテクティブシール 厚み 2.5 mm (18-76) 57	57
12033	プラバ プロテクティブシール 厚み 2.5 mm (27-76) 57	57
12035	プラバ プロテクティブシール 厚み 2.5 mm (18-48) 57	57
12037	プラバ プロテクティブシール 厚み 2.5 mm (27-57) 57	57
12039	プラバ プロテクティブシール 厚み 2.5 mm (34-64) 57	57
12045	プラバ プロテクティブシール 厚み 4.2 mm (18-48) 57	57
12047	プラバ プロテクティブシール 厚み 4.2 mm (27-57) 57	57
12049	プラバ プロテクティブシール 厚み 4.2 mm (34-64) 57	57
12050	プラバ ベースト	57
0421	プラバ ベルト	59
12030	プラバ モルダブルリング 厚み 2.0 mm 57	57
12042	プラバ モルダブルリング 厚み 4.2 mm 57	57
9020	メジャー付ハサミ	59
9021	メジャー付ハサミ (左利き用)	59
0430	4点止め安心ベルト (90cm)	32
0440	4点止め安心ベルト (120cm)	32
16471	センシュラ ミオ 2 フレックスプレート ライト	10-20 mm 33
16481	センシュラ ミオ 2 フレックスプレート ライト	15-30 mm 33
16483	センシュラ ミオ 2 フレックスプレート ライト	15-40 mm 33
16491	センシュラ ミオ 2 フレックスプレート ライト	15-53 mm 33
16472	センシュラ ミオ 2 フレックスプレート ライト	18 mm 33
16484	センシュラ ミオ 2 フレックスプレート ライト	21 mm 33
16485	センシュラ ミオ 2 フレックスプレート ライト	25 mm 33
16486	センシュラ ミオ 2 フレックスプレート ライト	28 mm 33
16487	センシュラ ミオ 2 フレックスプレート ライト	31 mm 33
16488	センシュラ ミオ 2 フレックスプレート ライト	35 mm 33

ストーマケア製品

製品番号	製品名	頁
16493	センシュラ ミオ 2 フレックスプレート ライト	38 mm 33
16494	センシュラ ミオ 2 フレックスプレート ライト	41 mm 33
18705	センシュラ ミオ 2 ベビー フレックスプレート	20×40 mm 34
18700	センシュラ ミオ 2 ベビー フレックスパッジ	20×40 mm 34
9405	デオール 消臭・除菌スプレー	300 ml 63
9330	デオール 消臭潤滑剤 つめかえ用	200 ml 61
9301	デオール 消臭潤滑剤 ボトル	250 ml 61
9322	デオール 消臭潤滑剤 ミニパック	61
14010	排液パッジ (外径接続型)	28・39・49
9505	ハサミ SS	長さ 107 mm 59
3210	プラバ ウエハー	10×10 cm 58
3215	プラバ ウエハー	15×15 cm 58
3220	プラバ ウエハー	20×20 cm 58
12070	プラバ 伸縮性皮膚保護テープ	57
12076	プラバ 伸縮性皮膚保護テープ XL	57
12074	プラバ 伸縮性皮膚保護テープ ストレート型	57
12072	プラバ 伸縮性皮膚保護テープ ベルト型	57
2655	プラバ スティックペースト	58
12014	プラバ 粘着剝離剤 センシュラミオ ベビー専用	34
12010	プラバ 粘着剝離剤 スプレー	58
12011	プラバ 粘着剝離剤 ワイプ	58</



*So you
can be
you*

コロプラスチは、個人的な健康上のニーズをお持ちの方々の生活をより快適にするための製品やサービスをお届けしています。製品を使ってくださっている方々の声に耳を傾け、ともに開発を行い、お一人おひとりのニーズに即した解決方法を見つけ出しています。私たちはこれをインティメイト・ヘルスケアと呼んでいます。

コロプラスチは、ストーマケア、コンチネンスケア、ウンドケア、ウロロジーケアの分野で世界的にビジネス展開し、12,000名以上の社員を擁しています。

オストミー関連製品 医療施設用

コロプラスチ株式会社 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-1-30 イタリア文化会館ビル11F
www.coloplast.co.jp ☎ 0120-664-469

©2021-04 無断複写・転載を禁じます。

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2021-04. All rights reserved Coloplast A/S



制作年月：2021.04 / K12000 / 99625N